



隣接歯保護用ウェッジ

フェンダーウェッジ・プロ

CR修復用マトリックス

フェンダーメイト

DIRECTAの商品はスウェーデンの歯科医師によって
デザインされています



FENDERWEDGE®

フェンダーウェッジ・プロ



FENDERMATE®

フェンダーメイト



■ ホームページで動画がご覧いただけます。

クロスフィールドWEB

検索

CrossField ▶ www.crossf.com



早くて安全なウェッジ



- ・プレパレーション時に隣接歯を傷つける心配がありません。
- ・歯間を広げるのでフェンダーメイトがより入れやすくなります。
- ・差し込みやすいマトリックスで、コンタクトポイントを形成します。(歯間を広げます)
- ・一度差し込むと安定して取れにくくなります。



ウェッジを差し込む



歯間を広げて一定の位置にとどめる



隣接歯を保護



使用後の状態例
プレパレーション時に隣接歯を傷つけるのを防ぎます




プレパレーション



形成時、隣接歯を傷つける心配がありません



フェンダーウェッジ・プロを抜き取って修復に移ります

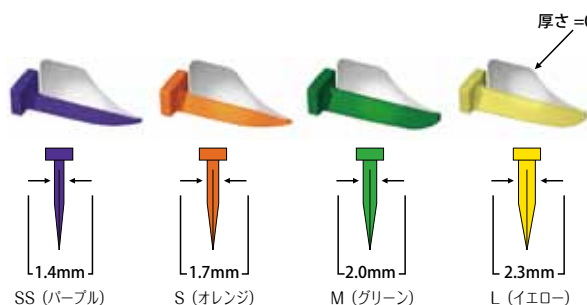

厚さ=0.08mm

SS (パープル)

S (オレンジ)

M (グリーン)

L (イエロー)

FENDERWEDGE®



商品名 **フェンダーウェッジ・プロ**

医療機器届出番号 13B1X0013300029

アソート 標準価格 15,840 円 (税別) @110 円 (SS, S, M, L 各 36 個) 計 144 個入

単品 各 1 箱 標準価格 4,320 円 (税別) @120 円 (SS, S, M, L) 36 個入

単品バリューバック 各 1 箱

標準価格 9,000 円 (税別) @90 円 (SS, S, M, L) 100 個入

注意

- ・歯間を広げるようにして差し込んでください。
- ・使用後に歯間が多少開いていても自然に戻ります。
- ・差し込みができないときは種類を変えるか、使用を止めてください。

フェンダーウェッジ・プロ&フェンダーメイト イントロキット 医療機器届出番号 13B1X0013300036

標準価格 7,000 円 (税別) (フェンダーウェッジ・プロ / SS3個、S3個、M1個、L1個) 計8個入


(フェンダーメイト / レフトN8個、レフトR2個、ライトN8個、ライトR2個) 計20個入

CR 修復用マトリックス フェンダーメイト



早くて簡単な マトリックス

・フェンダーウェッジ・プロにて隣接歯を保護しながら形成すると歯間が広がっているの、よりフェンダーメイトを入れるようになります。

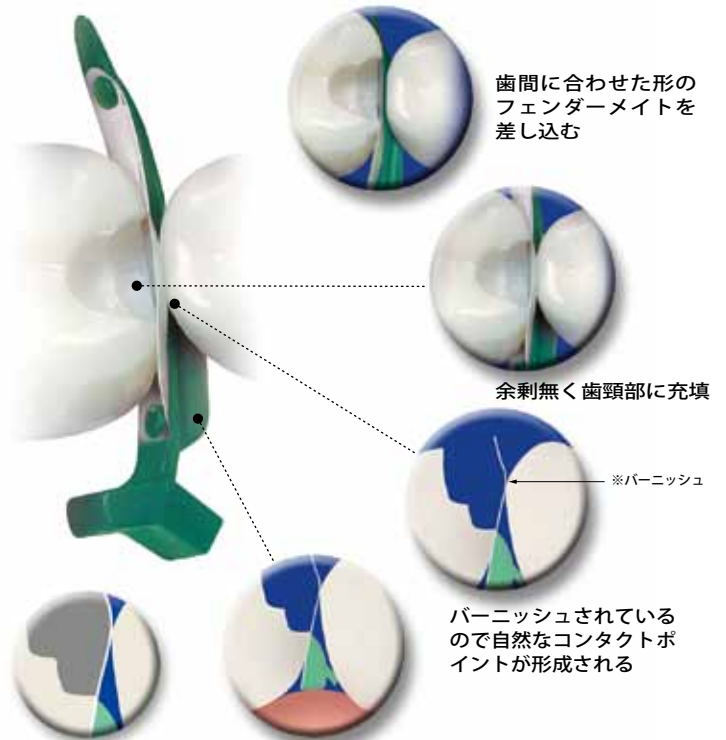

歯間に合わせた形のフェンダーメイトを差し込む

余剰無く歯頸部に充填

※バーニッシュ

バーニッシュされているので自然なコンタクトポイントが形成される

適切に余剰なく歯頸部に充填

歯間を広げながら歯頸部を押さえる

※バーニッシュ



CR 修復



歯間を広げながらフェンダーメイトを差し込みます



充填し、圧接形成します



フェンダーメイトを抜き取って余剰分を形成します



良好な修復状態



FENDERMATE®



商品名 **フェンダーメイト**

医療機器届出番号 13B1X00133000028

アソート 標準価格 **22,320円 (税別)** @310円 (レフトN,レフトR,ライトN,ライトR 各18個) 計72個入

単品 各1箱 標準価格 **6,120円 (税別)** @340円 (レフトN,レフトR,ライトN,ライトR) 18個入

単品バリューパック 各1箱

標準価格 **26,000円 (税別)** @260円 (レフトN,レフトR,ライトN,ライトR) 100個入

フェンダーウェッジ・プロ&フェンダーメイト **イントロキット** 医療機器届出番号 13B1X00133000036

標準価格 **7,000円 (税別)** (フェンダーウェッジ・プロ / SS3個、S3個、M1個、L1個) 計8個入

(フェンダーメイト / レフトN8個、レフトR2個、ライトN8個、ライトR2個) 計20個入

注意

- ・フェンダーメイトを差し込む前にボンディング材を塗布してください。
- ・歯間を広げるようにして差し込んでください。
- ・よりきつく差し込んだ方が、自然な仕上がりになります。
- ・使用後に歯間が多少開いていても自然に戻ります。
- ・差し込みができないときは種類を変えるか、使用を止めてください。