

All-Around
ball-attached instruments

オールアラウンド


外科用マルチインスツルメント



INMEDIC



ボールジョイント式インスツルメントによって、小規模の口腔外科手術やクリーニングだけでなく口腔内での専門術式操作に役立ちます。オールアラウンドはDan Lundgren教授（イエテボリ、スウェーデン）によって開発されました。

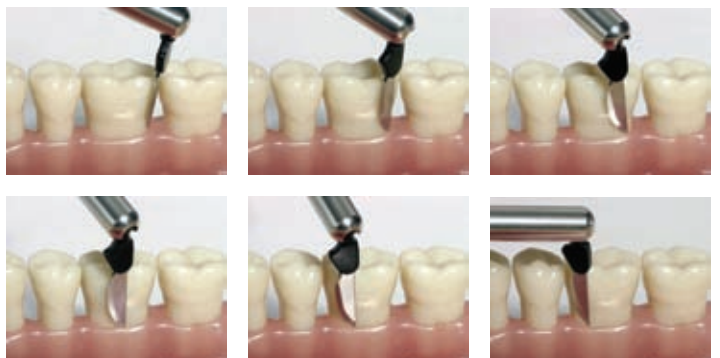

オールアラウンドをご使用になれば 口腔内の隅々にアクセスできます。

術者は小手術だけでなくペリオのブロービング、スケーリング、充填物の形成などの治療時、口腔内へのアクセスに限界があると感じています。

■快適なアクセス

アクセスしやすく、術者にも患者さんにとっても快適です。ボールジョイントで機能する独創的なハンドルはDan Lundgren教授（イエテボリ、スウェーデン）によって開発されました。

■多方向への調節機能

オールアラウンドハンドルは、ボールジョイント式の採用によってインスツルメントの方向が調節可能で、アクセスが難しい部位でも巧みに操作できます。

■様々な治療で使えます

ハンドルには様々なインスツルメント（メス、フラップエレベータ、スケーラ、キュレット）を装着でき、いろいろな治療にお使いいただけます。

■高精度、エルゴノミクス

位置・角度を調整できるボールジョイントによって、各種インスツルメントの固定と解除が簡単に操作でき、エルゴノミクスデザインは口腔内の到達しにくい場所でも、術者の正確な操作を可能にします。切開、歯肉切離、肉芽除去、スケーリング、ブロービングに対するオールアラウンドの優れた機能は高く評価されています。

■短いチェアタイム

口腔内のすべての領域（前歯、臼歯、口蓋、舌側、近心、遠心）で、スムーズに、安全に、精巧な操作ができるので、チェアタイムの時間が短くなります。

■患者さんの高い満足度

ユニークな「到達可能性」を備えたオールアラウンドは、患者さんにとって不快でストレスが多かった口腔内の操作を能率的にし、患者さんの満足度を高めます。

プロフェッショナルのためのオールアラウンド

●一つのハンドルが多彩なインスツルメントへ

オールアラウンドはボールジョイントを持つ真直ぐなハンドルです。ボールは任意の位置に容易に固定することができます。そのため、インスツルメントの位置を操作中簡単に変更できるので、術者は口腔内各部位にアクセスしやすくなります。

●ペリオ外科手術—過去、現在、未来

- ・ペリオ外科手術の歴史は再使用可能な固定式メスの導入から始まりました。このメスは頻繁に研ぐ必要がありました。
- ・その後、使い捨てのストレートあるいは角度付ハンドルにネジ留めされたメスが開発されました。
- ・これからはオールアラウンド（万能の意）です！ このシステムは、1つのハンドルで数種類のインスツルメントを交換したり、その位置（向き）を簡単に変えることができます。

●オールアラウンドはどこへでもアクセス可能

オールアラウンドは、狭く、到達するのが難しいと考えられる部位で歯周・インプラント周囲外科手術、軟組織および硬組織外科手術を容易にします。オールアラウンドを使用した歯科医の方々は、従来型のインスツルメントがアクセスしにくい部位でもオールアラウンドには多くの利点があると理解できます。特に舌側、臼歯部で作業性が高まります。

●無段階に調節可能

ボールの位置を変えて固定できるというオールアラウンドの特長により、ほとんどの切開でメスを使い、フラップエレベータで骨膜を剥離することもできます。

オールアラウンドメスNo.69は
最適な切開線を可能にします。



オールアラウンドのフラップエレベータは
フラップの挙上に最適です。



オールアラウンドのキュレットとスケーラは
アバットメント周囲に有効です。



オールアラウンドはボールジョイント式インスツルメントで、ハンドルとボール付きインスツルメントから構成されています。


ハンドルは、グリップ (1) とハンドル部 (2) で構成されています。

インスツルメントのボールはグリップの前方のボールケージ内へ側面の開口部 (3) より挿入します。

ハンドル部の先端の凹面は、リング状エッジ形態 (4) で、インスツルメントのボール (5) を固定することができます。

ハンドル部の後部のフラットなノブ (6) を締めるとインスツルメントは希望の位置に固定されます。

グリップの側面の開口部と先端開口部 (7) はスリットでつながっています。

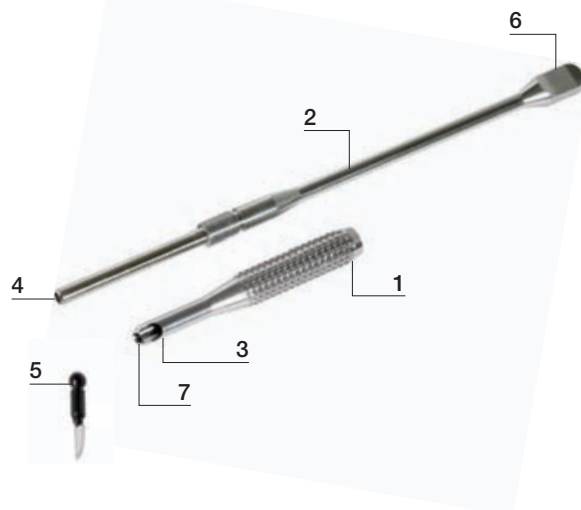

オールアラウンドのオピニオンリーダー

Dr. CHRISTOPH HAMMERLE

補綴学教授 / チューリッヒ大学、スイス

ボールジョイント式のオールアラウンドは、「到達するのが難しい部位」でも、最適な切開およびフラップ挙上が可能です。

Dr. HARALD RYLANDER

歯周病学専門医 / イエテボリ大学、スウェーデン

オールアラウンドのメスとフラップエレベータは、私の歯周病外科の切開、フラップ挙上術式に新たな範囲を広げてくれました。

Dr. CHRISTER SLOTTE

歯周病学専門医 / ポストグラデュエート・デンタルセンター、ヨンショーピン、スウェーデン

ボールジョイント式によりインスツルメントを術中に無段階に固定・解除することができるので、どのような外科部位にもアクセスしやすくなりました。

Dr. NIKLAUS LANG

歯周病学および補綴学教授 / ベルン大学、スイス

切開の位置を、正確に狙えます (とりわけ舌側および隣接部)。おかげで、チェアタイムが短くなりました。

Dr. ULF LEKHOLM

口腔インプラント外科教授 / イエテボリ大学、スウェーデン

オールアラウンドのメスとフラップエレベータは、インプラントや歯牙の狭い領域で軟組織を容易に処置できます。

Dr. MASSIMO SIMION

口腔インプラント外科教授 / ミラノ大学、イタリア

ボールジョイント式のインスツルメントが、エルゴノミックな使いやすさで、特にアクセスしにくい領域の治療で精度の高い操作を可能にしてくれます。

オールアラウンド ボール付インスツルメント

★付は単回使用です。

★メスNo.15

標準価格：5,000円（10入り）

- 全方向に調節可能
- 歯周病外科での3種の基準スカルペルの働きが可能
- 口腔内の届きにくい部位へも到達
- 単回使用

メスNo.15は、シングル・エッジのスカルペル。1枚のスカルペルブレードを様々な方向に位置付けすることが可能なので、3種（ストレート、ライト・レフトアンギュレーテッド）の異なるスカルペルとして使用できます。単回使用。



★メスNo.15c

標準価格：6,000円（10入り）

- 全方向に調節可能
- 狭い部位に適応
- 歯牙、インプラントの軟組織を修正
- 単回使用

メスNo.15cは、メスNo.15より細く、短いタイプ。狭い部位に最適です。単回使用。



★メスNo.69

標準価格：15,000円（10入り）

- 全方向に調節可能
- 歯牙とインプラントの軟組織の調整
- 埋入型インプラントと埋伏歯の露出
- 単回使用

メスNo.69は、メスNo.15、No.15cより少し短い、ダブルエッジ形状のミニブレードです。



キュレット

6.0 標準価格：7,000円（長さ6mm）
9.0 標準価格：7,000円（長さ9mm）

- 全方向に調節可能
- 特に臼歯部に適応
- 到達しにくい部位でのスクレーリングに最適
- ステンレススチール製
- 6mm、9mm、2種類の長さ

キュレットを様々な方向に位置付けることにより、キュレットのエッジが通常到達しにくい部位でも簡単に施術することができます。キュレットは研ぐこともでき、何度か再使用できます。



キュレット

6.0（テフロン加工）標準価格：7,000円（長さ6mm）
9.0（テフロン加工）標準価格：7,000円（長さ9mm）

- 全方向に調節可能
- 特に臼歯部に適応
- 到達しにくい部位でのスクレーリングに最適
- ステンレススチール製テフロン加工
- 6mm、9mm、2種の長さ

ステンレススチール基材のため硬く、テフロンコーティングのおかげでインプラントやアバットメント表面の歯石や沈着物の除去時、傷が付きにくく、天然歯のスクレーリングのためのスチールキュレットとしても使用できます。



記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容は予告なく変更される場合があります。

★スクーラ

標準価格：4,000円（10入り）

- 全方向に調節可能
- インプラントの沈着物除去に理想的
- プラスチック製
- 単回使用

様々な方向へ位置付けすることによって、施術するのが難しいインプラント部位でもエッジが到達します。インスツルメントはインプラント、アバットメントの表面に適合する形状になっているので、沈着物を容易に除去することができます。



フラップエレベータ

2.0 標準価格：10,000円（幅2mm）
3.0 標準価格：10,000円（幅3mm）
4.0 標準価格：10,000円（幅4mm）

- 全方向に調節可能
- アクセスしにくい部位の骨膜の挙上が容易
- シュナイダー膜挙上に最適
- 2mm、3mm、4mm、3種類の幅
- ステンレススチール製

ステンレススチール製フラップエレベータです。先端は骨膜の挙上やシュナイダー膜挙上スムーズに行える形態です。また、このフラップエレベータは軟組織移植のポケットを作るのにも使用できます。



オールアラウンド ハンドル

オールアラウンドハンドル


標準価格：28,000円

- すべてのオールアラウンド用のインスツルメントを装着します。
- 安全なエルゴノミクスグリップです。
- インスツルメントの変更を無理なくできます。
- インスツルメントをどんな角度でもしっかりと固定できます。



オールアラウンドスタートキット

標準価格：30,000円

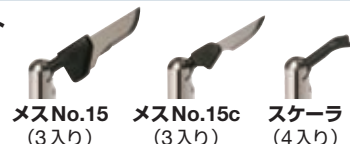

メスNo.15 (3入り) メスNo.15c (3入り) スクーラ (4入り)

内容物

オールアラウンドハンドル：1

★スタートキット専用アソートセット：1

（メスNo.15：3、メスNo.15c：3、スクーラ：4）

※アソートセットのみの販売はしていません。

医療機器届出番号 13B1X00133000009 13B1X00133000010

お問い合わせは