



Geko Tweezers®

ワムゲコツィーザー



セルフロック式の安全で簡単な多目的ツィーザー

作業部がシリコンチップなので、補綴物へのダメージが少ない状態で、安定して把持できる。

交差式のハンドルを採用。ハンドルを握ると作業部が開いて補綴物などを離せる。

調整ネジはどちら側でも使用できる。

調整ネジを締めるとストッパーが働き、把持力が弱まるので補綴物へのダメージを少なくできる。(調整ネジを外しても使用できる)

※実寸大

ツィーザーが補綴物を把持しているので、強く握り続ける必要がなく疲れにくい。補綴物が落ちる心配がほとんどない。

適応例

クラウン、オールセラミック、ガッターパーチャポイント、ダイヤモンドバー、カーバイドバー、ファイバーポスト、インレー、オンレー、アバットメント、インプラント、ブラケット、バンド、クラスプ、咬合紙、メス（着脱）など様々なものを把持できる

〈ワムゲコペーストなし〉

ワムゲコペーストを使わなくてもワムゲコシリコンチップのみでやさしく把持できる。

〈ワムゲコペーストあり〉

ワムゲコペーストを使うことにより把持するときの粘着力を強め、ダメージをより少なくする。

指では掴みにくいインレーを従来のピンセットのように滑ることなく確実に把持して試適、装着ができる。(ワムゲコペースト併用可)

ワムゲコペースト

グローブを巻き込むことも、指先が熱くなることもなく、インレー、クラウンなどの金属の削合、研磨が行える。

セラミックアバットメントを把持したままドライバーでねじを固定する。(ワムゲコペースト併用可)

WAM Geko Tweezers® ワムゲコツィーザー





滑りやすいオールセラミック冠も把持できる。口腔内への試適にも安心して使用できる。



インプラント治療では、歯肉縁下でアバットメント等を固定する時に浮き上がりを防止しながら、ねじ止めが可能になる。




根充用ピンセットとしてもあらゆる角度で使用できる。

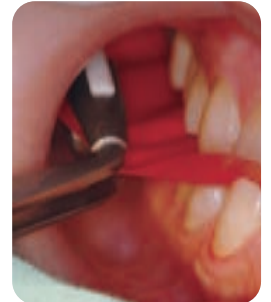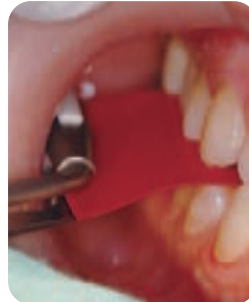

咬合紙ホルダーとして、咬合チェック、コンタクトチェックにも使用できる。



パースタンドなど狭い所からバーを取り出し、持ち替えることなくタービンにそのまま装着できる。

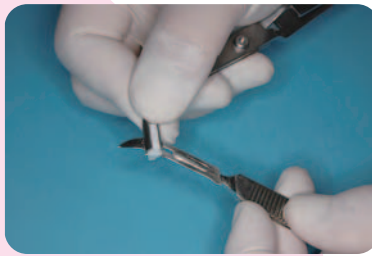

メスの着脱にも利用できる。その他には粘膜や歯肉へのダメージを抑え、フラップの保持ができる。



先端部のワムゲコシリコンチップを付けたままオートクレーブ滅菌もできる。



商品名 ワムゲコツィーザー

セット内容

ワムゲコツィーザー
ワムゲコシリコンチップ
ワムゲコペースト
調整ネジ

標準価格 26,000 円 (税別)

1 個
1 袋 (20 入)
1 個 (5 ml)
1 個

オプション

ワムゲコシリコンチップ
ワムゲコペースト

1 袋 (20 入)
標準価格 4,000 円 (税別)
1 個 (5 ml)
標準価格 4,000 円 (税別)

ワムゲコシリコンチップ
(オートクレーブ可)

ワムゲコペースト
(オートクレーブ不可、再使用禁止)

調整ネジ



医療機器品出番号 13B1X00133000037

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所