

期間限定セール

有効期限：2012年1月1日～2012年3月31日まで




力に頼らない、無理のない抜歯ができる ラクスエーター・プラス Luxator® Plus


当社実施アンケート結果 (有効回答数：33)



総合評価

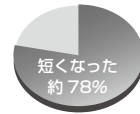

時間は？

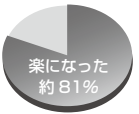

処置は？

医療機器届出番号 1381X0013300007


全品 20%off

ラクスエーター・プラス

標準価格(税別)


特別価格(税別)

● K4(スタンダード 4本) 4本セット(3C 3S 5C 5S)+シャープニングツール 1本/解説 CD-ROM 付き	34,000円	→	27,200円
◆ SK4(ショートモデル 4本) 4本セット(S2S S3C S3S S3CA)+シャープニングツール 1本/解説 CD-ROM 付き	34,000円	→	27,200円
■ K7(スタンダード 7本) 7本セット(2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S)+シャープニングツール 1本/解説 CD-ROM 付き	56,000円	→	44,800円
1本 1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, S2S, S3C, S3S, S3CA	9,500円	→	7,600円
1本 DE3, DE5	11,000円	→	8,800円

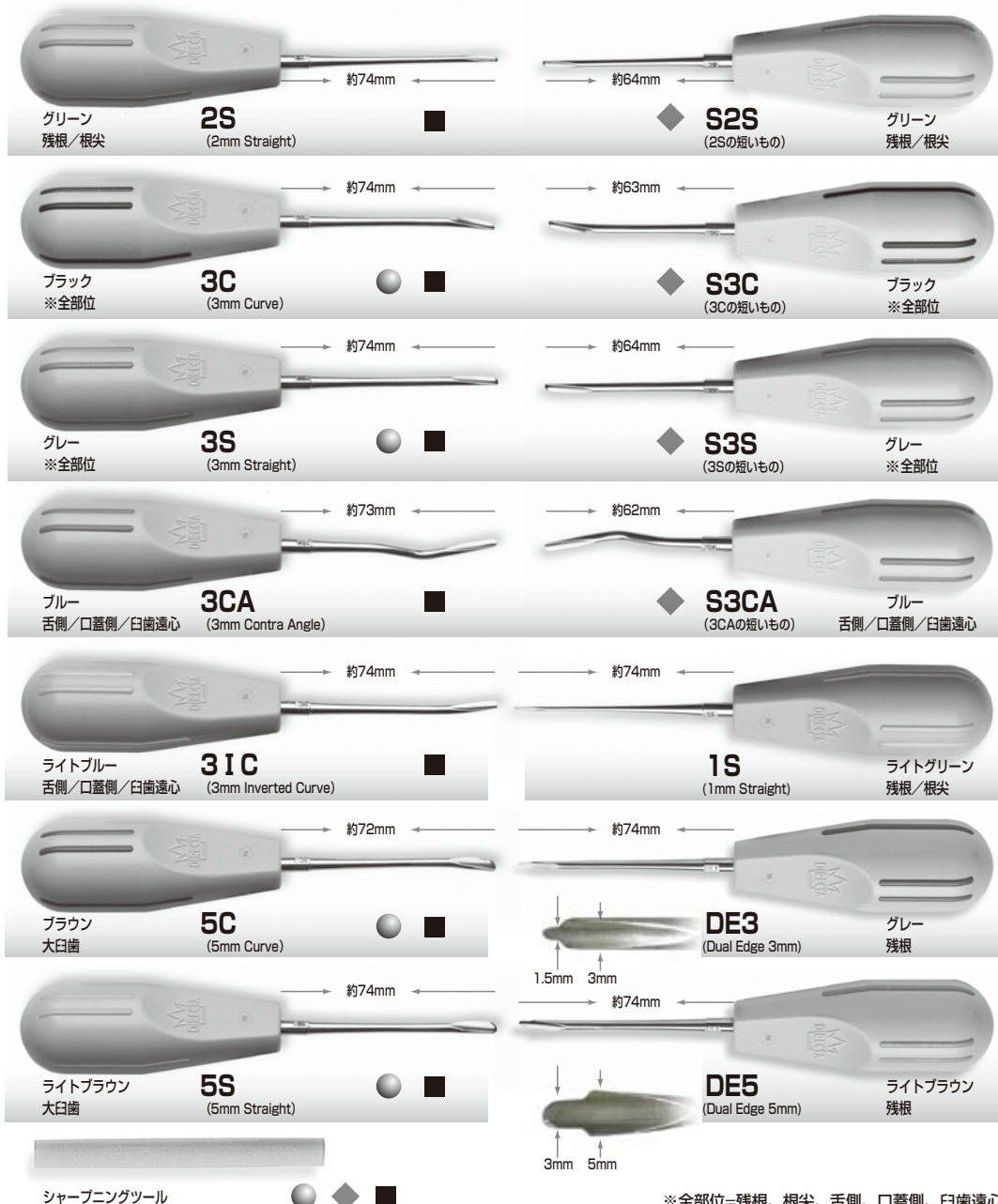


〔使用方法〕


1. 歯牙長軸方向に対して真直ぐに挿入します。

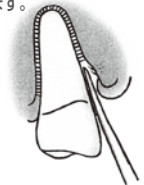

2. 歯牙に沿わせて歯槽骨を圧迫しながら歯周靭帯を切り進めていきます。

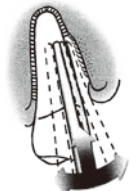

3. 根長の3分の2程度切断していきと楔効果により歯牙を脱臼できます。

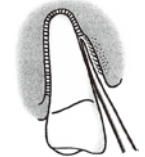

〔注意〕

エレベーターのように使用できません。間違った使用方法によるブレードの破損や折れは保証の対象になりません。



※全部位=残根、根尖、舌側、口蓋側、臼歯遠心

期間限定セール

有効期限：2012年1月1日～2012年3月31日まで



プリマダイヤモンドバー Predator Zirconia Diamonds プレデタージルコニア

クラウン除去用ダイヤモンドバー
ジルコニアでも切れ味長持ち！！

初めて使われる方のために1本入り新たに加わりました。


★ Z856-018F ★ Z856-018M

- ▶ ジルコニアでも高い切削力を維持できます。
- ▶ メタルボンドクラウンなど他の補綴物でも高い切削力を発揮します。
- ▶ 特殊接着によりダイヤモンド粒子がはがれにくくなっています。
- ▶ 消費率が低く高いコストパフォーマンスを実現

20%off

タービン (400,000rpm) での切削

補綴物表面に亀裂を伴う事はなく、鋭利な切削断面を示す。

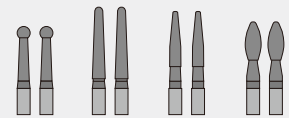

商品名 プレデタージルコニア

医療機器届出番号 13B1X00133000031

Z801-018F, Z856-018F, Z862-014F, Z368-023F (F ファイン)

Z801-018M, Z856-018M, Z862-014M, Z368-023M (M ミディアム)

標準価格 各6,000円 (税別) /5本入 → 特別価格：4,800円 (税別)

標準価格 各1,300円 (税別) /1本入 → 特別価格：1,040円 (税別)
(Z856-018F, Z856-018Mのみ)

FIG NO.	801	856	862	368
DIAMETER 1/10 MM	018	018	014	023
H/LENGTH(MM)	-	9.0	7.0	5.0
FINE (ファイン)	●	●	●	●
MEDIUM (ミディアム)	●	●	●	●



ラクスエーター・フォルテ

Luxator®


FORTE

20%off


ラクスエーター・フォルテ

標準価格 1本 9,500円 (税別)



→ 特別価格 7,600円 (税別)

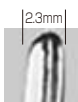



ラクスエーター・フォルテ F25

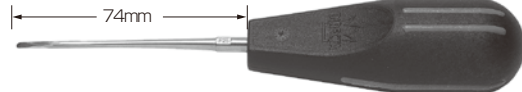

ラクスエーター・フォルテ F32

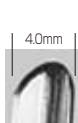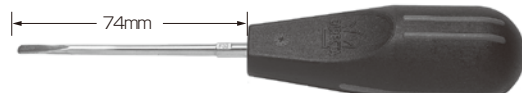

ラクスエーター・フォルテ F40

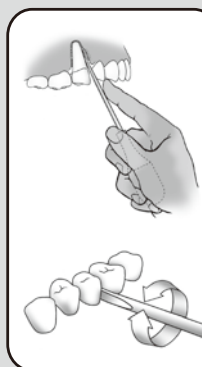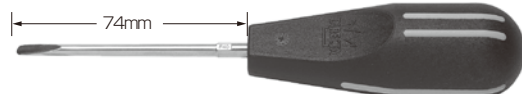

- ハンドルは滑りにくいプラスチック製。(ラクスエーター・プラスと同じハンドル)
- 通常のエレベーターとしてお使いいただけます。
- ラクスエーター・プラスの補完品としてお使いいただけます。

滅菌方法：オートクレーブ、ケミクレーブ
変色することがございますが品質には問題ありません

注意：ラクスエーター・プラスとは製品が異なります。
ラクスエーター・プラスは、通常のエレベーターとしてご利用できません。

医療機器届出番号 13B1X00133000024

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

URL：http://www.crossf.com E-mail：cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所