

ラクスエーター・プラス

これを使うと、通常のエレベーターは使えないです !!!



吉田歯科クリニック

(横浜市港南区)

歯科医師 吉田 健

エレベーター抜歯の基本は、器具の先端をきちんと歯根膜腔に入れることです。

そのためには、抜歯する歯の大きさ、回転力、掛ける方向を考慮して器具を選択する必要があります。

今更ですが、エレベーターは歯根膜腔に器具先端を挿入し拡大させてから、そのスペースの中で根尖側へ進むくさび作用と、回転運動を加えることで歯の動揺を大きくするための器具です。周辺組織のダメージを最小限にする必要があります。

そこで、今回は私が愛用しているラクスエーターについて紹介したいと思います。

ラクスエーターの特徴としては、刃部が薄く、かつ強度があるので歯根膜腔に負担なく挿入でき、また力がうまく伝わることです。ラクスエーターを使用した抜歯の際に注意することとしては、先端を出来る限り歯の形に沿わせるということでしょうか。ラクスエーターは、エレベーターといえど刃部が大変薄いので、歯周靭帯を切断するイメージで動かすので、回転運動は必要ありません。

薄く強靭なラクスエーターは、歯根膜腔にしっかりと入り、チカラを必要とせずには抜歯を行うことができます。そのため、女性の力でも比較的容易に抜歯を行うことができます。

まとめると、特徴としては以下のものがあげられます。

- ・無理のない抜歯
- ・創傷治療
- ・損傷を与えない歯周靭帯の切断
- ・インプラントのための良好な骨組織保全
- ・義歯のための滑らかな歯槽堤
- ・術後の痛みと腫れの軽減
- ・時間の短縮

Products Information

DIRECTA




” スウェーデンの歯科医師によってデザインされた高品質なスウェーデン鋼使用
ラクスエーター・プラス

ラクスエーター・プラスによる抜歯の使用感 *

- ・無理のない抜歯ができる
- ・骨損傷が最小限の歯周靭帯切断ができる

* 当社実施アンケート結果より

【ラクスエーター・プラスの使用方法】

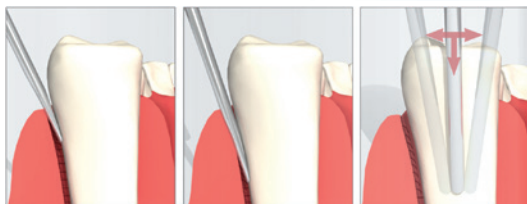

1. 歯の長軸方向に対して真直ぐに挿入します
2. 歯に沿わせて歯槽骨を圧迫しながら歯周靭帯を切り進めていきます
3. 根長の3分の2程度切断していくと楔効果により歯を脱臼できます

商品名 ラクスエーター・プラス

標準価格 (税別)

K4 (スタンダード 4本)	41,000円
4本セット (3C 3S 5C 5S) + シャーピングツール 1本/解説CD-ROM 付き	
SK4 (ショートモデル 4本)	41,000円
4本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャーピングツール 1本/解説CD-ROM 付き	
K7 (スタンダード 7本)	68,000円
7本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャーピングツール 1本/解説CD-ROM 付き	
単品 2S、3C、3S、3CA、3IC、5C、5S、S2S、S3C、S3S、S3CA	12,000円/本
単品 1S、DE3、DE5	13,000円/本
単品 3Sチタン、2Sチタン	15,000円/本
単品 DE3チタン、3Aチタン	16,000円/本
単品 シャーピングツール	2,700円/個

医療機器届出番号 13B1X00133000007