





視覚的に平行を確認しながら安全、確実にシャープニング ゴールドエッジシャープナー

- 視覚的に平行を保てるので安定したシャープニングができる
- 砥石にレジンが編み込んであり、汚れが付着しにくい
- 万が一、本体を落としても割れにくいレジン加工
- シャープニング時に水や油を必要としない
- オートクレーブ対応で、水分を吸収しにくい
- 先端部も本体の右側面にある溝で形態修正できる

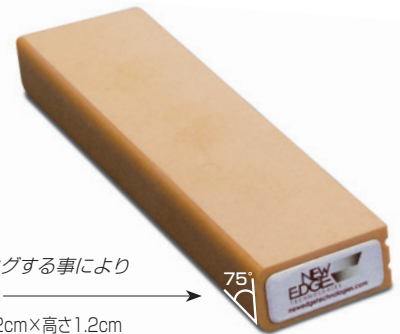

面を75度にカッティングする事により
正確な研磨角度を実現
本体寸法:幅3cm×奥行き9.2cm×高さ1.2cm



側面のシャープニング方法

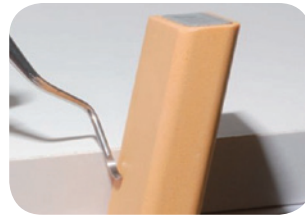

図のようにゴールドエッジシャープナーの上面が平行になるよう保つ。

スケーラーのブレードを水平に固定し、シャープナーの平行を保ちながら軽く短いストロークで上下に動かす。

先端部のシャープニング方法

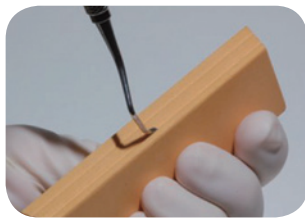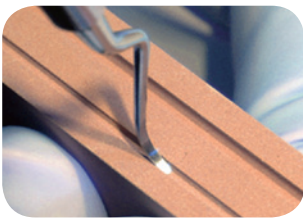

インスツルメントの先端部に対して
適切な大きさの溝に45度の角度であてる。
角度を45度に保ちながら軽く4~5回研ぐ。

商品名 **ゴールドエッジシャープナー**
標準価格 **8,500円** (税別)



ノバミニグレーシー



*11/14 白歯部 近遠心面



*12/13 白歯部 近遠心面



- 長年培ってきた技術がインスツルメントの品質を高めています。
- 製造のどの工程でも、最良の品質を保つためのチェックがされています。
- 仕上げは1本1本職人の手作業で行われています。
- イギリス製の軽くて使いやすいキュレットスケーラー。

1/2 前歯部
3/4 前歯部
5/6 前歯部と小白歯部
7/8 白歯部と頬舌面

11/12 白歯部の近心面
13/14 白歯部の遠心面
* 11/14 白歯部の近遠心面
* 12/13 白歯部の近遠心面

1本で白歯部の近心面・遠心面の両方に使用可能。

商品名 **ノバミニグレーシー** 標準価格 各 **3,800円/本** (税別)

医療機器届出番号13B1X00133000013

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止



販売元: **クロスフィールド株式会社**

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <http://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所

お問い合わせは