

# EZ フィットピロー

患者さんの心地よさを追求したコンフォートピロー

## ユニットのバキュームで治療しやすい形にメイキング


- 患者さんの頭部によく合う形にすることで、口腔内へのより簡便 (EZ) なアクセスが実現
- 首筋から頭部にかけて固定されるので患者さんの頭部が動く恐れが少ない
- レストが保てるので長い治療もストレスを感じにくく、疲れにくい

## 患者さんの満足度 UP


- 自分に合った形のヘッドレストなのでリラックスしてゆっくり治療を受けられる
- 頸椎に問題のある患者さんでも安心



1 本商品を頭部の下に置き、図のように手を添えて形を作ります

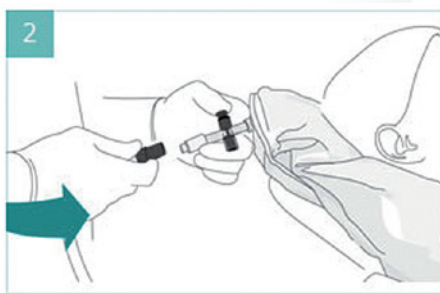

2 バルブを開いて、バキュームと接続し吸引しながら形と硬さを調節します

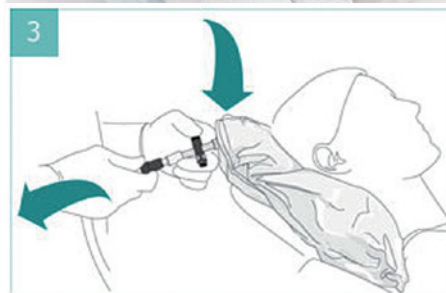

3 患者さんに合った形と硬さでバルブを閉じてバキュームをはずします

EZ フィットピローは、位置付けの困難な患者（脊椎後弯症にみられる背中が曲がった高齢者や身体障害者、身長や座高の低い小児）や診療時に与える頸部圧迫を軽減させたい頸椎損傷のある患者にも使用できる。形態・硬さを変化させることができるクッションの使用により、患者だけではなく術者にとっても無理な診療姿勢を回避することに一役買うのではないかと考える。

ナカエ歯科クリニック（神奈川県葉山町） 院長 前畑香 先生



レストを保てる



商品名 **EZ フィットピロー**  
 標準価格 **35,000 円 (税別)**  
 オプション  
**EZ フィットピローカバー**  
 グレー **2,500 円 (税別)**

47cm



EZ フィットピロー



カバー / グレー