

” ハンドル付きフロス型 コンタクトマーカ― スポット イット

SpotIt®

■ 特徴

- ・クラウンやブリッジ等、補綴物のコンタクトポイントを容易に識別
- ・たて型（ストレート）とよこ型（アングル）の2タイプ
- ・咬合紙不要の高い操作性
- ・短時間で正確にコンタクトポイントの調整が可能

商品名

スポット イット

医療機器届出番号 13B1X00133000057

標準価格 各4,860円（税別）/18個入り @ 270円

たて型 18個入り

よこ型 18個入り

アソート 18個入り（たて型9個 よこ型9個）



たて型




よこ型

*糸の太さは400デニール（約0.1mm）



スポット イットよこ型で臼歯部でも簡単にコンタクト面をマーキング
写真提供：ササマ歯科クリニック（東京都渋谷区）院長 笹間 康弘

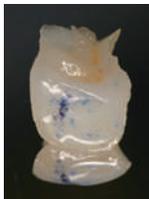

滑沢に研磨されたセラミックでもはっきりとマーキング

” ディスポーザブルの保持器具として スティックンプレイス

STIK-N-PLACE®

■ 特徴

小さくて壊れやすいもの（インレー、オンレー、クラウン、ラミネートベニア、バンド、ブラケット、クラスプ、ポストなど）を確実に保持できます。

商品名

スティックンプレイス

医療機器届出番号 13B1X00133000019

標準価格 各3,000円（税別）/50本 @ 60円

1プレート10本入り×5プレート



【セラミックインレーでの使用例】



模型上のハイブリッドセラミックインレー（B&R 根岸由紀子製作）にスティックンプレイスを押しつけ保持させる



模型から外し口腔内試適



適合を確認してエッチング処理



洗浄後乾燥させシランカップリング処理及びボンディング処理



セメント塗布



余剰セメントの除去



光照射



スティックンプレイスの取外し



セット後

写真提供：ナカ工歯科クリニック（神奈川県葉山町）院長 前畑 香