



MD Guide MD ガイド Mesial Distal Guide

インプラント用イニシャルドリル



近遠心の補綴物を想定しながら簡単に位置を決められます

3 STEP

STEP 1



埋入予定の補綴物の大きさに適したドリルガイドを選択し、近心または遠心にある隣接歯に対し適切になるようにドリルする

STEP 2



2本以上埋入する場合は、イニシャルドリル後に適切なノンドリリングガイドを立てて基準となる隣接歯とする

STEP 3



ノンドリリングガイドに対し、予定部位に適切なドリルガイドでドリルする

STEP④以降は、各インプラントメーカーの使用 방법에従い手術を進める




術前に模型上で使用するMDガイドを決定し、手術のシュミレーションを行うことにより、よりスムーズな手術が行える



MDガイドを実際に使用している様子
中間欠損の症例
隣在歯の歯軸・中心窩等を参考に起始点・埋入角度を決定する



ノンドリリングガイドを用いたポジションの確認

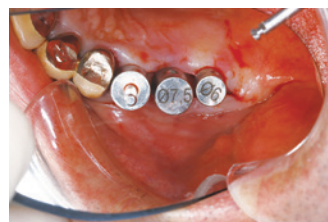

遊離端欠損の症例
ブリッジ形態で補綴予定である場合も便宜的に3カ所ドリリングすることにより、よりシンプルに埋入高形成が行える

MDガイドは4~5歯欠損程度までの比較的シンプルなケースに対してよりスピーディーに正確な位置と角度を決められるというのが特徴である。非常にシンプルな器具であるが、私たちの日々の臨床もよりシンプルにしてくれるツールであると感じた。

記事提供 東京医科歯科大学インプラント外来(東京都文京区) 歯科医師 藤井 政樹

商品名 MD ガイド

MD ガイド イントロキット

キット内容 (単品販売あり)

- ドリルガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)
ドリル径: φ2mm / ドリル長: 8mm
※推奨回転数: 1,200 rpm
- ノンドリリングガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)
- サージカルボックス

各 1 個



価格はこちらから

