



フレキシブル ペリオトーム

曲がる、しなる、 だから折れにくい そして長く使える

フレキシブル ペリオトーム 直 曲がる しなる ステンレススチール製

力が加わると"しなる"ため、折れにくく、長く使用できます。 フレキシブルな先端は歯根膜への挿入を容易にし、診療中のストレスが軽減されます。

● 先端部はブレード、両側面は鋸歯状の構造からなり、 左右にぶれにくい挿入をサポート

商品名 フレキシブル ペリオトーム

医療機器届出番号 : 13B1X00133000054 オートクレーブ対応 (121℃)





■ フレキシブル ペリオトーム 曲 標準価格 20,000 円 / 本 (税込 22,000 円)





■ 抜歯時のマストアイテム

抜歯時の歯頸部周囲の愛護的処置は、その後の処置を優位に進めるために大切なポイントとなる。このことは、抜歯後 同部位がブリッジのポンティックになる場合や、特にインプラントになる場合には、歯肉形態の審美性に影響を与えるため、 十分な配慮が求められる。

歯冠部が崩壊し残根状を呈する歯の抜歯は、抜歯鉗子の掛かる部分が存在しない場合が多い。そのため、歯頸部周囲歯 肉の挫滅や歯頸部周囲骨への過度な損傷を与えることが少なく無い。

歯頸部周囲組織を愛護的に扱いながら、短時間で抜歯を行うためには、歯冠乳頭に損傷を与えることなく、歯根膜腔に 確実に挿入することのできるインスツルメントが求められる。

この目的に適するインスツルメントが「フレキシブル ペリオトーム」である。このフレキシブル ペリオトームは特殊加 工が施されたステンレススチールで造られているため、ほど良くしなる特性を有している。この性状が歯根膜腔への無理 のない挿入を可能にすると同時に、より深部に到達することを可能としている。また、しなることでマレッティング時に 破折が生じる危険性を防ぐ。

さらに「ルート エクストラクター」は根管内に回転させながら挿入する。タップが付与されたネジ状の形状は、歯根を 確実に保持することができ、フレキシブル ペリオトームで亜脱臼した歯根を、歯周周囲組織に侵襲を加えることなく歯根 を引き抜くことができる。



上顎右側側切歯は歯肉縁下で残根状を呈する



術後の処置を考慮し、抜歯は周囲組織の損傷を 探針にて歯周靱帯を切離 必要最低限に抑える必要がある





フレキシブル ペリオトーム 直を、口蓋近心隅角部 に突打し挿入、歯根膜を徐々に拡大する



□蓋側を同様に処置



拡大した歯根膜腔に2本目のフレキシブル ペリオトーム 直を突打し、歯根を動揺させる



ルート エクストラクターを回転させながら 歯軸方向に牽引しながら抜歯を行う 押し込み、歯根を保持する





歯周組織の損傷は僅かであり、出血も少量



良好な歯肉が観察できる



お問い合せは

低侵襲な愛護的抜歯を行う事ができた



良好な術後 14日の口腔内

記事提供:松本歯科大学臨床教授

東京ステーション歯科クリニック(東京都中央区) 院長 小川 洋一

内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止



販売元: クロスフィールド 株式会社

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

製造販売元: 株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060 URL:https://www.crossf.com E-mail:cf@yoshida-net.co.jp