



Geko Tweezers®

ワム ゲコ ツイーザー


セルフロック式の安全で簡単な多目的ツイーザー



ワム ゲコ ツイーザー

オリジナル


- ツイーザーが補綴物を把持しているので、強く握り続ける必要がなく疲れにくい。
- 補綴物が落ちる心配がほとんどない。

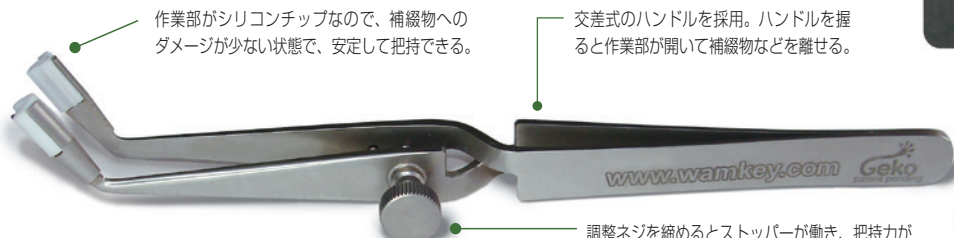


作業部がシリコンチップなので、補綴物へのダメージが少ない状態で、安定して把持できる。

交差式のハンドルを採用。ハンドルを握ると作業部が開いて補綴物などを離せる。

調整ネジを締めるとストッパーが働き、把持力が弱まるので補綴物へのダメージを少なくできる。
(調整ネジを外しても使用できる)

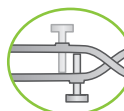

調整ネジはどちら側でも使用できる。

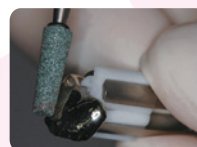

グローブを巻き込むことも、指先が熱くなることもなく、インレー、クラウンなどの金属の削合、研磨が行える



セラミックアバットメントを把持したままドライバでねじを固定する(ワムゲコペースト併用可)

商品名 **ワム ゲコ ツイーザー オリジナル**

標準価格 **35,000 円** (税込 38,500 円)

ワム ゲコ シリコンチップ

標準価格 5,500 円 (税込 6,050 円) / 袋 (20 入)

ワムゲコペースト

標準価格 5,500 円 (税込 6,050 円) / 個 (5 ml)

ワム ゲコ ツイーザー

クラシック

- セルフロック式の安全で簡便な把持及び試適が可能。

例：クラウン、コットン、ポストなど



Classic Tweezers®

商品名

ワム ゲコ ツイーザー クラシック

標準価格 **4,500 円** (税込 4,950 円)

先端部溝入り



人工歯、補綴物等



圧排糸



コットン



ポストコア、インレー等

ワム ゲコ ツイーザー

エンド

- 小さくて握みにくい物も用途に合わせた使い方で把持が可能。
- ツイーザー先端部の内面に溝が3つ形成されているので、大きさ、角度などを変えて把持が可能。

例：ガッタパーチャポイント、ファイバーポスト、ペーパーポイントなど




Endo Tweezers®

商品名

ワムゲコツイーザー エンド

標準価格 **4,500 円** (税込 4,950 円)

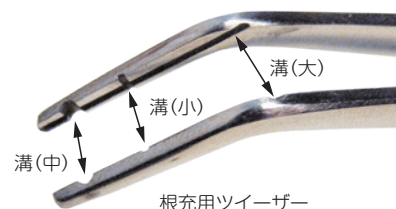

根充用ツイーザー



ガッタパーチャ



ペーパーポイント



スクリューポスト



ポスト



ワムキー クラウンリムーバー


早くて簡単な

クラウンリムーバー




WAMkey

ワムキー クラウンリムーバー

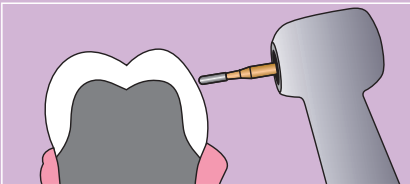


カーバイドバーでクラウンに穴を開ける

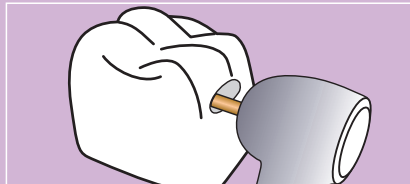



ワムキー クラウンリムーバー No.1 を穴に入れる



ワムキー クラウンリムーバー No.1 をひねりクラウン除去する

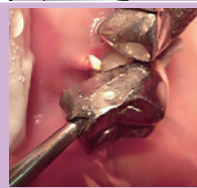

クラウン除去完了

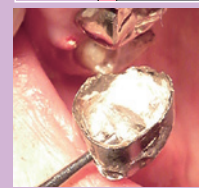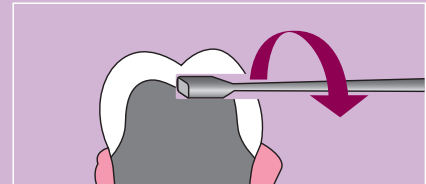

除去後のクラウン 開けた穴以外の形状が変わっていない



クラウン除去後の状態

ワムキークラウンリムーバーは以下の事例で非常に有効です。

- クラウンの中を確認して治療方法を確定したい時に効果的です
- ブリッジの除去においてはクラウンを分割する必要はありません

注意！

- 絶対に持ち上げる動きはしないでください

器具やプレパレーションにダメージを与えることがあるので上下に動かさないでください。必ずワムキークラウンリムーバー No.1 から始めるようにしてください。ワムキークラウンリムーバー No.2 や No.3 から始めてしまうと、持ち上げる動きをしてしまいます。



ワムキークラウンリムーバーにより短時間かつ容易にクラウンやブリッジを除去できるようになり、日常臨床が大きく変わった。
上記に再根管治療のため除去が必要となったブリッジを示す。



カーバイドバーによりワムキークラウンリムーバーの先端が挿入できるように、クラウンと支台歯の間にスペースをつくる。従来の除去法のようにカーバイドバーによるクラウンにスリットを入れたり、ブリッジを切断する必要がないため、バーの消耗も最小限となる。



ワムキークラウンリムーバーNo.1を挿入し、指先の力だけでそっと回転させる。ブリッジの場合はそれぞれ支台歯に対して同様の操作を行う。さらに支台歯への力の負担は他の除去法よりも少ないため、強い打診痛が認められた本症例でも無麻酔科の処置が可能となった。



支台歯への侵襲はほとんど認められない。除去したブリッジへの侵襲も少ないため、即時重合レジンやコンボジットレジンを用いればそのままリテーナーとしても応用できる。



このようにワムキークラウンリムーバーにより、クラウンの除去時間が短縮されるだけでなく、その場で容易にメタルTEKの作製が可能となり、チェアタイムを効率的に利用できる。すなわち本製品は患者はもちろんのこと術者にとっても有用であり、これにより筆者の臨床が大きく変わったと実感している。

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

記事提供 ばんだ歯科(愛知県北名古屋市) 院長 須崎 明

商品名 ワム キー クラウンリムーバー

セット

標準価格55,000 円 (税込 60,500 円)

ワム キー クラウンリムーバー No.1

ワム キー クラウンリムーバー No.2

ワム キー クラウンリムーバー No.3、各 1 本、計 3 本

各 1 本


標準価格 22,000 円 (税込 24,200 円)

ワム キー クラウンリムーバー No.1

ワム キー クラウンリムーバー No.2

ワム キー クラウンリムーバー No.3

ワム キー クラウンリムーバー
全長 145.5mm

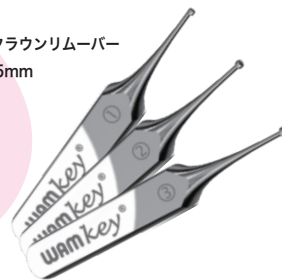

WAMkey



左からワム キー クラウンリムーバー No.1、No.2、No.3 の先端部の拡大図

長くご使用いただくために、絶対にグリップを握って上下に動かさないで下さい。曲がる原因になります。

医療機器届出番号 13B1X00133000032

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド 株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所