

# プロフィーペーストPro HAp

予防歯科先進国スウェーデン発 世界 50 か国以上で使用されている  
PMTC ペーストのロングセラー「プロフィーペーストPro」シリーズ  
**ナノ粒子ハイドロキシアパタイト HAp 含有タイプ**

## ● ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有

PMTC 後もなめらかでツヤのある歯を保ちます


## ● RDA 197-50 ワンステップでケアタイムの短縮

- ・ 1本でスクレーリングの一次、二次研磨、汚れ除去・つや出しまで可能
- ・ 忙しい診療時に便利
- ・ ミント味

## ● シリカ含有

- ・ 粒度：100-7 $\mu$ m

## ● フッ素無配合

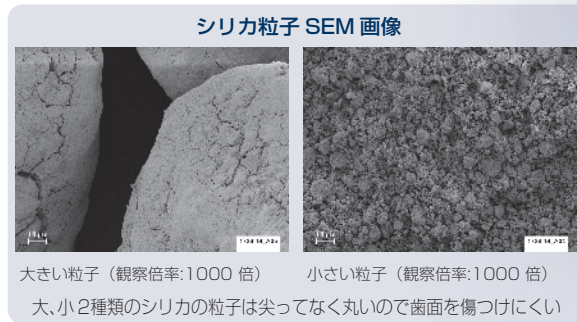

商品名 **プロフィーペーストPro HAp** ハップ  
チューブタイプ(60g)  
標準価格 **4,600 円** (税込 5,060 円) / 本  
販売名：プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号13B1X00133000027



スウェーデンデンタルセンター  
(東京都千代田区)  
歯科衛生士  
加藤 典



露出した根面にも使え  
かつ光沢のある歯面が作れる



プレミアムデンタルケア  
恵比寿・代官山  
(東京都渋谷区)  
歯科衛生士  
片山 章子



エアーポリッシングと組み合わせて使用  
クリーニングの仕上げや軽度ステイン除去を補う  
パウダーとペーストの併用で  
ブローケアのクオリティーを上げる



アド・クロレ 代表  
歯科衛生士  
工藤 彩加



クリーニングの最終工程として  
ハイドロキシアパタイト入りペースト剤で  
歯面をなめらかに仕上げる目的として使用



アップルデンタルセンター  
(東京都西東京市)  
歯科衛生士  
花岡 佑み子



シリカは粒子が丸く  
インプラント上部構造を傷つけにくいので  
インプラントが入っている方でも安心

| 適用例         | ブルー<br>(RDA 250) | グリーン<br>(RDA 170) | レッド<br>(RDA 120) | イエロー<br>(RDA 40) | パープル<br>(RDA 197-50) | HAp<br>(RDA 197-50) |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 強固な着色除去     | ●                |                   |                  |                  |                      |                     |
| 厚いプラーク除去    | ●                | ●                 |                  |                  |                      |                     |
| 一次研磨        | ●                | ●                 |                  |                  | ●                    | ●                   |
| 着色除去        |                  | ●                 |                  |                  | ●                    | ●                   |
| 充填物の研磨      |                  |                   | ●                |                  | ●                    | ●                   |
| 軽度の着色除去     |                  |                   | ●                |                  | ●                    | ●                   |
| 薄いプラーク除去    |                  |                   | ●                |                  | ●                    | ●                   |
| 根面の研磨       |                  |                   | ●                |                  | ●                    | ●                   |
| エアーポリッシング後  |                  |                   | ●                | ●                | ●                    | ●                   |
| 最終研磨 / つや出し |                  |                   | ●                | ●                | ●                    | ●                   |
| インプラント      |                  |                   | ●                | ●                | ●                    | ●                   |
| 小児          |                  |                   |                  | ●                | ●                    | ●                   |
| 摩耗した歯面      |                  |                   |                  | ●                | ●                    | ●                   |



株式会社  
Tomorow Link  
代表取締役  
歯科衛生士  
濱田 智恵子



施術の際に見落とされるのはペーストの量常にカップ内がペーストで満たされている状態で行う  
プロフィーペースト Pro HAp やパープルはワンステップタイプのため最初にヘビープラークや薄いステインの付着部位に当てその後全体に当てるよう使用している



ミラクルDH代表 /  
いとひや歯科クリニック  
(東京都品川区)  
歯科衛生士  
沢口 由美子



どの色のペーストを使う場合でもコントラの回転数は低速で行う (目安: 500 ~ 1,000 回転)  
Directa 社のプロフィーカップ Pro ラバーカップは外側がでこぼこしているためポリッシングの際に隣接歯も研磨できる

### 商品名 プロフィーペーストPro

販売名: プロフィーペーストPro  
医療機器届出番号 13B1X00133000027

#### ● チューブタイプ



ブルー グリーン レッド イエロー パープル

#### ● チューブタイプ (60ml)

| 各1本               | 標準価格              | アソート4本                                |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ブルー、グリーン、レッド、イエロー | 3,900円 (税込4,290円) | ブルー、グリーン、レッド、イエロー 15,200円 (税込16,720円) |
| パープル              | 4,600円 (税込5,060円) |                                       |

#### ● カップタイプ



衛生面を重視した単回包装  
・訪問歯科に  
・院内感染対策に


グローブ等に固定できる  
粘着テープ付

#### ● 単回使用 2g カップタイプ 144個/箱

| 各1箱               | 標準価格                |
|-------------------|---------------------|
| ブルー、グリーン、レッド、イエロー | 16,000円 (税込17,600円) |
| パープル              | 21,000円 (税込23,100円) |

### 商品名 プロフィーカップ Pro (ラバーカップ)

販売名: プロフィーカップ Pro  
医療機器届出番号 13B1X00133000053

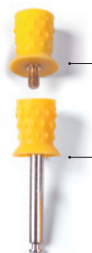

スクリュタイプ 標準価格 12,000円 (税込13,200円)  
144個/箱 @68円

ラッチタイプ 標準価格 12,000円 (税込13,200円)  
144個/箱 @68円

@00円はそれぞれの商品単価を表しますが、単品販売は行っていません

### 商品名 クロスプロ (プロフィーコントラハンドピース)

販売名: クロスプロ  
医療機器認証番号 20900BZZ00015A01



ギア比 5:1 (1/5 減速)

標準価格 51,000円 (税込56,100円)

入力側最高回転速度: 40,000min<sup>-1</sup>(rpm)  
PMTc 用 スクリュー式

クロスプロ 40HZ ヘッド単体 (ラッチ式)  
標準価格 27,000円 (税込29,700円)

ラッチタイプのブラシやカップを使用する時に簡単に交換できます

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元: クロスフィールド 株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
URL: <https://www.crossf.com> E-mail: [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)  
製造販売元: 株式会社吉田製作所



お問い合わせは