




商品名 デンタルクリーナー

本体サイズ：Φ90mm×85mm

持ち運べる
携帯ケース付き

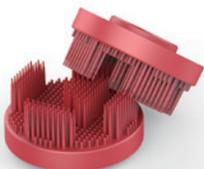

商品名 デンタルクリーナー交換用ブラシ (2個セット)

本体サイズ：Φ75mm×40mm



商品名 デンタル携帯用ケース


本体サイズ：83mm×88mm×33mm



Dr Mark's
HyGenie



From Australia

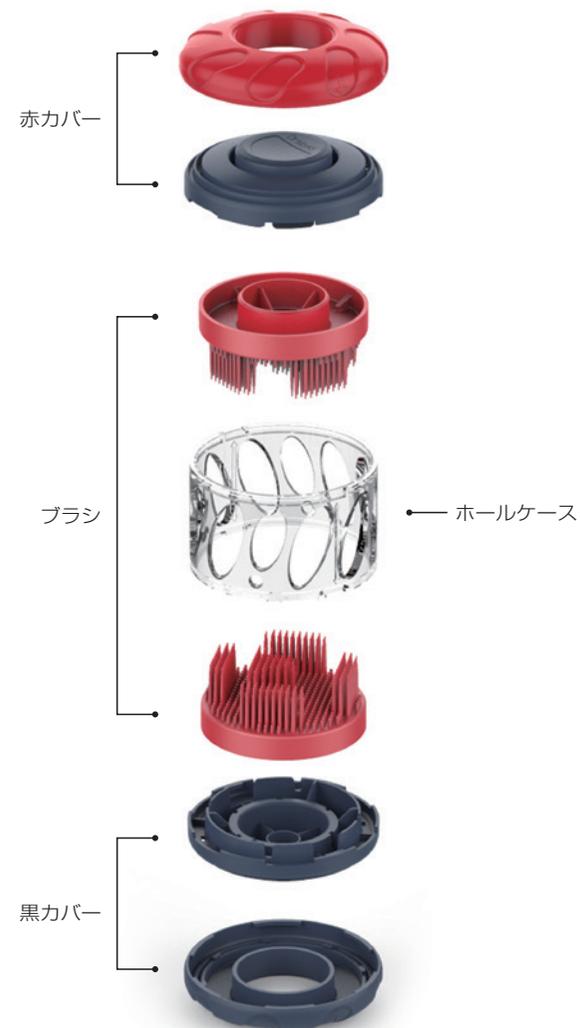

記載されている価格に消費税は含まれません。
また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp


輸入元：株式会社吉田製作所

お問い合わせは

デンタルクリーナー

1 開け方

赤と黒カバー部分を両手でしっかり把持してください。
カバー部分を回転させて、ホールケース間にある「↑」と矢印が合わさった位置で、「カチッ」とロックが外れる音がしたら、ケースからカバーを取り外してください。

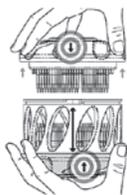


2 装着

図のようにナイトガードやマウスピースなどを1つまたは2つセットします。
(対応幅<65mm)




3 閉め方

ホールケース間にある「↓」と、1で取り外した赤または黒カバーにある「↑↓」が図のように重なるように合わせてください。その後、軽く回転するとカバーはロックされます。

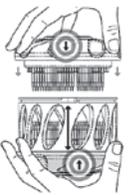

4 洗う

ホールケース内に、ある程度均一に広がるように、ジェルタイプの歯磨き剤を2〜3滴たらし、軽く水を加えます。

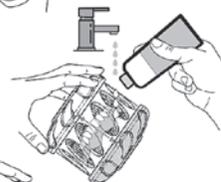


5 磨く

赤と黒カバー部分をしっかり持ち、左右逆回転（45度ぐらいの回転）させてください。30〜45秒を目安に磨きます。




6 すすぐ

ホールケースに水をしっかり入れながら、同様に左右逆回転して、すすいでください。泡がなくなったら、1と同様に開けてください。

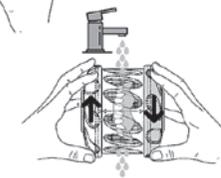

7 装着、保管、携帯

もし、泡が残っていたら、開けた状態で軽くすすいでください。その後、口腔内に装着してご使用ください。使用しない場合は、カバーを閉じて保管してください。デンタルクリーナーのケースは衝撃にも強いので、安全に保管や携帯ができます。

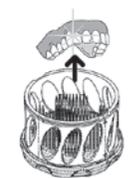

メインテナンスと交換


メインテナンスは、何も設置していない状態で、月に一回ほど洗浄剤や歯磨き剤などを上記同様の手順で流し込み、軽く回転させてすすぎます。
ブラシは半年に1回のペースで、デンタルクリーナー交換用ブラシと交換してください。
交換方法は、ブラシをしっかりと掴み本体から剥がした後、それぞれのカバーにある「↑」と新しいブラシの「▲」の位置が合わさるように、差し込むだけの簡単な作業です。

ナイトガードやマウスピースなどさまざまな歯科関連のアイテムをクリーニング可能。（対応幅<65mm）

全体を一度に簡単ブラッシングできる形状に加え、細かなところもケアできるテーパードのブラシは、どなたが使用しても一定のブラッシング効果を発揮。手に馴染みややすいエルゴノミックデザイン。



Dr Mark's
HyGenie

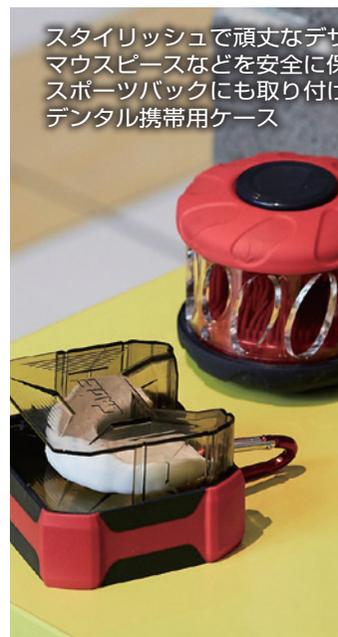

併用におすすめ



Made in Switzerland

Naturheilpraktiker（自然療法士）がいるスイスを代表する
歯磨き剤、創業 70 年の製薬会社 Dr.Wild が誇る
ティーツリー * 配合の自然派オーラルケア

ティーツリーの新鮮な葉の部分だけを蒸留して捕集し、原料の重量に対し、たった 1〜2% だけしか取ることができないと言われているティーツリー * を約 2% も含んだ歯磨剤がティーボドントです。

* ティーツリー葉水（香味剤）



ジェル タイプ

商品名
ティーボドント ジェル (18ml)