

Dental World

cf CrossField

クロスフィールド商品情報誌
デンタルワールド
www.crossf.com

37
2021 秋号

高性能で着用感がよく、繰り返し洗えてストレスなく使用できる

アベビータプロテクトマスク 2.0

日本小児歯科学会専門医・キャビネ・ラビヌー（千葉県浦安市）日本小児歯科学会認定歯科衛生士 中野 真弥・・・P1

アベビータプロテクトマスク 2.0 広告・・・P1

エコフレンドリー 新感覚の布マスク

アベビータプロテクトマスク 2.0

はら歯科クリニック（兵庫県宝塚市）歯科衛生士 星野 夕海・・・P2

立体ポケット付き患者エプロンの有効性について

出張歯科四つ木（東京都葛飾区）歯科医師 池川 裕子・・・P3

今後必要になる新しい感染対策 - 術者保護エプロン

医療法人社団 福田歯科医院（北海道函館市）歯科衛生士 西山 まどか・・・P4

“ふわふわな感触”の TePe 歯間ブラシとの出会い

徳重ガーデン歯科（愛知県名古屋市中区）日本歯周病学会認定歯科衛生士 西尾 いづみ・・・P5

嫌がったら変えてみよう ～子ども用歯ブラシの選び方～

株式会社 Himmel 代表取締役 田上 めぐみ・・・P6

患者さんの満足度が上がる、

歯科衛生士による正しい歯ブラシの処方

医療法人真摯会 まつもと歯科（大阪府吹田市）歯科衛生士 坂上 明美・・・P7

TePe GOOD シリーズ 広告・・・P8

TePe 広告・・・P9,10

オーラルアプライアンスの新しい清掃と管理方法

「デンタルクリーナーを用いた口腔衛生管理をはじめよう！」

大手前短期大学 歯科衛生学科（兵庫県西宮市）助教 白水 雅子・・・P11

健口から全身の健康へ導くために

患者様への口腔の状態に応じたオーラルケアのご提案

DH HIYOKO CLUB 代表 歯科衛生士 堤内 久枝・・・P12

驚愕！エルゴフィンガーの素晴らしさ

食わず嫌いはもたないアイテム

歯美人 DIARY 代表 たかぎ歯科医院（愛知県名古屋市中区）歯科衛生士 高木 佐知子・・・P13

すごいシャープニングストーンと出会ってしまったゴールドエッジシャープナー

寺嶋歯科医院（大阪府箕面市）歯科衛生士 菊地 直子・・・P14

ゴールドエッジシャープナー 広告・・・P14

ラクスエーター・プラス P シリーズを使用してみました！

ファミリア歯科（神奈川県横浜市）歯科医師・医学博士 星野 大地・・・P15

1本は持つべき挺子ラクスエーター・プラス P シリーズ

神奈川歯科大学特任講師・ナカエ歯科クリニック（神奈川県三浦郡）院長 前畑 香・・・P16

ラクスエーター・プラス（P シリーズ） 広告・・・P16

顕微鏡治療をサポートする機器 3点のご紹介

CT&米国式根幹治療センター（神奈川県大和市）院長 寺内 吉継・・・P17

ワムキークラウンリムーバー 広告・・・P17

時短、負担軽減、患者さんにも優しいプレデターターボを使用して

まさみデンタルクリニック（東京都中野区）院長 西村 正美・・・P18

プレデターターボ 広告・・・P18

プレデタージルコニア/プリマカーバイドバー/プリマミラー/KAI コーティング替刃メス 広告・・・P19

ラクスエーター・プラス/ラクスエーター・フォルテ/フェンダーメイト/フェンダーウェッジ・プロ

ハイゴフォーミック/プロフィーペースト Pro 広告・・・P20

ケアシールド/ORO サージカルガウン（シート付）/ORO アイソレーションガウン

ORO ヘッド & ヘッドレストカバー/CF アイソレーションガウン/CF ヘッドレストカバー 広告・・・P21

術者保護エプロン/立体ポケット付患者エプロン/Bio エプロン/デンタルクリーナー/エルゴフィンガー/ティーボドント 広告・・・P22

ポスター・POP カード・待合室動画のご案内 広告・・・P23



高性能で着用感がよく、繰り返し洗えてストレスなく使用できるアベビータプロテクトマスク 2.0

術者である私たちが診療において感染しないためにも
高性能なマスクが必要です。

キャビネ・ラピヌー
(千葉県浦安市)
日本小児歯科学会認定歯科衛生士
中野 真弥



コロナウイルスに脅かされる世の中で、感染対策としてマスクをすることは必須となっています。歯科では患者さんがマスクを外して診療をせざるを得なく、また口腔内で歯の切削やクリーニングをする際エアロゾルを生み出してしまいます。術者である私たちが診療において感染しないためにも高性能なマスクが必要です。

高性能なマスクとしては N95 マスクがありますがコロナ禍の現在では、入手も簡単ではありません。また、N95 マスクの難点として、なかには呼吸するのがとても苦しいもの、顔にフィットせず隙間ができてしまうもの、耳の紐がキツすぎて顔に密着するが目の下や鼻の頭が真っ赤になる程食い込んでしまうものなどがあり、長時間使用するには辛いと感じることもありました。使い捨てが前提で作られているので、

滅菌することで独特な匂いを発したり、水洗いすると効能が落ち繊維が毛羽立ったりと、快適に使用することを難しく感じていました。

そんな中、このアベビータプロテクトマスク 2.0 を使用し、まず驚いたのが 0.3 ミクロン粒子を 95% 防ぐ N95 マスクの効果のさらに上をいく 0.1 ミクロン粒子を 99% 防ぐという性能でした。着けた感触は、肌に触れる布が 100% 天然コットンのため柔らかく、サラサラとしており、肌にも優しいです。耳の紐は各自調節できるようアジャスターが付いており、子供から大人までそれぞれの顔の大きさに合わせて使用することができます。紐も太めで耳の裏が痛くなりません。布製でありながら鼻にフィットさせるためのワイヤーも入っているため、顔へのフィット感があり、マスクの隙間

から息が漏れることもありませんし、呼吸もしやすいです。

そしてこれまで使用してきた N95 マスクとの最大の相違点は洗って繰り返し使用できることです。手洗いで洗っているスタッフ、洗濯機でネットに入れて洗っているスタッフといいますが、布地も毛羽立たず、ほとんど色あせることもなく快適に使用しています。週に 1～2 度、20 回洗って使用できるのでコスト面でも悪くありません。また、デザイン性もあり 5 色から選べるので気分も上がります。

まだまだコロナウイルスの感染対策が必要な中、これほど高性能で着用感がよく、また繰り返し洗えて、ストレスなく使用できるアベビータプロテクトマスク 2.0 は診療の上で必要不可欠なのではないでしょうか。



子供から大人まで顔の大きさに合わせて使用できる



診療風景



上の段が未使用品、下の段が各スタッフが 10 回程度洗濯して使用しているもの

Products Information

アベビータプロテクトマスク 2.0

デザイン性の高い洗えるプロテクトマスク

医療従事者から一般の方まで幅広く使える
スイスでクラス I 医療機器^{※1}

※1 届出 CH-202004-0041

■ 4 層構造

花粉
PM2.5~0.1
菌
ウイルス



99%抗ウイルス^{※2}

99%抗菌^{※3}

99%フィルター性能^{※4}

0.1 ミクロン (0.0001mm)

粒子まで捕集^{※5}

※2 ANTIVIRAL ACTIVITY TEST ISO 18184

※3 ANTIBACTERIAL TEST ISO 20743

※4 FILTER EFFICIENCY / RESPIRATORY RESISTANCE

ISO 2926-2008

※5 BFE TEST EN 14883

幅広いノーズクリップ調整

鼻周りをフィットさせると

メガネなど曇りにくくなります

・広げ過ぎないでください

洗えて繰り返し使える

・気候や使用頻度にもよりますが、

週に 1～2 回洗うことをお勧めします。

独自の抗菌性により、使用毎に洗う必要はありません

・20 回洗ったら交換してください

(手洗い、またはネットに入れて洗濯機)

口回りに空間があり呼吸が苦しくない

・運動には適していません

吸気抵抗 130 Pa 呼気抵抗 103 Pa

子供から大人まで簡単にフィット調整できるイヤーラフ

内側は肌にやさしい 100%天然コットン

ポリプロピレン/フッ素樹脂ナノフィルター

薄い機能素材で熱がこもりにくい

商品名

アベビータプロテクトマスク 2.0 1 枚入

ピンク/ライトブルー/ホワイト/グレー/ブラック

患者様ご説明用の価格記載が無いカタログはこちらの QR コードからダウンロードできます

ピンク ブルー ホワイト グレー ブラック

QRコード

エコフレンドリー 新感覚の布マスク アベビータプロテクトマスク 2.0

5色展開のナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインは普段のカジュアルな場面にはもちろん、院内で白衣やスクラブに合わせても非常にマッチします。

はら歯科クリニック
(兵庫県宝塚市)
歯科衛生士 星野 夕海



この記事をご覧の皆さんは、普段布マスクを使用されていますか？
新型コロナウイルスが流行し不織布マスクが手に入りづらく価格が高騰した頃から、市販や手作りの布製のマスクを使用している方が多く見られるようになりました。しかし、布マスクは一般的に見た目やコストパフォーマンス重視のイメージがあり、フィルター性能に疑問が残ります。また、密閉感のなさから避けている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

そこでおすすめしたいのが『アベビータプロテクトマスク 2.0』です。
クロスフィールド社の方に院内セミナーで商品説明をしてもらった際にお話をうかがい、布マスクの常識を覆す性能の高さと使用感の良さから、「ぜひうちの物販で取り扱いたい！」と即決した商品です。

まず従来の布マスクとの決定的な違いは、高い撥水性と4層の高性能フィルターが備わっていることです。そして抗菌・抗ウイルス性。スイスではクラス I 医療機器にも登録されている医療用布マスクです。

布マスクには珍しいノーズワイヤー入りで顔にフィットするのでメガネも曇る事なく使用できます。
また、生地に立体感と張りがあり、口元には空間があくので会話の際も張り付きや息苦しさを感ずることがありません。
また、イヤーループにより調節可能な作りでどんな方にもピッタリ快適にご使用いただけます。“大柄なので市販の不織布マスクは小さくて耳が痛くなる。”とおっしゃっていた男性の患者様から、お子様やお顔が小さい方まで、幅広くお使いいただいています。

そして、私が特にお伝えしたいのが肌触りのよさです。
私は、新型コロナウイルス流行で院外でも常にマスクをするようになってから、摩擦によるかゆみや乾燥、肌荒れを起こすことが多くなっていました。アベビータプロテクトマスク 2.0 は内側に 100%天然コットンを使っているため肌触りがとてもよく、通勤時のマスクをこちらに代えてからマスクによる肌荒れに悩むこともなくなりました。


もちろん他の布マスクと同様に洗って繰り返し使用できます。また、抗菌性があるので使用ごとに洗う必要がない点や、ネットに入れて洗濯機で利用できる点も便利で患者様に好評です。

5色展開のナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインは普段のカジュアルな場面にはもちろん、院内で白衣やスクラブに合わせても非常にマッチします。当院では受付スタッフが業務中着用しています。グレーやホワイトならスーツ等のビジネスライクな服装にも馴染みそうですね。

どの医院様でも、また通われる患者様も、様々な感染予防策を講じられていると思いますが、それでもこのコロナ禍で外に出る不安や医療機関で働く不安はなかなか拭えないものです。
そこで、この“歯科医院で買える高性能布マスク - アベビータプロテクトマスク 2.0” は是非、スタッフ様にも通われる患者さんにもお勧めしたいと思います。



スタッフで好みの色のマスクをつけています

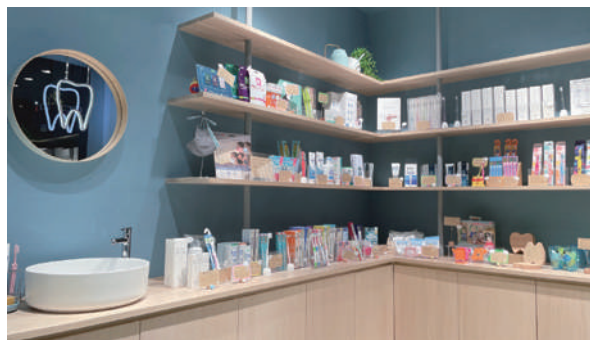

当医院の物販コーナー



院内ディスプレイ

..... Products Information

AVEVITA
SANKOM® SWITZERLAND

バルブ付新登場

アベビータプロテクトマスク 2.0 バルブ付

フィット感と口回りの空間が快適
息がこもりにくいバルブタイプ



ホワイトとブラックの2色展開

目立ちにくいバルブ

商品名

アベビータプロテクトマスク 2.0 バルブ付 1枚入
ホワイト/ブラック

立体ポケット付患者エプロンの有効性について

当院は訪問歯科を主に行っております。

訪問歯科診療の際に患者さんにエプロンを使用しますが

その際紙一枚タイプのエプロンを使用することが多いと思います。

出張歯科四つ木
(東京都葛飾区)

歯科医師 池川 裕子



脳梗塞の麻痺などによる口唇閉鎖不全等の全身状態によっては、口角から唾液が垂れ続けてしまう方がいらっしゃいます。また、患者さんの中には口腔清掃状態が悪く、口腔内からの出血が多い方もいらっしゃいます。そして、その出血混じりの唾液を口腔内で溜めることができず、口から溢れ出てしまうこともしばしばあります。

また、このような方はお食事の際にも、口に入れたお食事が漏れてきてしまうことや、お食事をお口に運ぶまでにこぼしてしまうことも多くあります。

この立体ポケット付患者エプロンは下のポケットがそれらにある程度キャッチすることができるので、洋服や床を汚す可能性が少なくなります。実際に使用してみると、訪問歯科で遭遇するそのような様々なケースで有用だと感じました。(写真 1,2)

このエプロンの特徴としては

- ・ 表面は吸水性のよい材質
- ・ 裏面は防水性の高いポリエチレン
- ・ 両肩に両面テープでつける形
- ・ 食事の際のエプロンとしても使用することができる
- ・ 感染予防対策になる
- ・ 使い捨て

等があげられます。

次にエプロンの吸水性についてです。

今回は確認するために、コップの水をエプロンにかけています。表面はしっかりと水分を吸収しています。表面で吸収した水分がエプロンの内側に染みてしまっは意味がありませんが、確認したところ裏側はポリエチレンになっているため、全く水を通していませんでした。

(写真 3,4)

エプロンを外す際は肩の部分の両面テープが外しやすいように対策されています。

そこからひっぱって外すと簡単に取ることができます。

そして、ポリエチレン加工になっているエプロンの裏面から表側をくるめば、汚染された面をしっかりと包むことができます。

色々なタイプの患者さん用エプロンがありますが、このようなタイプのエプロンは少ないと思います。

是非一度、皆様もお試しになることをお勧めいたします。

写真と共に実際の使用例をご紹介します



写真 1. 両面テープで留めるためエプロンが動かず安定する



写真 2. エプロンの長さがあり、ポケットもあるため広範囲でせき止めることができる

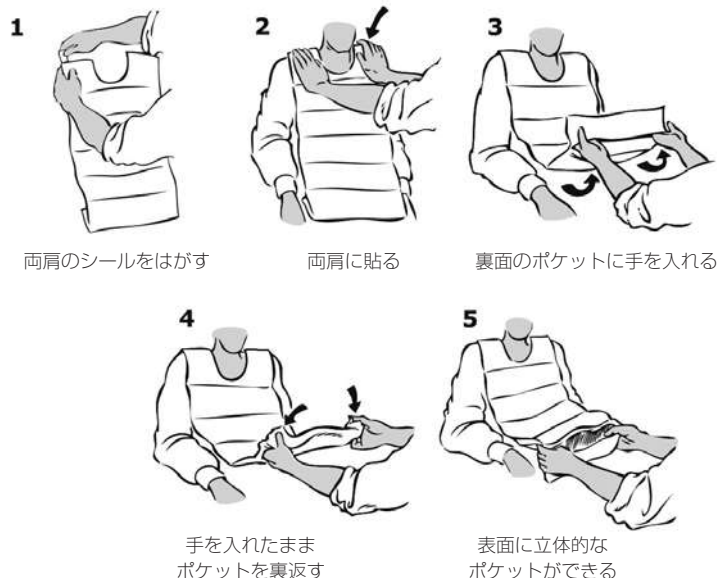


写真 3. 表面でしっかり水分を吸収



写真 4. ポケットに水が溜まる

立体ポケット付患者エプロンの使い方



両肩のシールをはがす

両肩に貼る

裏面のポケットに手を入れる

手を入れたままポケットを裏返す

表面に立体的なポケットができる

今後必要になる新しい感染対策 - 術者保護エプロン

「患者さんにエプロンを装着する」から
「患者、術者共にエプロンを装着し診療を行う」へ。

医療法人社団 福田歯科医院
(北海道函館市)
歯科衛生士 西山 まどか



COVID-19により歯科診療のガイドラインが見直され日常の臨床で当たり前のように繰り返される手洗い、消毒やエアロゾル対策を再度見直し、理解しながら診療に向き合ってきました。
私も、緊急事態宣言下では、ガウンやゴーグル、フェイスシールド等を着用していた歯科医療従事者の一人です。

緊急事態宣言が解除された頃に、クロスフィールド社から“術者保護エプロン”発売のお知らせが届きました。それは、2年前クロスフィールド社で開催された北欧研修ツアーにて見学したスウェーデンの歯科医院の診療で実際に使用されていたエプロンでした。
すぐに先生にこの術者保護エプロンの導入を提案したところ、快く院内に導入していただきました。

これは、まさに患者・術者のための術者保護エプロンだと私は思います。

～術者保護エプロンを愛用する5つの理由～

① ディスポーザブルで衛生的に GOOD!

術者が装着し、患者さんごとに交換できるのは衛生的であり、簡易保護にも効果的と考えます。

② テープで固定のため、着脱が簡単

当院では、肩とウエストで留めて使用する3点テープ留めタイプのエプロンを使用しています。テープで貼るだけのため着脱が容易で、診療によりエプロンがずれる心配もなく診療に集中できます。

③ エアロゾルやペースト、切削粉から白衣を守る

研磨ペーストの付着や、次亜塩素酸による白衣の脱色など、日常の臨床で白衣が汚れてしまうケースが多々あります。またドクターの場合、口腔外バキュームを使用している、外科処置やプロビジョナルの調整時の切削粉にて白衣が汚れてしまうシーンがあるかと思います。術者エプロンでは、それらから白衣を守ることができるのではないかと

思います。また裏はビニール素材のため、エプロンから白衣へ汚れが滲み出る心配も少ないです。

④ 手から肘まで洗うことが可能

ガウンは長袖のため全身を保護できるメリットがあり、一方術者エプロンには袖がないことがメリットでもあります。袖がないため、手指から肘までをしっかり洗い、消毒することができます。

⑤ 白衣から患者さんへの感染対策

診療時、患者さんの顔が白衣に近い、白衣についたエアロゾルが患者さんに付着することも考えられますが、このエプロンを装着することでそのような感染を防ぐことができると思います。また患者さんの立場になったときに、術者もエプロンをしていることで、感染対策をしっかりとっていると思っていただければ、安心してくださるのではないかと思います。

～術者保護エプロンに出会って～

感染対策から使用を始めた術者保護エプロンですが、私はこのエプロンをつけると背筋がピンと伸びる気がします。スウェーデンで歯科医療従事者である仲間たちが使用し、生き生きと働いている姿を目の当たりにしたからかもしれません。

今後もこの術者保護エプロンを使用し、歯科医院に来てくださる患者さんの健康のパートナーとして向き合っていきたいと思います。

最後に、このように海外で使用されている使い勝手の良い器具、機材を輸入し販売して下さるクロスフィールド社の皆様、そして日々私を支えてくれている家族、勤務先の先生やチームの皆さまに感謝申し上げます。



写真1. 2019年の北欧研修時。スウェーデンの歯科医院にて歯科衛生士がエプロンを使用しています。



写真2. 日々の診療にて、同じエプロンを使用しています。



写真3. 十分な長さのあるエプロンなので、白衣が患者さんの頭部に直接触れるのを防ぐことができます。



術者保護エプロン
3点シール留タイプ ブルー

“ふわふわな感触” の TePe 歯間ブラシとの出会い

歯間ブラシは、日々臨床で行っている OHI（口腔衛生指導）において、なくてはならないツールの一つです。患者さんが健康になるために、そしてその健康維持のために、的確なツールを選択することは重要な仕事です。

徳重ガーデン歯科
（愛知県名古屋市）
日本歯周病学会認定歯科衛生士
西尾 いづみ



これまで納得のいく歯周治療が受けられず色々検索されていた際に、当院のホームページをご覧になり来院された患者さんとのエピソードをご紹介します。院長からの指示で担当となった私は、ゆっくり時間をかけカウンセリング・検査をし、その患者さんに適したセルフケアグッズを模索しました。その患者さんのモチベーションは高く、お勧めしたセルフケアグッズも購入され歯周初期治療に入ったのですが、なかなか PCR が良くなりませんでした。私は“なぜだろう、どうしたらよいのか”と、悩んでいました。

ちょうどその頃、院長が研修のために訪問していたスウェーデン・デンタルセンター（東京都千代田区 院長：弘岡秀明先生）へ、私も同行したいと院長にお願いしたところ、弘岡先生、院長の両者から快諾をいただき見学させていただけることになりました。以前から、弘岡先生や同医院の歯科衛生士、加藤 典さんの実際の臨床現場を見学させていただきたくったので、夢が叶った大変貴重な時間となりました。その時、加藤さんが患者さんにお勧めしていた歯間ブラシがテペだったのです。私はその日までテペ製品は見たことがあるくらいで実際に使用したことはありませんでした。なぜ、世の中に多々ある歯間ブラシの中でも加藤さんはテペを選んだのか、とても興味がわきました。そして、教えていただいたこと。**毛束が程よくあり、メタルワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックコーティングされているのでインプラントや補綴物、根露出部にも安全なこと、またワイヤーの根元まで植毛されていること。エクストラソフトタイプの歯間ブラシは外科処置後やデリケートな部位にも使用できること。**その時の気持ちは、“すごい！もう、とにかく早く使ってみたい！”…その後早速自ら試し、そして当院でも導入することが決まりました。

私自身の感想としては、**歯間に挿入した瞬間“なに、この気持ち良さ！！”今までに無い感触でした。ふわふわ～として歯肉にあたる感じがやさしいのに、しっかりプラークは除去できる。そしてブラシ形態が円柱形なので、円錐型の歯間ブラシとは違い口蓋側隅角のプラーク除去や、根面の凹みにも効果的**ということでした。

この気持ち良さを色々な患者さんに伝えたい気持ちでいっぱいになりました。“そうだ、あの患者さん（前述の方）に勧めよう！”…そしてその日がやって来ました。まず、「歯間ブラシを使わない理由をお聞かせください」と尋ねてみると、患者さんから「あのガシガシする感触がもうダメ」とのこと。この『ガシガシ』を理解して攻略しないと先に進めないと思い、まずその時ご本人がご使用中の歯間ブラシをあえて試していただき、自分なりの『ガシガシ』を感じたところで『テペ歯間ブラシのふわふわ』で挑みました。「いいね、ガシガシしない。じゃあ使ってみようかな。」…やったー！それからその患者さんは、治療のステージごとに歯間ブラシのサイズやかたさを適したものに調整しながら使い続け、今は歯周状態も安定した日々を送られています。

歯科衛生士として、自分でしっかり納得して好きになり、そして患者さんに伝え、治療の成果と一緒に喜びあえる…そんな素晴らしいセルフケアグッズに出会えたことに感謝し、これからも使い続けていきたいです。



紹介して下さった患者さんや新規の患者さんに差し上げて喜ばれている当院の医院名入りテペのオリジナルプリント歯間ブラシ



スウェーデン・デンタルセンターにて
左から：歯科衛生士 加藤さん、院長の弘岡先生、当院の上田院長、筆者



テペ オリジナル歯間ブラシ



清潔なグローブでプラクティスボックスセットから歯間ブラシを選択

嫌がったら変えてみよう ～子ども用歯ブラシの選び方～

歯みがきだいすき習慣をつけよう。子どもへの優しさは、プラーク除去効果の高い
密毛でコシがある歯ブラシと考えています。スウェーデンの人気キャラクター
Bolibompa（ポリボンパ）がついた TePe GOOD ミニエクストラソフトが新登場。

株式会社 Himmel
代表取締役
田上 めぐみ



ママたちからこんな話を聞くことはありませんか。「子どもが歯ブラシを嫌がります」「どんな歯ブラシを選んだら良いのかわかりません」など
チェアサイドで受けた質問に皆さんはどのように回答されますか。

子どもが歯ブラシを嫌がるには理由があります。感覚的に痛かったり、
びっくりすると嫌がります。お口は敏感な器官だから経験したことが
ない物が入った瞬間に拒否したい物として認識されます。2つ目は心
理的にママの表情や声の大きさに叱られているような感じや押さえつ
けによる恐怖の時間と感じていることで歯ブラシの時間を嫌います。

歯ブラシ好きの子どもになるために、私が行っている2つのアドバイ
スをご紹介します。まず1つ目として妊娠中のママへお話することは
哺乳行動がある乳時期からお口のまわりを毎日ふれてあげること。例
えば、やさしく頬や唇をつまんだり、お口の中に指を入れたり、舌を
ツンツンしてあげます。ママだけでなくパパも同じように触ってあげ
ることがファーストステップ。4～5ヶ月頃になると赤ちゃんは物を
つかんでお口の中に色々なものを運びなめる協調運動が始まります。
そのころから哺乳や食事の後にやわらかいシリコン製の歯がためや
ガーゼなどを入れて口腔衛生の習慣をつけていきます。加えて口腔周
囲の皮膚や粘膜に様々な素材の感覚を体験させていきます。

2つ目は、歯ブラシが子どもたちの興味を引く色で絵柄やキャラク
ターがついていること。無地よりもイラストがついていてポップで
あること。今回発売のテペ GOOD のミニサイズにはスウェーデンの
子どもたちに大人気のドラゴンキャラクター Bolibompa(ポリボン
パ)がついています。クリクリ、パッチリの愛くるしい目がインパクト



テペ GOOD ミニ エクストラソフト
の軟毛は歯肉周囲粘膜に当たっても
気持ちが良いので嫌がらない



テペ GOOD ミニ エクストラソフト
ブリスターパック イメージ

トありますね。絵柄のチョウチョやお花を見せたりお話したりしなが
ら仕上げ磨きや自分磨きをすれば楽しい時間になります。

このように乳幼児期からのブラッシング目的は、プラークを落とすと
いう考えよりも歯ブラシを嫌がらない口腔衛生の習慣をつけること。
そして、う蝕予防には飲料も含めお口に入る食品の回数やシュガーの
種類など食習慣からのリスクを下げるのが重要だとお伝えします。

では、はじめてお口に入れる歯ブラシの形状はどのようなものが適正
でしょうか。ママたちに「うちの子は歯ブラシを嫌がりません」とい
う歯ブラシを見せてもらおうと、やわらかめでたくさんフィラメントが
あります。ですからはじめての歯ブラシ選びは肝心で、やわらかく、
たくさんフィラメントが植毛されているブラシの選択ができていれば
後は段階を踏んで色々な道具がお口の中へ入れても拒否されません。

通常市販品の歯ブラシはフィラメントが硬くて本数は少ないです。フィ
ラメントが少ない場合は1本が太いので粘膜への当りは固くなります。
硬さはフィラメントの本数に比例します。太い毛は穴にたくさん
植毛されないから除去率も劣ります。また、短いフィラメントは硬い
です。そういった点からテペのミニはフィラメントが1,540本ほど
あり、長さも十分にあるので柔らかく口腔粘膜に触れて嫌がらない歯
ブラシと言えます。



フィラメントの特徴	嫌がることがある	嫌がりにくい
フィラメント数	少ない	多い
フィラメントの硬さ	かたい	やわらかい
フィラメントの太さ	太い	細い
フィラメントの長さ	短い	長い
↓		
口腔粘膜にあたる感覚	痛い	痛みが出にくい

痛みが出にくい歯ブラシの特徴

患者さんの満足度が上がる、 歯科衛生士による正しい歯ブラシの処方

当院では歯周病治療、メインテナンスに来院された患者さんには、
その方にあった歯ブラシを歯科衛生士が選び、プレゼントをしています。

医療法人真摯会 まつもと歯科
(大阪府 吹田市)
歯科衛生士 坂上 明美



各メーカー色々な種類を扱っていますが、その中でも私たち歯科衛生士が自信を持ってお勧めできると感じたテペ GOOD 歯ブラシとスプリム歯ブラシを導入して約1年半たちました。

テペ GOOD は、今まで他の歯ブラシをお使いの方にも説明をさせていただくと、「磨きやすさが違う」と患者さんが家族分まとめ買いをされるほどの人気です。

独特の台形状ブラシヘッドは口腔内頬側へ容易に入り磨きやすく、毛先がラウンド加工されているのでサクサクと快適に磨けるのが特徴です。歯ブラシの形状もお勧めポイントですが「これからの地球に優しい歯ブラシ」や、「サトウキビ由来のバイオプラスチックでできている歯ブラシ」等、エコな歯ブラシであるという付加価値まで説明すると、興味を持たれる患者さんが多いです。

カラーも昨年よりピンク、イエロー、ブルーも加わり4色展開になったので、家族で使われる患者さんに喜ばれています。色がかわいいと好評です。2021年冬頃には6色展開になるということで楽しみです。

先日、他の医院より転院してきた患者さんの担当になりました。初診時のオープクエスションで、他院ではいつも「磨けていない」と担当歯科衛生士より言われ続け、通院するのが億劫になったというので

す。実際 PCR は決して良くなかったですが、患者さんは1日3回時間をかけ、丁寧に磨いているとの事。色々とお話をうかがっているうちに、もしかしたら歯ブラシが合っていないのではないかと思い、患者さんのブラッシングテクニックを見る前に、「おそろく道具、歯ブラシが合っていないと思います。今日から2週間、この歯ブラシでいつも通り磨いてください」とお伝えしてテペ GOOD 歯ブラシをお渡ししました。ふさぎ込んでいた患者さんの顔が一瞬でパーっと明るくなりました。毎回患者さんに合っていない歯ブラシで指導されていたのだと思います。できるだけシンプルで負担をかけない歯ブラシとしてテペ GOOD 歯ブラシを選択しました。2週間後の来院時にはすごく綺麗に磨けているのを確認できました。初めて誉められたと喜んで頂きました。

患者さんのライフスタイル、口腔内の状況をよく観察して、その方にあった歯ブラシ等のセルフケア用品の選択は大事だと再確認しました。歯科衛生士が行う正しい歯ブラシ処方は、患者さんのモチベーションが上がり、綺麗な状態を維持しようと自信と意欲を持つことにつながります。その結果としてその患者さんは健康を維持できます。

患者さんの行動変容を私たち歯科衛生士が寄り添いお手伝いする時に、頼もしいテペ GOOD 歯ブラシは自信をもってお勧めできます。



スタッフもお気に入りのテペ GOOD 歯ブラシ



分院である梅田クローバー歯科アネックスの
チェアサイド



患者さんに興味を持っていただくために
TePe のディスプレイを置いている



当医院の物販コーナー
情報提供をするようにしている

テペ GOOD シリーズ



これからの地球にやさしいオーラルケア テペ GOOD(グッド)

- 人間工学に基づいてデザインされた持ちやすいハンドル
- 歯面と歯肉に優しいラウンド加工で、密集したコシのあるブラシ
- 臼歯部に届きやすいようにデザインされた台形状のヘッド

グッド GOOD

ハンドルの色はアソートになります



ブリスターパックイメージ

- | | |
|----------------------------------|-------|
| ■ GOOD(グッド) ソフト | 25本/箱 |
| ■ GOOD(グッド) コンパクトソフト | 25本/箱 |
| ■ GOOD(グッド) ミニ エクストラソフト | 25本/箱 |
| ■ GOOD(グッド) ソフト ブリスターパック | 14本/箱 |
| ■ GOOD(グッド) コンパクトソフト ブリスターパック | 14本/箱 |
| ■ GOOD(グッド) ミニ エクストラソフト ブリスターパック | 14本/箱 |

イラスト入り

イラスト入り

タングクリーナー GOOD Tongue Cleaner



口臭の原因となる舌のバクテリアを取り除きます。
きれいに洗い流せるので、長く清潔にご使用いただけます。

■ タングクリーナー 14本/箱

- * 環境に優しいバイオプラスチック素材です
- * 本商品はオートクレーブ非対応品です

ブリスターパックのみ
(環境にやさしいパッケージを使用しています)




3列のクリーニング面

ミニフロッサー GOOD Mini Flosser

持ちやすいユニークなグリップとバイトブレンが特徴的なテペのホルダー付きフロスです。

- ミニフロッサー 36本入/袋
- ミニフロッサー15袋(36本/袋)
- ミニフロッサー個別包装 200本/箱


- * 環境にやさしいバイオプラスチック素材です
- * 本商品はオートクレーブ非対応品です

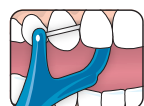

バイトブレン部を対合歯で軽く押します




細く、強いフロスで効果的に隣接面をクリーニング

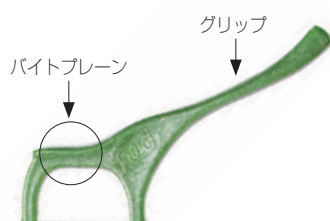

- お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

GOOD シリーズはオートクレーブ非対応です。

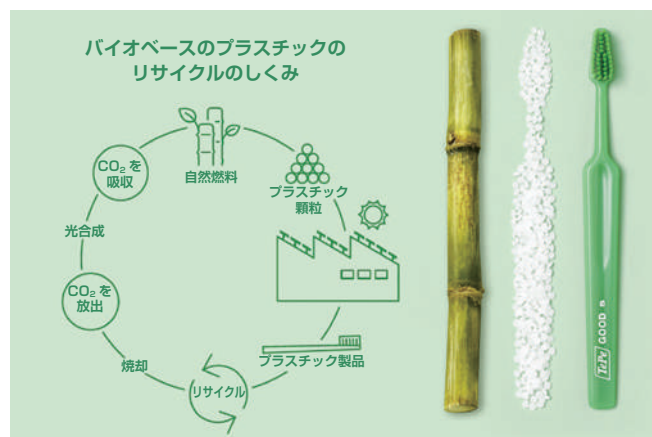

グッド ミニ Bolibompa

ミニサイズがかわいいイラスト入りになりました

ハンドルの色はアソートになります



スウェーデンの子どもたちに
大人気のTVキャラクター
Bolibompa (ボリボンパ) のイラストです

バイオベース
プラスチック

- GOOD(グッド) ミニエクストラソフト 25本/箱
- GOOD(グッド) ミニエクストラソフト ブリスターパック 14本/箱

* テペが取り組む SDG s をご案内できるポスターできました！裏表紙をご確認ください。

エコバッグ ECO BAG

TePe のGOOD なエコバッグ登場！

- ・ しっかりした素材
- ・ マチあり
- ・ 肩から掛けられる

■ テペ GOOD エコバッグ 3枚入

サイズ: H 37×W 36×D 11cm 素材: 生成 コットン



- プラスティックパック ■ ブリスターパック ■ ソフトパック ■ その他




TePe社は 2022 年までに、
すべての商品を地球温暖化へ寄与しない
サステナブル (持続可能) な素材にすることを
目指しています。



TePe社が取り組む SDG s をご案内できるポスターできました！
裏表紙をご確認ください。

TePe from Sweden

予防歯科の先進国スウェーデンから

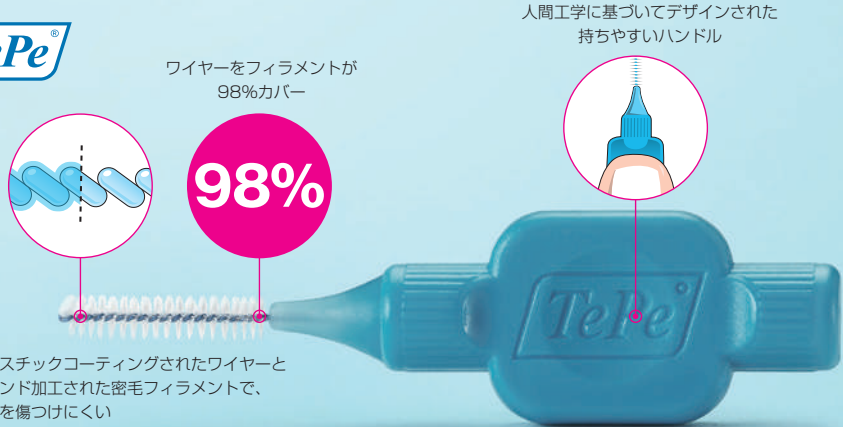

人間工学に基づいてデザインされた持ちやすいハンドル

ワイヤーをフィラメントが98%カバー

98%

プラスチックコーティングされたワイヤーとラウンド加工された密毛フィラメントで、歯面を傷つけにくい

スウェーデンの歯科衛生士 10 人中 9 人がテペの歯間ブラシの使用を推奨しています *

フィラメント部分の使いやすさはそのままに、ハンドルとキャップが CO₂ 排出量を軽減する、環境に優しい再生可能な素材になりました！



キャップはハンドルとして使用可能



A choice that matters

キャップやパッケージにエコ・フレンドリーを表す葉っぱのマークがついています。

■ プラスティックパック ■ ブリスターパック ■ ソフトパック ■ その他

* IPSOS Healthcare, 2019-06-26, Brand Monitor Professionals

オリジナル歯間ブラシ

Interdental Brush Original

ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングされ、サイズは 9 種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。



キャップはハンドルとして使用可能

- 8本入パック 10パック/箱
1パック単サイズ8本+キャップ1本入(グレー、ブラックはキャップなし)
- 6本入ブリスターパック 10パック/箱
- アソートパック 10パック/箱
1パック ピンク～グレー 各1本 計8本(ブラックを除く)+キャップ1本入
- 25本入パック
1パック単サイズキャップ付 25本入(グレー、ブラックはキャップなし)
- 個別包装(キャップ付) 150本入 150本/箱
(グレー、ブラックはキャップなし)

エクストラソフト歯間ブラシ

Interdental Brush Extra Soft

通常の歯間ブラシよりもブラシがやわらかく、歯肉炎、知覚過敏、インプラントなどの外科処置後の患者さんに適しています。



キャップはハンドルとして使用可能

- 8本入パック 10パック/箱
1パック単サイズ8本+キャップ1本入
 - アソートパック 10パック/箱
1パック パステルオレンジ1本、パステルレッド1本、パステルブルー2本、パステルイエロー2本、パステルグリーン1本、パステルパープル1本 計8本+キャップ1本入
 - 25本入パック
1パック単サイズキャップ付 25本入
- *エクストラソフト歯間ブラシの 6 本入ブリスターパックはありません
*エクストラソフト歯間ブラシの個別包装(キャップ付)はありません

アングル歯間ブラシ Interdental Brush Angle


臼歯部や、舌側、口蓋側からのアクセスが容易なアングルヘッド。ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングしてあります。



- 6本入ブリスターパック 10パック/箱
1パック単サイズ6本+キャップ1本入
- アソートブリスターパック 10パック/箱
1パック ピンク～グリーン 各1本 計6本+キャップ1本入
- 25本入パック
1パック単サイズキャップ付 25本入
- 個別包装(キャップ付) 80本入 80本/箱
- お問い合わせはクロスフィールド様まで

デンタルテープ Dental Tape

ライトワックスつきのフラットなテープははつれにくく、コンタクトがきついところや歯間乳頭部にも挿入しやすいので、効率良くプラークが除去できます。

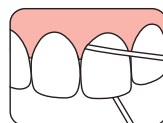

デンタルテープ 5m



デンタルテープ 40m

- デンタルテープ 40m ブリスターパック 10個入 10個/箱
- デンタルテープ 5m 125個入 125個/箱

セレクト Select

お手頃な価格で高品質なテペのスタンダード。密でコシのあるフィラメントが効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。



ハンドルの色はアソートになります

■ セレクト ミディアム	25本/箱
■ セレクト ソフト	25本/箱
■ セレクト エクストラソフト	25本/箱
■ セレクト ソフト プリスターパック	14本/箱
■ セレクト エクストラソフト プリスターパック	14本/箱
■ セレクト ミディアム 100本入	100本/箱
■ セレクト ソフト 100本入	100本/箱
■ セレクト エクストラソフト 100本入	100本/箱

セレクトコンパクト Select Compact

ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。

お子さんや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。



ハンドルの色はアソートになります

■ セレクトコンパクト ミディアム	25本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト	25本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト	25本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト プリスターパック	14本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト プリスターパック	14本/箱
■ セレクトコンパクト ミディアム 100本入	100本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト 100本入	100本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト 100本入	100本/箱

セレクトミニ Select Mini

セレクトコンパクトよりさらに小さいミニサイズで、乳歯のお子さんに最適です。お子さんはもちろん、仕上げ磨きをする大人の方にも持ちやすいハンドルになっています。



ハンドルの色はアソートになります

■ セレクトミニ ソフト	25本/箱
■ セレクトミニ エクストラソフト	25本/箱

コンパクトタフト Compact Tuft

コンパクトなドーム状のブラシ。フィラメントが短く非常にソフトなので、柔軟性と安定性に優れています。また、先がとがっていないので、萌出歯の裂傷やインプラントのヒーリングキャップ、また義歯のアタッチメントの周りなどの繊細な部分を優しく磨くことができます。



ハンドルの色はアソートになります

■ コンパクトタフト	25本/箱
■ コンパクトタフト プリスターパック	14本/箱

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

スプリーム Supreme

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造。長い毛先が歯間部や歯周ポケット、補綴物や矯正器具の隙間などの細かな部分に到達し、同時に短い毛は歯面をすっきりと磨き上げます。また、ソフトな磨き心地がお好みの方にも最適です。サムパッド（親指当て）と背面に滑りにくい素材（TPE）が使われており、手にしっくりなじみます。



ハンドルの色はアソートになります

■ スプリーム	20本/箱
■ スプリーム プリスターパック	14本/箱
■ スプリーム 80本入	80本/箱



ハンドルの色はアソートになります

■ スプリームコンパクト	20本/箱
■ スプリームコンパクト プリスターパック	14本/箱
■ スプリームコンパクト 80本入	80本/箱

スペシャルケア Special Care

とても柔らかいブラシで、口腔外科手術後や知覚過敏、シェーグレン症候群など歯肉が非常に敏感な段階、また粘膜ケアなどに適しています。スペシャルケアは約12,000本のフィラメント、スペシャルケアコンパクトは約7,000本のフィラメントを使用しています。



■ スペシャルケア(レッド)	25本/箱
■ スペシャルケア(レッド) プリスターパック	14本/箱



■ スペシャルケアコンパクト(ブルー)	25本/箱
---------------------	-------

ジェントルケア Gentle Care

スペシャルケアブラシより若干コシはありますが、柔らかいブラシです。術後、スペシャルケアブラシで炎症が和らいだ後の使用に最適です。また、知覚過敏やドライマウス、ホワイトニング後などの敏感な口腔内にも適しています。約5,400本のフィラメントを使用しています。



■ ジェントルケア	25本/箱
■ ジェントルケア プリスターパック	14本/箱

口腔環境と地球環境へ貢献する「TePe」

TePe 製品は、CO₂ 排出量を減らすために、再生可能なサトウキビ由来のバイオベース材料や、マスバランス材料を使用しています。また、TePe 社は製造工程で、できる限り風力や太陽エネルギーを使用しており、SDGs「持続可能な開発目標」に関連した取り組みを積極的に実施しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TePe 社では関係性の深い6つの「持続可能な開発目標」に関連した取り組みを積極的に実施しています。



オーラルアプライアンスの新しい清掃と管理方法 「デンタルクリーナーを用いた口腔衛生管理を はじめよう！」

大手前短期大学 歯科衛生学科
(兵庫県西宮市)
助教 白水 雅子



皆さんは、スポーツマウスガード（以下 MG）を装着する患者に対して、どのような口腔衛生管理を指導していますか？日本スポーツ歯科医学会が公表するマウスガードのコンセンサス^{*1}には、MG をお湯で洗わないことや、長時間水中に浸漬させないことなどが挙げられています。しかし、**MG の清掃方法は、義歯の取り扱いと混同されやすく、誤った管理方法も散見されます。**

近年では、MG 以外にも、口の中に入れる器具や装置が増加しています。例えば、ナイトガード、睡眠時無呼吸症候群の治療用装置、舌接触補助床などがあり、これらを総称して口腔内装置（オーラルアプライアンス：以下 OA）と呼ばれています。今後も新たな治療法の確立や、歯科医療の発展とともに、さまざまな分野における活用が見込まれています。このような背景から、**歯科衛生士は、OA を用いる患者やその家族に対して、正しい管理方法を指導することが重要です。**その一方で、**OA の正しい衛生管理方法が周知されておらず、またその手段や物品も限られているのが現状です。**

そこで 2020 年に、「月刊歯科衛生士」^{*2}にて「MG の正しい使いかた」を寄稿し、指導用リーフレットも作成していただきました。すると読者の方より、「MG を物理的に清掃できる器具を紹介して欲しい」とご意見が寄せられましたが、残念ながらご希望にお応えする製品がありませんでした。

その後、今回ご紹介する「デンタルクリーナー」の存在を知り「**これは今までにない清掃方法が提案できる！**」と思い、早速購入しました。初めて目にする装置でしたが、上下にあるブラシは、確実に MG 表面をとらえており（写真 1）、使い方は簡単です。**またブラシ部分は交換が可能で、経済的にも配慮されています。使用時は、研磨剤が入っていない、ジェル状の歯みがき剤の併用がオススメです**（写真 2）。この製品を、日常的に MG を使用するプロスポーツ選手（神戸製鋼コベルコスティーラーズの専属トレーナーおよび選手の皆さん）にご紹介すると、非常に高い評価が返ってきました。

以上の経験より、今年度は、大手前大学・短期大学の課外活動団体のうち、MG の装着を必須とする男子ラクロス部（写真 3）を対象に、「大学生におけるマウスガードの使用実態と口腔衛生管理」の研究を開始しました。日常的に歯科検診がない大学生に対して、MG の管理を媒体に口腔管理の意識を高めてもらうことが目的です。（写真 4）。その結果、青年後期にあたる大学生が正しい口腔衛生管理を獲得する一助になればと考えています。

皆さんも「デンタルクリーナー」を用いて患者指導の幅を広げ、今までアプローチが難しかった対象者においても、新しい指導の展開手段として活用してみたいいかがでしょうか？



写真 1. デンタルクリーナーは、手軽に使用することができる。



写真 2. 清掃効果を高めるために、ジェル状の歯磨剤を併用する。（ディーボントジェル使用）



写真 3. 大手前大学・短期大学ラクロス部の活動時の様子



写真 4. 学生にデンタルクリーナーの取り扱い方法を説明している

参考文献

- * 1) 2014 年度 日本スポーツ歯科医学会が提唱する標準的で適切に製作されたマウスガードのコンセンサス（ワーキンググループ 4）清掃、保管、修理、再製 権田知也ら、スポーツ歯学（1344-140X）18 巻 2 号 P81-82(2015)
- * 2) 簡単に！詳しくも！DH のための説明力向上講座 [第 5 回] スポーツマウスガード 使用を希望されている方にこう説明しましょう、白水雅子ら、歯科衛生士（0911-9574）44 巻 5 号 P68-75(2020)



ジェルを使って咬筋ストレッチ

健口から全身の健康へ導くために 患者様への口腔の状態に応じた オーラルケアのご提案

歯科衛生士の業務は多岐にわたります。
しかし、その多くは患者様への予防処置だと
40 数年前歯科衛生士学校で学びました。

DH HIYOKOCLUB 代表
歯科衛生士 堤内 久枝



私は常々、歯石を取るだけの“歯医者さんのクリーニング屋さん”ではなく、患者様の口腔内全体を診て、そこから患者様の体調や変化に気づきサポートできるような歯科衛生士、“オーラルヘルスセラピスト”の育成に力を注いできました。

それは、フリーランスになった当初研修に行かせていただいた医院さんで見た光景があまりに衝撃的だったからです。まさに時間に追われ、目の前の歯石だけを取る“歯医者さんのクリーニング屋さん”だったのです。個別にその方の口腔内の状況にあった歯磨剤やケア用品をオススめすることもなく、“ドライマウスって何？”といった反応でした。これは、決して特別な例ではなく、保険診療で沢山の患者様を診る医院さんでは起こり得ることだと思えます。

しかし、メインテナンスの本来の目的は悪化させないため、健康な口腔を維持すること。そのためには患者様のリスク、体調やその他の全身のリスクも診る必要があります。「ドライマウスでお口がヒリヒリして歯磨きがしづらい」そんな方に発泡剤、研磨剤を多く含む歯磨剤をオススめていますでしょうか？

ティーボドントに含まれるティーツリーの葉は抗菌力が強く消毒薬としても使われてきました。ティーツリーの葉から抽出されたオイルはバクテリアや真菌などウィルスと戦うもっともパワフルな精油ともいえます。また、口臭抑制効果もあるかと思えます。自然界にあるものを使うことで刺激も少ないかと思えます。

ティーボドントペーストはこのような方にお勧めしています

- ドライマウスで口の中がヒリヒリして磨きにくい(口腔内状態によりペーストではなくジェルを使ってもらうこともあり) → 低発泡なので磨きやすく刺激が弱いので長時間磨ける
- インプラントを入れているのでフッ素入り歯磨剤は使いたくない → フッ素無配合



ペーストを歯ブラシの3分の2くらいつけて磨いてもらっています

- 泡がたつのが苦手なので、ずっとジェル歯磨き使っていたが、歯に着色がつくようになった → 研磨剤が少し含まれているので着色予防ができる
- 口に入れるものはなるべく自然のものにしたい → 自然界のティーツリーの葉から抽出した成分を使用

ティーボドントジェルを使って付加価値のあるメンテナンスを！

メンテナンスを継続していただくために・・・
私たちにできること・・・

- ・ 個々の口腔の状態、リスクに応じたプロケアを行う
- ・ マンネリ化させない
- ・ 歯、歯石だけでなく舌や粘膜、唾液の量などもチェックして必要なケアやセルフケア、食事指導を行う

私はオーラルヘルスセラピストとして、上記のことに注意してメンテナンスを行っています。

ドクターよりも長く患者様の口腔内を診られるのが歯科衛生士の特権です。是非、その特権を生かし【木を見て森を見る】…口腔から全身疾患の予防ができることを目指していきたいと思えます。

<最近の患者様に多い症状>

- ・ 口が開きにくい
- ・ 不定愁訴：なんとなく違和感、部位不特定の痛み、鈍痛がある
- ・ 虫歯も歯周病もないがしみて痛い
- ・ 舌、頬粘膜に歯型がつく
- ・ 唾液が少ない

こんな症状の多くはTCHなどが原因で咬筋が凝り固まり、舌位も下がり口が開きにくい、首や肩が凝るなどの症状を伴っています。

このような患者様にティーボドントジェルを使って咬筋をゆるめるストレッチケアや唾液腺刺激マッサージ、ガムマッサージなどを行っています。ティーツリーのさわやかな香りとアルコールフリーで低刺激というのも使いやすいです。患者様からもすっきりすると大好評です！

ティーボドントジェルの特徴

- ・ 味がすっきり爽やか（ティーツリー葉水使用）
- ・ ジェル状で粘膜へののびが非常によい
- ・ 定着性がよくて垂れてこない
- ・ ノンアルコール、ミント系も含んでいないので、すっきり味なのにヒリヒリしない

- ・ 研磨剤、フッ素も無配合なのでインプラント埋入患者様への歯間清掃時にも使える

実際にジェルを使って施術を受けた患者様からは次のようなコメントをいただいています

- ・ とてもすっきりした
- ・ 肩こりや首の痛みがとれたみたい
- ・ 口が開きやすくなった
- ・ 目がぱっちりあく
- ・ 小顔になったみたい
- ・ アロマの香り（ジェルに含まれているティーツリー）が好き
- ・ 次に来るのが楽しみ

どれも歯科衛生士にとってとても嬉しいお言葉です。歯科医院にくることを楽しみにしていただけなんて、幸せなことですね。大切な患者様の健口を維持させていただくプロとして、今後も個々の患者様の状態に適した口腔ケア用品の選択、指導を行っていききたいと思います。

～咬筋ストレッチで効果のでやすい症例～



唾液が少なく歯肉、舌にも圧痕あり、奥歯がじんじんと不定愁訴あり。咬筋ストレッチ、唾液腺刺激マッサージで改善



TCHによる歯型（圧痕と咬痕線）



写真1. 姿勢良く診療にあたることができる

驚愕！エルゴフィンガーの素晴らしさ 食わず嫌いはもったいないアイテム

疲れない！肩こり腰痛が激減、スケーリングの時間短縮に成功…
これは一度良さを知ると、もう元に戻れません！

歯美人 DIARY 代表
たかぎ歯科医院
(愛知県名古屋市)
歯科衛生士 高木 佐知子



機能美が特徴の北欧デザインならではの独特のフォルムと色合いがなんともおしゃれで、そんなイメージにも惹かれて使い始めたエルゴフィンガー。元々、部屋も家具も北欧スタイル、愛車もスウェーデンブランドと、シンプルで飽きの来ない実用性のある北欧デザインが好きなので、エルゴフィンガーも一目見た時から「デザインがいい！これは便利そう！」とピンと来ました。

最初はそんなちょっとしたオシャレ感覚からでしたが、いざ使い始めるとその実用性にびっくり！本当に疲れにくくなりました。週末の診療では1人30分×10人ノンストップで5時間ぶっ続けで保険のメンテナンスをする事も多く、これまでは仕事が終わると「もぬけの殻状態」だったのが、エルゴフィンガーを使い出してからは、「まだまだいける」って感じることもあります（笑）。

左肩を落として持てることから姿勢の保持が楽になり、不自然な体勢から来る肩こりや腰への負担が軽減。診療の質の向上、時間の短縮、身体疲労の軽減に成功しています（写真1）。

何よりエルゴフィンガーを中指にはめるとミラーも持てますし（写真2）、口腔内吸引に入るまでのロスタイムが1.5秒ぐらいは短くなっていると思います。これは、術者だけでなく患者様にとってもよい事ですよね。

今や、上下前歯舌側・口蓋側のスケーリングがミラー把持をしながらできるため「楽になり」、歯石や着色の取り残しも少なくなりました。スケーリング時間の短縮も実感しています。

そして、このエルゴフィンガーにはノズルが2種類あり、通常タイプと、少し先が丸く幅広のエアフロー用、「エアフロー用ノズル」があります（写真3）。最初、吸口の小ささが気になり飛沫を心配しましたが、吸力に安定した強さがあり、しっかりした吸いを見せてくれます。エアフロー用ノズルを通常のスケーリング用として併用する時もあるのですが、術者・患者さん共に、特に使用感の問題は見受けられません。

また、ノズル先も、今まで使っていたゴム製ではなくプラスチック製になるため、最初は「あたと痛いか？」と患者さんの不快感を気にしましたが、お聞きしてみるとそう思われている方はほとんどいってなくて、むしろ何の問題もなく大丈夫、という方ばかりでした。

ノズルの先に穴が開いているので口腔内粘膜の吸い過ぎを防いでくれるのも良いみたいです。また、ノズル先は360度回転し、チューブ部分も手の動きに沿って自由に曲がるので本当に使いやすく、身体の疲労軽減を実感できます。スウェーデンのエジェクター（排唾管）「ハイゴフォーミック」との併用で、さらに効率アップ（写真4）。

この製品はディスポーザブルですが、このような製品がディスポーザブルなのは衛生の意識が高いヨーロッパではスタンダード。これからは日本の歯科医療のスタンダードにもなっていくのでしょうか。

さすがフィンランドの歯科衛生士さんが普段の臨床業務から「こんなものがあるといいな」を製品にしたものだなぁと感心すると共に、今さらですが歯科衛生士の仕事に更に愛着が湧きました（笑）。

騙されたと思って一度、患者さん10人ほどエルゴフィンガーをしっかり使い続けてみてください。あなたも虜になりますよ！



写真2. ミラーを把持しながら使用できる



写真3. 少し幅広のエアフロー用ノズルを使用



写真4. ハイゴフォーミック（奥）を併用



● エルゴフィンガーを使用し、感染予防対策を実施していることを患者様にご案内できるポスターができました！

こちらからダウンロードしていただけます。



すごいシャープニングストーンと出会ってしまった ゴールドエッジシャープナー

『私の7つ道具』に加えてみるとたちまちシャープニングの達人に。そんなワクワクな一品。
シャープニングが不得意で…
そんな仲間に教えてあげたい秘密兵器ともいえるシャープニングストーン。

寺嶋歯科医院
(大阪府箕面市)
歯科衛生士 **菊地 直子**



“シャープニングは好きですか？” そんな質問に “YES” と答えられるようになりました。

歯科衛生士になって技術向上のために必死に練習し続ける数あるスキルの中で、最高峰といえはなんといっても < SRP > ではないでしょうか。姿勢、把持法、動かし方、ポジショニング、歯石探知能力など、SRPの極意は沢山ありますが、その中でも鋭い切れ味のスクレーパーはなくてはならない存在です。

シャープニングの目的は、

- ① 安定したストロークの獲得
- ② 高感度な手指の感覚
- ③ SRP 効率のアップ

シャープニングテクニックの取得ってものすごく大切。でも難しいですよ…。例えば、“先輩から数々のやり方を伝授されるのだけれど、なんだかうまくいかない”、“これであっているのかわからない”、“後輩からシャープニングを教えてほしいと言われるけれど、匙加減や感覚をうまく伝えられない”、“結局角度表がないと不安”、“どんな場でもさっとできるようにしたいのだけど難しい”。こんな悩んで、あるあるなのではないでしょうか。

ここでシャープニングの原則

- ① 鋭利で角度 70 ～ 80 度のカッティングエッジの付与
- ② 出荷時のブレード形態を相似形に維持する

このゴールドエッジシャープナーストーンは、底面を床と平行にするだけで自然に 75 度の角度がつきます。フェースを床と平行に合わせるためにマグネットシートを細く切り乗せるとわかりやすくなります。もしマグネット棒の準備があればそちらを乗せて、そのままの角度でストーンに添わせるだけで角度を正しく保てます。(写真 1) そうすると角度表いらすずです。

すっぽりと手の平に収まりやすいサイズですが、程よい厚みがあり把持しやすいです。指をはみ出すことなく把持が可能なので怪我を防げます。安定感のある使い心地で気持ちよくシャープニングが行えます。超音波洗浄や滅菌機にも幅を取らず省スペースで、邪魔になりません。落としても破損しにくい丈夫構造なので安心です。(写真 2)

側面に大小の溝があり、トゥの形態修正がスムーズに行えます。側面に溝が配置されたことでスクレーパー側面のシャープニング時に邪魔にならず、45 度の角度が目視しやすいです。これで相似形を楽に作ることができます。(写真 3)

すごくシンプルなのに丁度いい。この 1 本でシャープニングの苦手が得意になります。間違いなくお勧めの一品です。

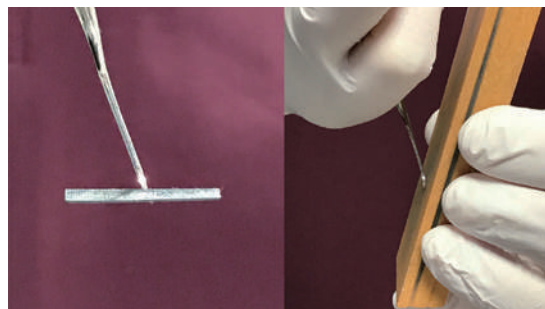


写真 1. ゴールドエッジシャープナーを使えば、視覚的にわかりやすく角度を保てます。指をはみ出すことなく把持ができるので怪我の心配も少ないです。

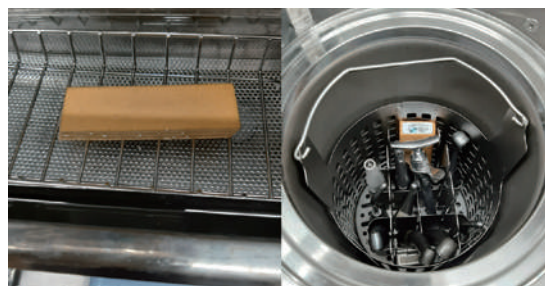


写真 2. 割れにくい加工になっていて、滅菌機も超音波洗浄機も気兼ねなく使用することができます。



写真 3. 側面に大小の溝が設置されていることにより、より安定したトゥの研磨が可能となります。

NEW
EDGE
TECHNOLOGIES

視覚的に平行を確認しながら安全、確実にシャープニング

ゴールドエッジシャープナー

- 視覚的に平行を保てるので安定したシャープニングができる
- 砥石にレジンが編み込んであり、汚れが付着しにくい
- 万が一、本体を落としても割れにくいレジン加工
- シャープニング時に水や油を必要としない
- オートクレープ対応で、水分を吸収しにくい
- 先端部も本体の右側面にある溝で形態修正できる

面を 75 度にカッティングする事により
正確な研磨角度を実現

75°

商品名 **ゴールドエッジシャープナー**

標準価格 8,500 円 (税込 9,350 円)

* 商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。

本体寸法
幅 3cm
奥行き 9.2cm
高さ 1.2cm

home page



『DH blossom SRP テクニック スキルアップセミナー』ではゴールドエッジシャープナーを用いたシャープニング理論、グレーシーキュレットのシャープニング実習や変形したブレードの修正方法が受講できます。

ラクスエーター・プラス P シリーズを使用して 残根抜歯を施行した一例 術部への低侵襲摘出 その後の円滑な補綴治療を目指して

ファミリー歯科
(神奈川県横浜市)

歯科医師 歯学博士 星野 大地



超高齢社会の現在、歯科治療の中でも"予防"という概念も一般に浸透をみせ、歯の保存を第一に考慮することも増えてきている。

保存的な治療をすすめている中でも、根面う蝕や破折、歯周病の進行により抜歯の選択を迫られる局面には度々遭遇する。予防治療や保存治療が主流の現在、抜歯は患者にとって大変心理的・身体的苦痛を伴う処置の一つである。抜歯時の留意点として、可及的に術部への侵襲性を考慮することは、高齢患者の身体的負担の軽減、抜歯後の周囲歯槽骨の温存、インプラント治療や補綴治療を円滑に行う上でも非常に重要である。しかし、日々の臨床で直面する予後不良歯の抜歯は、残根状を呈することも多く、処置に難渋することも少なくない。中には術式が複雑化し、骨削除等が必要な症例では術後の疼痛・腫脹等の不快症状が出現することもあり、患者のQOL低下が懸念される。そのため、術者には迅速かつ低侵襲な処置が求められている。しかし、術者にも円滑かつ安全な抜歯を行うという使命感から心理的負担があることも事実である。

ラクスエーター・プラス P シリーズは、従来から使用されているラクスエーターシリーズと比較し、抜歯時の操作性向上ならびに術部への侵襲性についてより考慮されているのが特徴である。それに加え生体親和性のあるチタンコーティングが刃部に施

されており、器具の耐摩耗性・耐久性を向上させている。さらに特筆すべき点は、ラクスエーターをベングリップで把持することである。これによって歯の長軸方向へ力が効率的に伝わりやすくなり、より深く歯周靱帯を切断することが可能となった。


ラクスエーター・プラス P シリーズを用いることにより、治療時間の短縮や周囲歯槽骨の温存等のアプローチが可能となり、患者側だけでなく術者側の負担軽減にも繋がると考えられる。また先端のブレード幅や形状が異なる4種類が展開されており、使用目的に応じて選択することができるため、幅広い症例への使用が可能である。

[下部写真参照] 口腔内にて破折線が確認され、抜歯が適応と判断した症例である。表面麻酔後に浸潤麻酔を行い、ラクスエーター・プラス P シリーズのP1 を使用して残根抜歯を行った。始めに近心頬側隅角より本品を歯肉溝へ挿入し、全周の歯周靱帯を切断した。この際、ラクスエーターの把持をベングリップで行うことにより、歯根膜腔への細かなアプローチが可能となる。歯周靱帯切断後は、本品をこじらずに長軸方向へ押し進めることで、比較的弱い力で歯を脱臼・抜去することが可能であった。実際に使用するとグリップの太さや質感も手に馴染みやすいため、操作上での安心感があることも実感していただけたと思われる。また使用時のポイントとして、反対側

の手指で術部の歯槽堤を固定することで顎位が安定し、本品の動作確認が容易となると考えられた。結果として術後の経過は、疼痛や腫脹等の訴えもなく良好であり、懸念していた術部への侵襲は最小限に抑えられている。

ラクスエーター・プラス P シリーズを用いることにより、治療時間の短縮や周囲歯槽骨の温存等の低侵襲のアプローチが可能となり、患者負担軽減、満足度の向上だけでなく、結果として術者側の負担軽減にも繋がると考えられる。さらに、器具が従来式より小型であることから、滅菌を行う際、スタッフによる取り扱いも簡便で、収納・保管にも優れている。

ラクスエーター・プラス P シリーズは、予防治療や保存治療が主流の現在、抜歯を行う際の診療の一助となるアイテムといえるだろう。

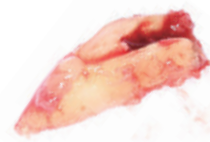

明瞭な破折線が見受けられる



ラクスエーター・プラス P シリーズ P1



残根状を呈した下顎左側第二小臼歯。頬舌的に破折線が認められる。



刃部を近心頬側隅角より歯肉溝へ挿入した。



刃部を歯の長軸方向に進め、全周の歯周靱帯を切断した。その際、丁寧に加圧することが大切である。



術部からの出血は少量であり、周囲組織への侵襲を最小限に抑えることが可能であった。

1 本は持つべき挺子 ラクスエーター・プラス P シリーズ

挺子（エレベーター）は、嘴部の幅や形態、支柱の形態等から多種あるが、抜歯する患歯の状態（歯種、患歯の萌出方向と隣在歯の状態、残根歯、骨性癒着の有無、歯根弯曲の有無、歯槽骨の状態）に合わせて挺子を選択するべきである。

神奈川歯科大学特任講師
ナカ工歯科クリニック
（神奈川県三浦郡）
院長 前畑 香



本稿で紹介するラクスエーター・プラス P シリーズの把柄部は、ラクスエーターシリーズのフォルテやプラスの把柄部と異なりペンタイプであるため、挺子を把持しやすく繊細に扱うことができる。
（写真 1.、2.）

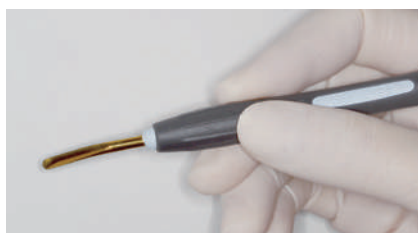


写真 1. ラクスエーター・プラス P シリーズ

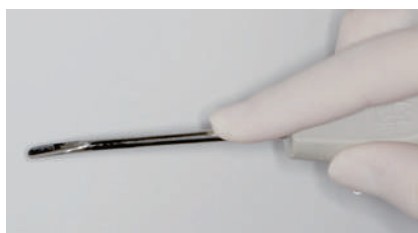


写真 2. 通常のラクスエーター・プラス

またラクスエーター・プラス P シリーズの嘴部は、ラクスエーターフォルテやプラスと同様に 0.7mm と薄く作られており、歯根膜への挿入が非常に容易である。そのため、ラクスエーター P を用い歯周靱帯を切断しながら歯根膜腔に嘴部を挿入することで、

患歯を容易に脱臼させることができる。
（写真 3.、4-1~4.）



写真 3.



写真 4-1.

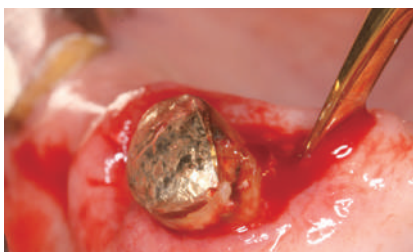


写真 4-2.

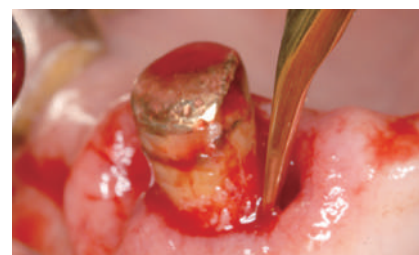


写真 4-3.

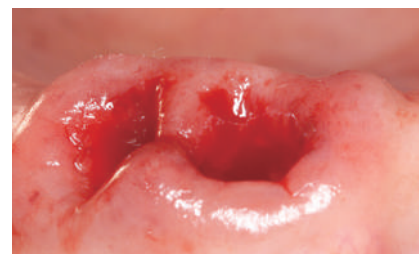


写真 4-4.

抜歯する患歯の状態により挺子の挿入位置が制限された場合、ラクスエーター・プラス P シリーズは嘴部の挿入に優れているため、持つべき挺子の 1 本であると考えられる。

Products Information



User
friendly
instruments

Luxator® P-series

商品名

ラクスエーター・プラス（P シリーズ）

医療機器届出番号 13B1X00133000007

単品 標準価格 12,000 円（税込 13,200 円）/ 本
PK4 4 本セット 標準価格 41,000 円（税込 45,100 円）/ セット

ラクスエーターシリーズに操作性を極めた ペンタイプ（P シリーズ）が登場

- P1 ブレード幅：3mm 形状：ストレート 色：ダークグリーン 全部位（残根/根尖/口蓋側/臼歯遠心）
- P2 ブレード幅：3mm 形状：カーブ 色：ライトブルー 全部位（残根/根尖/口蓋側/臼歯遠心）
- P3 ブレード幅：3mm 形状：コントラアングル 色：ダークブルー 舌側/口蓋側/臼歯遠心
- P4 ブレード幅：4mm/1.5mm 形状：デュアルエッジ 色：パープル 残根

マレットが使用できます

顕微鏡治療をサポートする機器 3 点のご紹介

ご存知の通り日本は、世界でも有数の保険治療を主軸とした
診査診断が適応されている国です。

CT& 米国式根幹治療センター
(神奈川県大和市)
院長 寺内 吉継



これは海外と比較すると、多くの患者さんが、気軽にかつ、平等に等価値の治療を受診できる制度ですが、残念なことに、自費診療への強い抵抗と健康意識への低さが、生じやすくなります。それにより、我々歯科医師自身も、保険適応外の先端技術に対する向上意欲や興味を奪われているのではないのでしょうか。例えば、エンド専門医という言葉は日本にはなく、エンドドンティストは少数の人しか知りません。また、日本の根管治療の成功率は、世界の中で低く、これも自費診療に該当しやすい根管治療より、保険治療が適応可能である抜歯が選択され続けた結果ではないのでしょうか。こういった現状が、本当に患者さんのQOLの向上に繋がるのか、疑問に感じられたことは多々あるはずです。

現状、治療に最善を尽くした上での、選択と結果を我々は選んでいるのでしょうか。ここでは、その成果を残すための技術をサポートする医療機器の紹介を行いたいと思います。

意図的再植法には不可欠な抜歯器具 ラクスエーター・プラス P シリーズ



ラクスエーター・プラスは従来のヘーベルと違う歯根膜を切るタイプの抜歯器具です。その中でもペンタイプの P シリーズは、ペンのように簡単に使用できるので、ミラーの反射像を見ながらでも、視野の確保がしやすく、重宝しています。また、抜歯時に、必要以上の力は不要なので抜歯が楽になり、力のコントロールもしやすいです。意図的再植法のように、傷を最小限に留めることで、痛みや腫れも少なく、骨が寄り、予後も非常に良好です。もちろん、歯間部が崩壊したような残根歯もラクスエーター・プラスを使用すると難なく抜歯することができます。患者さんの中には、抜歯時に剥がされるような音がして嫌悪感を抱いている人もいますが、押されている感覚だけで抜歯が終わるので、恐怖心も緩和され、心地よい治療の提供ができます。ペンタイプで逆反りもあると、臼歯部へのアク

セスがしやすくなるので、新形状としての追加販売を楽しみにしています。

顕微鏡には欠かせない鮮明な表面反射ミラー “ピュアリフレクトミラー”



顕微鏡を使用する上で欠かせないのがミラーです。特に根管内探索では、マイクロクラックや石灰化、破折ファイルなどの早期発見に、大きく貢献すると言っても過言ではありません。中でもこのピュアリフレクトミラーは、他に類を見ない明るく細かな反射率で診療に有用です。マイクロサージェリーにはラウンド3、一般診療時は #4 を使用していましたが、#0 が発売されてからは、口腔内でも小回りの効く #0 を愛用しています。口腔内の隅々まできれいに光が届き、はっきり見ることができるので、自信持ってお薦めしたい一品です。

クラウン除去時間を誰でも 1/3 に短縮 “ワムキー クラウンリムーバー”



クラウン除去において、除去時間の短縮とバーの寿命改善は、診療品質の向上において、最大の課題です。通常は、バーでスリットを入れて分割したり、削り取るため、バーの消耗が激しく、時間もかかります。ワムキークラウンリムーバーは、テコの原理でクラウンを持ち上げて除去できるので、早い場合は 1 分もあれば除去が可能です。前歯でも臼歯でも部位を選ばず、クラウンでもブリッジでも多種に対応し、ジルコニアやセラミックなどの材料でも、普通の金属のようにストレスフリーで除去できます。咬合圧以上の力は患者さんにかからないので、不快感を感じさせにくいところも気に入っています。

以上の3つの製品に今回は厳選しましたが、その他にも顕微鏡治療に必要な不可欠な器具は多くあります。その中でも、歯内療法において印象深いものを今回は抽出しました。

先にも述べたように、世界と比べ、日本の治療レベルの質は決していいものではありません。根管治療を行った歯の数は、日本では残っている歯の 20% に対し、世界平均は半分の 10% に留まっています。我々歯科医師一人ひとりが、この問題に自覚と責任を持ち、その治療水準を向上するための技術を学び続けていくべきではないでしょうか。

Products Information



早くて簡単なクラウンリムーバー、 クラウン除去の強い味方



商品名 ワムキークラウンリムーバー

医療機器届出番号 13B 1X00133000032

セット 標準価格 50,000 円 (税込 55,000 円)

ワムキークラウンリムーバー No.1
ワムキークラウンリムーバー No.2
ワムキークラウンリムーバー No.3
各 1 本、計 3 本、解説 CD

各 1 本 標準価格 20,000 円 (税込 22,000 円)

ワムキークラウンリムーバー No.1
ワムキークラウンリムーバー No.2
ワムキークラウンリムーバー No.3



時短、負担軽減、患者さんにも優しい プレデターターボを使用して

まさみデンタルクリニック
(東京都中野区)
院長 西村 正美



日常の臨床で金属の除去には強いストレスを感じている歯科医師は決して少なくないと思う。とりわけ昨年から保険収載されたチタンにおいて、私はチタンについては、除去はもちろん調整や研磨でさえも困難であるというイメージをもっていた。20年前、金属アレルギーの患者さんから口腔内の金属をチタンに変えてほしいとの依頼を受けた。当時は自費でありチタン冠を制作できる技工所も近くになく、咬合調整でも火花を散らしながら、かなり苦労して装着した経験がある。

最近になって、前述の患者さんが白い歯にしたいとのことで来院され、安易にお引き受けしたものの、内心はチタンの除去がさあ大変とネットや文献を手当たり次第調べてみた。様々な研究がある中、驚いたのは従来の金合金や金パラと比較して引っ張り強さ、弾性係数、ビッカース硬度等さほど大きな違いはなく、逆に粘りのある金属で5,000回転から10,000回転であればかえって柔らかく感じるのだそうだ。装着するときから除去を考えるなんて…と専門医からはお叱りを受けるかもしれないが、これは残念ながら現実起こりうることであるのだ。

そんな中、クリニックに来ている営業さんから勧められたこのプレデターターボを使用してみると驚愕！！とにかく切れるのだ。予約を1時間とり患者さんにはその旨伝えて双方とも構えてからのスタート。ところが5分とかからず除去終了！！しかも切れ味抜群だけでなく、耐久性もあるとのこと。

今までの除去バーは切削中に先端のカーバイト部分が飛んでしまい誤飲誤嚥させてしまうのではないかと心配もあったがこのプレデターターボは軸もカーバイトで一体化しているため安心して使用することができる。耐久性も抜群であり長時間鋭い切れ味が持続することよりコストパフォーマンスにも優れている。つまりコストカット、術者のストレス軽減、そばにいるスタッフの負担軽減、そして何より患者さんが長時間口を開けていることや、金属の切削音や切削片残留等の不快感が少ないことによる負担減にもなるのである。

これらの理由より数ある金属除去バーのなかでもこのプレデターターボは自信をもってお勧めできる非常に優れたバーであると思う。

また、クラウンの除去の際にクロスフィールド社取扱のワムキークラウンリムーバーを使用することにより、より一層の時間短縮が可能となる。

ぜひ一度お試し頂きたい逸品である。



ワムキークラウンリムーバーを使用することにより必要最小限の切削で除去が可能



PR-245T にて除去

Products Information

PRIMA DENTAL Prima Dental 社の 高品質バーシリーズ

PREDATOR® TURBO カーバイドバー

商品名 プレデターターボ

医療機器届出番号 13B1X00133000005

Special PR-3T, PR-DX

標準価格 各8,200円(税込9,020円) / 10本入 @820円/本

PR-2T, PR-557T, PR-1T, PR-330T, PR-245T, PR-1557T
PR-558T, PR-35, PR-701T, PR-702T, PR-2R, PR-4R
PR-6R, PR-8R

標準価格 各4,600円(税込5,060円) / 10本入 @460円/本

SL(サージカルレンジス) New 今秋販売予定

標準価格 各8,200円(税込9,020円) / 10本入 @820円/本
PR-2T SL, PR-1T SL, PR-557T SL, PR-2R SL



プレデターターボ PR 2T

新鋭な幾何学的形状を使用しスピーディーでスムーズな金属カットが可能

タングステンカーバイド一体型なので折れにくい (PR-6R, PR-8R は除く)

高精度に切削製造されたバーは回転軸、刃部の正確さで振動を減少

プレデターターボ PR-3T Special

品番	PR-3T
作業部幅 (1/10mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

金属除去用カーバイドバー (切れ味 UP)

プレデターターボ PR-DX Special

品番	PR-DX
作業部幅 (1/10mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

ボーセレンやメタルボンド除去用カーバイドバー (切れ味 UP)

プレデターターボ

品番	PR-2T	PR-1557T	PR-1T	PR-330T	PR-245T	PR-557T	PR-558T	PR-35	PR-701T	PR-702T
作業部幅 (1/10mm)	012	010	010	008	009	010	012	010	12.0	16.0
作業部長 (mm)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7	3.8	0.79	3.80	4.30

金属除去用カーバイドバー

プレデターターボ

品番	PR-2R	PR-4R	PR-6R	PR-8R
作業部幅 (1/10mm)	010	014	018	023
作業部長 (mm)	0.83	1.23	1.57	2.05

金属除去用カーバイドバー (PR-6R, PR-8R は一体型ではありません)

New

プレデターターボ SL(サージカルレンジス)

全長 25mm

品番	PR-2T SL	PR-1T SL	PR-557T SL	PR-2R SL
作業部幅 (1/10mm)	012	010	010	010
作業部長 (mm)	4.0	1.9	3.7	0.83

金属除去用カーバイドバー

PREDATOR® DIAMONDS

商品名 プレデタージルコニア

医療機器届出番号 13B1X00133000031

Z801-018F、Z856-018F、Z862-014F、Z368-023F、Z807-018F
Z801-018M、Z856-018M、Z862-014M、Z368-023M、Z807-018M

標準価格 各7,700円(税込8,470円)/5本入 @1,540円/本

Z856-018F、Z856-018M

標準価格 各1,700円(税込1,870円)/1本入

ジルコニアに限らず
メタルバンドやメタル
クラウン等の補綴物除去
にも高い切削力を発揮

特殊接着によりダイヤ
モンドの粒子の付着が
長期間持続されるので
消耗率が低い

均等なダイヤモンドを
均一に塗布することで
高い切削率と発熱を軽減



プレデタージルコニア Z856-018F

品番	801	856	862	368	807
作業部幅 (1/10 mm)	0.18	0.18	0.14	0.23	0.18
作業部長 (mm)	-	9.0	7.0	5.0	5.0
FINE (ファイン)	●	●	●	●	●
MEDIUM (ミディアム)	●	●	●	●	●

ジルコニアクラウン除去用ダイヤモンドバー

PRIMA® CLASSIC CARBIDE OPERATIVE BURS

商品名 プリマカーバイドバー

医療機器届出番号 13B1X00133000014

FG1/2、FG2、FG3、FG4、FG330、FG331、FG332、
FG1156、FG1157、FG1158、FG556、FG557、FG558、
FG1556、FG1557、FG1558、FG245

標準価格 各3,300円(税込3,630円)/10本入 @330円/本

高精度に切削製造された作
業部は迅速かつスムーズな
カッティングが可能

タンガステンカーバイド鋼一体型が
可能にした破損にくいネック部の
強度

タンガステンカーバイド鋼一体型の
形成用カーバイドバー



プリマカーバイドバー FG330

品番	FG 1/2	FG 2	FG 3	FG 4
作業部幅 (1/10 mm)	0.08	0.10	0.12	0.14

品番	FG 330	FG 331	FG 332
作業部幅 (1/10 mm)	0.08	0.10	0.12

品番	FG 1156	FG 1157	FG 1158
作業部幅 (1/10 mm)	0.08	0.10	0.12

品番	FG 556	FG 557	FG 558
作業部幅 (1/10 mm)	0.08	0.10	0.12


品番	FG 1556	FG 1557	FG 1558
作業部幅 (1/10 mm)	0.08	0.10	0.12

品番	FG 245
作業部幅 (1/10 mm)	0.09

PRIMA® CLASSIC MOUTH MIRRORS

商品特徴

- ・可視光 (455-492nm) の範囲で高い反射率
- ・診療中のストレス軽減
- ・患者さんに早く確実な診断を提供
- ・表面反射ミラーの低価格化を実現

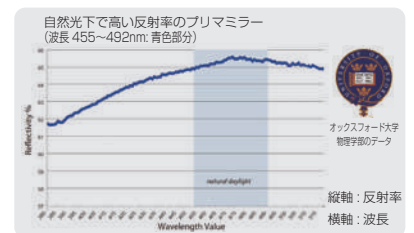

商品名 プリマミラー

医療機器届出番号 13B1X00133000042

サイズ2 サイズ3 サイズ4 サイズ5 サイズ6

標準価格 各2,800円(税込3,080円) 12個/箱 @233.4円/本

size 2
18mm

size 3
20mm

size 4
22mm

size 5
24mm

size 6
26mm


* 実寸大

プレデターターボは p.18 に掲載しています。

KAI コーティング替刃メス kai medical DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

製造販売元: カイインダストリーズ株式会社

低摩擦コーティングにより切れ味が向上し
脂肪の付着が低減されることで、
優れた切れ味が持続します。

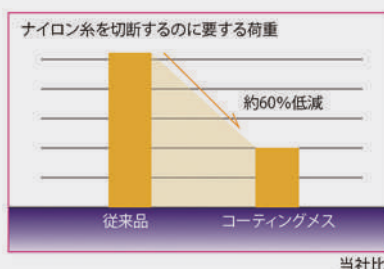

- 《材質》
- ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕様》
- ・ディスポーザブル (再使用禁止)
 - ・γ線滅菌済み
 - ・20枚入
 - ・10番台替刃の適合ハンドル: M3

商品名 KAI 替刃メス

医療機器届出番号: 219ABBZX00078000

20枚入 1,000円(税別)

1枚あたり 50円(税別)

	NO.10	1,000円(税込1,100円)
	NO.11	1,000円(税込1,100円)
	NO.12	1,000円(税込1,100円)
	NO.12B	1,000円(税込1,100円)
	NO.15	1,000円(税込1,100円)
	NO.15C	1,000円(税込1,100円)

DIRECTA シリーズ

DIRECTA 商品は、日々の臨床において歯科医師の専門性を上げ、快適な生活を実現することを目的に、スウェーデンや国際的に著名で品質にこだわった、選りすぐりの歯科医師チームによって評価研究し開発されています。



スウェーデンの歯科医師によってデザインされた
高品質なスウェーデン鋼使用

Luxator®

ラクセーター・プラス

【ラクセーター・プラスの使用方法】



1. 歯の長軸方向に
対して真直ぐに挿
入します
2. 歯に沿わせて歯
槽骨を圧迫しなが
ら歯周靱帯を切り
進めていきます
3. 根長の3分の2
程度切断していく
と楔効果により歯
を脱臼できます



ラクセーター・プラスによる
抜歯の使用感*
・無理のない抜歯ができる
・骨損傷が最小限の歯周靱帯切断
ができる

*当社実施アンケート結果より

商品名 ラクセーター・プラス 医療機器届出番号 13B1X00133000007

標準価格	
K4 (スタンダード 4 本)	41,000 円 (税込 45,100 円)
4 本セット (3C 3S 5C 5S) + シャーピングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
SK4 (ショートモデル 4 本)	41,000 円 (税込 45,100 円)
4 本セット (S2S 3C 3S 3CA) + シャーピングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
K7 (スタンダード 7 本)	68,000 円 (税込 74,800 円)
7 本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャーピングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
単品 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, S2S, 3C, 3S, 3S, 3S, 3S, 3CA, P1, P2, P3, P4	12,000 円 (税込 13,200 円) / 本
単品 1S, DE3, DE5	13,000 円 (税込 14,300 円) / 本
単品 3S チタン, 2S チタン	15,000 円 (税込 16,500 円) / 本
単品 DE3 チタン, 3A チタン	16,000 円 (税込 17,600 円) / 本
シャーピングツール	2,700 円 (税込 2,970 円) / 本


Luxator®

ラクセーター・フォルテ

- ・ラクセーター・プラスと同じ滑りにくい樹脂製ハンドルを採用
- ・通常のエレベーターとして使用可能
- ・ラクセーター・プラスの補完品として

【使用方法】

通常のエレベーターとして使用して下さい
・ラクセーター・プラスとした製品が異なります。
・オートクレーブ対応 (135℃)
変色することがございますが品質には問題ありません。

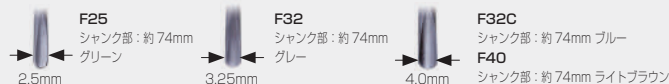

商品名 ラクセーター・フォルテ 医療機器届出番号 13B1X001330000024

！ラクセーター・プラスとは製品が異なります。標準価格 各 12,000 円 (税込 13,200 円) / 本
*ラクセーター・プラス (P シリーズ) は、p.16 に掲載しています。

ORSING



スウェーデンの歯科医院・大学で
広く使用されているハイゴフォーミック
排唾ラインに接続してしっかり吸引

Hygoformic®

商品名

ハイゴフォーミック

医療機器届出番号 13B1X001330000065

使用例 詳しくは動画を御覧ください


100 個入 (アダプター 5 個付き) 標準価格 1,480 円 (税込 1,628 円) @ 14.8 円 / 個



CR 修復用マトリックス
フェンダーメイト

FENDERMATE®

手軽にコンタクトポイントを形成できるマトリックス

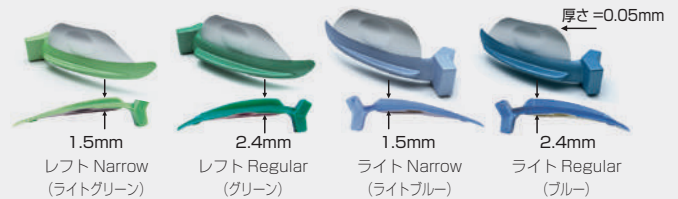

商品名 フェンダーメイト

医療機器届出番号 13B1X001330000028

アソート

標準価格 22,320 円 (税込 24,552 円)

(レフト N, レフト R, ライト N, ライト R 各 18 個) / 計 72 個 @ 310 円

単品 各 1 箱

標準価格 6,120 円 (税込 6,732 円)

(レフト N, レフト R, ライト N, ライト R) / 18 個 @ 340 円

単品バリューパック 各 1 箱


標準価格 26,000 円 (税込 28,600 円)

(レフト N, レフト R, ライト N, ライト R) / 100 個 @ 260 円

隣接歯保護用ウェッジ
フェンダーウェッジ・プロ

FENDERWEDGE®

手早く操作できるウェッジ

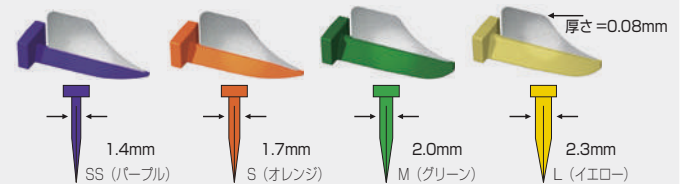

商品名 フェンダーウェッジ・プロ

医療機器届出番号 13B1X001330000029

アソート

標準価格 15,840 円 (税込 17,424 円)

(SS, S, M, L 各 36 個) / 計 144 個 @ 110 円

単品 各 1 箱

標準価格 4,320 円 (税込 4,752 円)

(SS, S, M, L) / 36 個 @ 120 円

単品バリューパック 各 1 箱

標準価格 9,000 円 (税込 9,900 円)

(SS, S, M, L) / 100 個 @ 90 円

ProphyCare®

プロフィーペースト Pro

- 1,000ppm フッ素含有
- 剥離しにくく、のびやすい
- ・中性の pH 値 (5~6 pH)
- ・爽やかなミント味
- 便利なラミネートチューブ
- ・絞りやすく、無駄にならない
- ・立てた状態で吸納が可能
- 院内感染対策、訪問診療向けに単回使用のカップタイプ (2g) が追加



商品名 プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X001330000027

チューブタイプ 60ml

各 1 本

標準価格

パープル

4,600 円 (税込 5,060 円)

ブルー、グリーン、レッド、イエロー

3,600 円 (税込 3,960 円)

アソート 4 本

ブルー、グリーン、レッド、イエロー

14,000 円 (税込 15,400 円)

単回使用 2g カップタイプ 144 個 / 箱

各 1 箱

パープル

18,000 円 (税込 19,800 円)

ブルー、グリーン、レッド、イエロー

14,000 円 (税込 15,400 円)

ORSING ケアシールド CareShield™

手軽にエアロゾル軽減

商品名 ケアシールド スターターキット

シールドリフィル×100枚、コネクター×5個 H6.5-11アダプター×10個

標準価格 28,000円(税込30,800円)

商品名 ケアシールド シールドリフィル

100枚入 単回使用 標準価格 23,000円(税込25,300円)

商品名 ケアシールド コネクター

5個入 標準価格 10,000円(税込11,000円)

商品名 H6.5-11アダプター

10個入 標準価格 5,000円(税込5,500円)

オートクレープ可能(134℃) 乾燥工程不可

商品名 U16-11アダプター

10個入 標準価格 5,000円(税込5,500円)

オートクレープ可能(134℃) 乾燥工程不可 *ケアシールド スターターキットには含まれませんシールドリフィル
* 単回使用コネクター
* オートクレープ可

外径 11mm

内径 11mm

外径 6.5mm

内径 11mm

外径 16mm

* 商品動画はこちらの QR
よりご確認ください

医療機器届出番号 13B1X00133000077

oro 低価格で高品質な感染予防シリーズ

Infection Control

ORO サージカルガウン (シート付)

- 厚手の不織布でしっかり感染予防
* ORO アイソレーションガウンよりさらに厚手になっています。
- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首と腰で結べる紐付き
- 高い撥水加工
- EO 滅菌済 (シート白、シート青を含む)
- ディスポーザブル
- 材質: smms 不織布

ニットカフ



滅菌バッグ入り

商品名 OROサージカルガウン(シート付)

標準価格 500円(税込550円)

OROサージカルガウン1枚、シート白2枚、
シート青1枚 (OROサージカルガウンを包んでいるシート)

*ベリトカード無し、首部分のマジックテープ無し

モデル: 身長 154cm ORO アイソレーションガウン、
ORO サージカルガウン (シート付) 共通の外観ユニットテーブルの上に
シートを広げたイメージシート白 25cm×25cm ×2枚
シート青 50cm×50cm ×1枚**ORO アイソレーションガウン**

- 厚手の不織布でしっかり感染予防
- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首と腰で結べる紐付き
- 高い撥水加工
- 未滅菌
- ディスポーザブル
- 材質: smms 不織布

商品名 OROアイソレーションガウン

標準価格 2,500円(税込2,750円) /10枚入/袋 @250円/枚

ORO ヘッド&ヘッドレストカバー

- コンパクトサイズ
- 髪の毛のボリュームがある方でもお使いいただけます
- ヘッドレストにも使用可能
- 帯電防止加工
- ディスポーザブル
- 材質: 不織布

*インド製

* ISO9001 / 13485 認証 幅 13.5cm 伸張性の高い不織布

商品名 OROヘッド&ヘッドレストカバー

標準価格 800円(税込880円) /100枚入/袋 @8円/枚

**CF アイソレーションガウン**

- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首紐と腰紐付き
- 撥水加工あり
- 未滅菌
- ディスポーザブル



ワンサイズ	着丈	身巾	肩巾	袖丈	腰紐
サイズ (cm)	110	134	64	56	210

商品名



CFアイソレーションガウン

材質: 本体部分 (不織布)

袖口 (ゴム) *ディスポーザブル

標準価格 1,500円(税込1,650円) /5枚入/袋 @300円/枚

輸入販売元: 株式会社三和

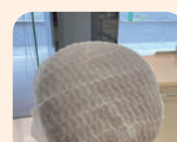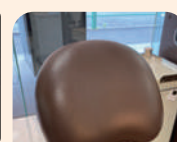CF ヘッドレストカバー

横200mm×高さ170mmのヘッドレストに装着

商品名

CFヘッドレストカバー

輸入販売元: 株式会社三和

標準価格 1,100円(税込1,210円) /100枚入/袋 @11円/枚

*梱包サイズ W/270mm×D/95mm×H/240mm

*ディスポーザブル

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで



術者保護エプロン



スウェーデンでは多くの歯科医院が導入患者にも使用可能な感染予防強化アイテム

3点シール留タイプの裏面
肩、ウエストシール位置
*2点シール留タイプは肩シールのみ



商品名 輸入販売元：株式会社吉田製作所

術者保護エプロン 2点シール留タイプ ライトブルー

標準価格 1,500円(税込1,650円)/100枚入 @15円/枚 *ティスポーザブル

術者保護エプロン 3点シール留タイプ ブルー

標準価格 1,900円(税込2,090円)/100枚入 @19円/枚 *ティスポーザブル

立体ポケット付患者エプロン

患者さんの感染予防に役立つ
立体ポケット付エプロン
*使用直前に裏返すことで
立体感ができます

表面
吸収性の高い
再生紙
裏面
防水性の高い
ポリエチレン
使用直前に裏返して
使う立体ポケット



商品名 輸入販売元：株式会社吉田製作所

立体ポケット付患者エプロン

標準価格 1,900円(税込2,090円)/100枚入 @19円/枚 *ティスポーザブル



Bio エプロン



FINISS

Bio エプロンは家庭ごみ、堆肥化のどちらでも捨てられる環境に優しいエプロンです。

*180日で堆肥化します
体全体を包む大きめサイズで安心
ロール式で1枚ずつ取出せる
清潔なパッケージ



BIO®

商品名 Bioエプロン

標準価格 3,000円(税込3,300円)/50枚入 @60円/枚

*ティスポーザブル

Dr Mark's
HyGenie®

スタイリッシュで頑丈なデザインでナイトガードやマウスピースなどを安全に保管
スポーツバックにも取り付けられ、持ち運び便利なデンタル携帯用ケース



デンタルクリーナー



商品名
デンタルクリーナー

本体サイズ：Φ90mm×85mm

商品名
デンタル携帯用ケース

本体サイズ：83mm×88mm×33mm




ナイトガードやマウスピースなどさまざまな歯科関連のアイテムをクリーニング可能。(対応幅<65mm)
全体を一度に簡単ブラッシングできる形状に加え、細かなところもケアできるテーパー状のブラシは、どんなが使用しても一定のブラッシング効果を発揮。手に馴染みやすいエルゴノミックデザイン。

ergo medi エルゴフィンガー

術者と患者さん双方に優しい
フィンランド生まれのバキュームアダプター
エルゴフィンガーのメリット

- エルゴノミックなデザインで、身体にやさしい
- バキュームのコントロールが簡単
- 操作性の向上で快適な診療
- アシストの必要が少なくなり経費削減
- 術者の不要な動作が減ることによる処置の効率化と時間短縮
- ティスポーザブルで患者さんへの感染予防を徹底

*アダプターチューブ 148mm
*直径 11mm のバキュームに対応
*サイズ選びの目安 女性 S-M サイズ、大きな手の男性 L-XL サイズ
*素材 PVC

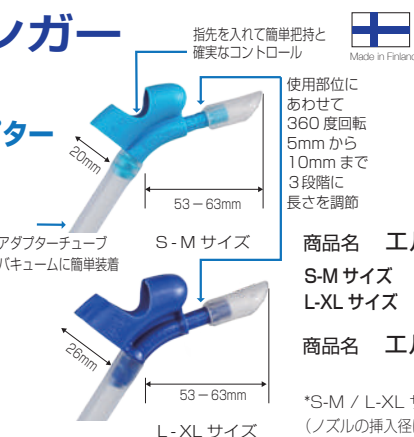

商品名 エルゴフィンガー 医療機器届出番号 13B1X0013300067

S-M サイズ 標準価格 9,900円(税込10,890円)/50個入 @198/個

L-XL サイズ 標準価格 9,900円(税込10,890円)/50個入 @198/個

商品名 エルゴフィンガー エアーフロー用ノズル

標準価格 2,400円(税込2,640円)/50個入 @48/個

*S-M / L-XL サイズ共通
(ノズルの挿入径は同じ大きさです)

エアーフロー用ノズルの使用方法動画は
こちらをご覧ください



Naturheilpraktiker (自然療法士) がいるスイスを代表する歯磨剤
創業 70 年の製薬会社 Dr.Wild が誇る
ティーツリー * 配合の自然派オーラルケア

ティーツリーの新鮮な葉の部分だけを蒸留して捕集し、原料の重量に対し、たった 1~2% だけしか取ることができないと言われているティーツリー * を約 2% も含んだ歯磨剤がティーボドントです。

ペーストタイプは研磨剤成分を含んでいるため、ブラッシングによるホワイトニングに効果的で、またう蝕予防、口臭予防にもおすすめです。

ジェルタイプは、天然成分が配合された自然派の歯磨剤であり、防腐剤や研磨剤が含まれていないため、口腔粘膜や歯面に化学物質が及ぼす影響を気にされる方にも、自信をもっておすすめいたします。

* ティーツリー葉水 (香味剤)



ジェル タイプ



ペースト タイプ

商品名

ティーボドント ペースト (75ml)

ティーボドント ジェル (18ml)



ポスター・POPカード・待合室動画のご案内

クロスフィールドホームページにて、クリニックでお役立ていただける POP やポスター、動画等をダウンロードしていただけます。是非ご確認ください。

クロスフィールドホームページ内ダウンロードページよりご利用いただけます。 <https://www.crossf.com/download.html>



■ ポスター * () 内は用紙サイズの表記です

NEW



TePe (A3)

NEW



TePe SDGs (A4)



プロフィーペースト (A3)

NEW

エルゴフィンガー
感染予防対策 (A4)

TePe 歯間ブラシ (A4)

キッズ歯みがきカレンダー
(A4)

これらのポスターは印刷して配布しております。詳しくはディーラーさんまでお問い合わせください

■ POP カード

NEW



アベビータプロテクトマスク 2.0



TePe スプリーム



TePe セレクト



TePe 歯間ブラシ



TePe GOOD



ティーボドント

■ 待合室用動画



アベビータプロテクトマスク 2.0

TePe 製品紹介動画
(イージーピックあり)TePe 製品紹介動画
(イージーピックなし)

TePe GOOD

Follow us!!

最新情報はこちらをチェック！



＜アクセス方法＞
クロスフィールドのホームページにアクセス→
ページの左上「ホーム」ボタンをクリック→
ページの左側
「テペお取り扱い医院検索」をクリック

クロスフィールドホームページのテペお取り扱い医院検索

貴院の情報を掲載しませんか？登録は無料です。詳細はお問い合わせ下さい。



テペお取り扱い医院登録
お申し込みフォームは
こちらをご覧ください



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋 1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

製造販売元：株式会社吉田製作所

URL: <https://www.crossf.com>

E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

