

Dental World

cf CrossField

クロスフィールド商品情報誌
デンタルワールド
www.crossf.com

28
2017 春号

私が理想とする排唾管ハイゴフォーマック

ブローナマルク オッセオインテグレーション センター (BOC) (東京都千代田区) 院長 小宮山 彌太郎・・・P1

ガムチャックスを使用して！！

若林歯科 (東京都渋谷区) 院長 若林 健史・・・P3

ガムチャックス 広告・・・P3

イージーピックは患者様に「歯と歯の間ってこんなに汚かったのか！」と気づきをもたらします

たきの歯科 (埼玉県ふじみ野市) 院長 山本 達也・・・P4

TePe イージーピック ホームケアを楽しく続けて欲しいから

若葉駅前歯科 (埼玉県鶴ヶ島市) 受付 木村 麻衣子・・・P4

新企画 TePe ポップデザインコンテスト開催！・・・P5

イージーピック 広告・・・P5

『ドライデントの様々な場面における有効性』

ネクスト・デンタル (東京都文京区) 院長 櫻井 善明・・・P6

当院では開業当初よりラバーダム下での診療が基本になっております

医療法人社団 翔西会 とおる歯科 (東京都町田市) 院長 今西 徹・・・P7

ぜひ使ってほしい小児歯科専門医考案のラバーダムフレーム

とのぎ小児歯科 (千葉県千葉市) 院長 外木 徳子・・・P8

小児用ラバーダムフレーム／ドライデント／フェンダーメイト 広告・・・P8

インプラント周囲炎を予防するために TePe シリーズで取り組んでいること

医療法人社団 有心会 クリア歯科 大阪院 (大阪府大阪市) 歯科衛生士 馬渡 恭子・・・P9

インプラントのプラークコントロール

東京医科歯科大学インプラント外来 (東京都文京区) 歯科医師 藤井 政樹・・・P11

脳科学マーケティングの手法を用いた TePe ブランド物販促進術

細田歯科医院 (東京都葛飾区) 副院長 中原 維浩・・・P12

TePe 広告・・・P13

スウェーデンで使用されているトレースシステム

池袋同仁歯科クリニック (東京都豊島区) 院長 河合 良治・・・P15

ブラクティブアル トレー／スウェーデン歯科研修 2017 広告・・・P16

プロフィーペースト Pro / プロフィーカップ Pro / クロスプロ 広告・・・P17

『MI パンチ』の開発経緯、製品コンセプト、使用方法に関して

加来デンタルオフィス (大分県大分市) 院長 加来 慶久・・・P19

MI パンチ 広告・・・P19

『Simple is the best!』口腔外科手術を伴う歯科治療におけるトルクコントロールの活用




日本大学松戸歯学部 顎顔面外科学講座 専任講師 伊藤 耕・・・P20

患者様と医院様のための便利アイテム・・・P21

プレデターターボ / GP トリマー / ラクスエーター / プラス / ボンスクレイパー / フレキシブル ペリオトーム / トロール咬合紙 / マルチクリーナー / アスビジェクト / シス / プレデタージルコニア / トルクコントロール / アプリケーター / ネオ / フォスバイキング / ダイヤモンドバー / ホワイトマジック / ワムキークラウンリムーバー / MD ガイド / FRS 破折ファイル除去インスツルメント / ビュアリフレクト ミラー / スティックンプレイス

Coming Soon ロックス 広告・・・P23

NEW products ハイゴフォーマック / ポリシェット 広告・・・P23

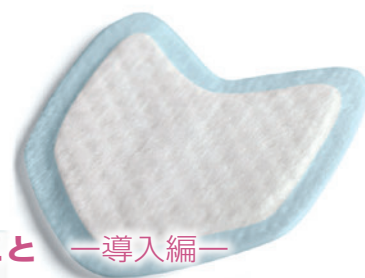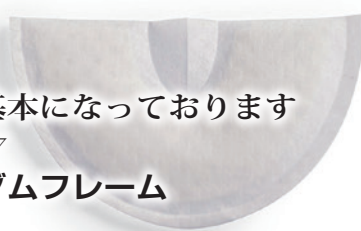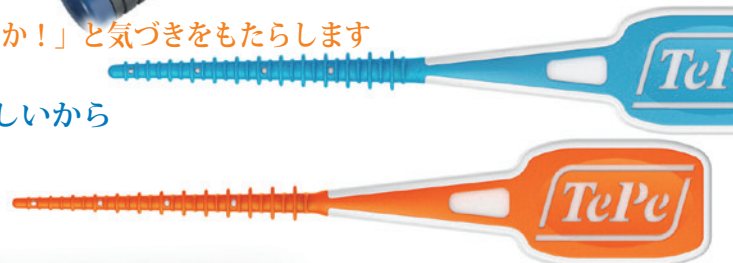

私が理想とする排唾管ハイゴフォーマック

今日の歯科診療において、サクシオン・チップがいかに我々の臨床に不可欠かは言うまでもない。

しかしながら、45年前の大学の臨床実習では、科によってはそれが設置されていない診療用チェアが使われていたが、その代わりに水道水の水圧を利用した排唾管が備わっていた。常時、口腔内に設置して応用される排唾管の先端は、口腔底の粘膜に優しく接するように球状あるいは体積を大きくした形状を呈し、金属製の管に接続されていた。口腔外科の外来診療室の中央の島には、常時、煮えたぎっているシメルブッシュ煮沸消毒器が何台も置かれており、外来における小手術などに用いる器具は、その程度の消毒でも許される時代であった。大学における臨床実習においては、木綿製のエプロン、金属製カップ、金属製排唾管（図1）に代表されるような使い回しのものが一般的で、ディスポーザブルの道具については、メスの刃先を除いては“もったいない”との考えからか、あまり流通していなかったように記憶している。

今をさかのぼること35年以上も前、スウェーデン、イエテボリ大学の補綴科に在籍していた際、人手を省くならびに感染の危険性を減らすことが主目的で、多

くの用具がディスポーザブルであり、少なからずショックを受けたことを思い出す。日本の大学にいた時には、しごく当然と何の疑問を抱かなかったことが、よく考えてみると好ましくないことに気付かされた。例えば、レジン製各個トレーに接着剤を塗布する場合に、キャップに付いたブラシをためらいもなく使っていたが、これは、「歯科医師の中で、もっとも衛生観念に乏しいのが補綴科医」との表現が、あながち的外れではない一例かもしれない。すでに、イエテボリ大学では綿棒を何本も用意しておき、それで次々と新たな綿棒に交換しながら塗布を進めることが行われていた。現在、私どもでは綿棒がもったいないので、接着剤の瓶からトレーの内面に適量を滴下し、それを1本の綿棒で払うことをしている。本題に戻り、**排唾管についても、同様に衛生観念について考えてみたい**。従来からの金属製のものでは、先端が球状に加工されるだけではなく、なかには可動部分を備えたものもあり、使用後にウォッシャー・デイスインフェクターなどで適切に洗浄される場合を除き、**前の患者の汚れが完全に除去された保証はない**。加えて、これらのものでは長時間にわたり口腔内に応用されると、金属製本体だけではなく、ホースの重さを含めた**全重量が先端部分に加わり、口腔底粘膜の疼痛**

を訴えるといった欠点も見られた。

このような問題点を解消するものとして、スウェーデン製ディスポーザブル排唾管 Hygoformic（ハイゴフォーマック）（図2）が存在する。以前から、わが国でもスウェーデン製の同様の製品が販売されていたために使用してきた。ことに、連続して多量の注水を行う支台歯形成時にはきわめて有用で、**効率良く吸水してくれるだけではなく、患者への負担が少ない**。患者の前では憚られるが、昔から個人的には、その形態から“ネズミの尻尾”と称していた。その先端近くの渦巻き部分は自由に変形することが可能なため、**患者に嘔吐反射を起こさずにもっとも効率良く吸引する形に調節できる**（図3）。その部分には先端だけではなく、側面にも5か所の小孔が穿たれているために、効果が持続する。また、**コの字状の部分を調節して下顎を挟むことで、使用中にその位置がずれることを防いでくれる**。そして先端を口腔底に設置することにより舌を排除でき、あるいは頬側に置くことで頬粘膜を排除することが可能となる。

また、多量の生理食塩水で冷却するインプラント埋入手術時にも有効で、咽頭部に溜まった冷却水をそれで吸引させれば、アシスタントは創面すなわち粘膜骨膜弁

（図1）



（図2）



ブローネマルク
オッセオインテグレイション・センター (BOC)
(東京都千代田区)

院長 小宮山 彌太郎



内の出血あるいは冷却水の吸引に専念すれば済む。手術室が備わっている施設では、2系統のサクションが使えるが、一般的な診療室のチェアではそれが難しいことが多い。そのような状況にあっては、このハイゴフォーマックを滅菌バッグに入れて、ガス滅菌したものを用いる（図4）。

その材質には環境ホルモンとしての可能性が取りざたされている、PVC（ポリ塩化ビニール）が含まれていないことから、小児などへの影響ならびに廃棄後の環境汚染を考えないで済み、これは医療従事者としてはありがたい。

以前と比較すると、わが国の患者の衛生観念は格段に変わってきており、医療の現場でもわれわれの行動に目を光らせているようになってきた。感染対策には十分に力を注いでいることをアピールするためにも、このようなディスポーザブルの製品を患者の目前で装着し、使用後は廃棄している姿を見せることが、医療現場での真のサービスと言えるのではないだろうか。



ブローネマルク・オッセオインテグレイション・センター (BOC)

(図3)



(図4)



ガムチャックスを使用してみて！！

フロスの習慣化は歯周病予防にもつながります。

日本はアメリカに比べフロスの定着率が少ないように思われます。現実に患者さんへフロスの指導をしても習慣化するのには難しく、特に指巻タイプフロスは何度指導しても習慣化につながらないケースが多数で困っていました。

ブラッシングだけでは全体の6割しか汚れを落とすことができず、残りの4割はフロス又は歯間ブラシをしないと全体のクリーニングができないと言われています。

ガムチャックスのヌンチャク型フロスは今までにない、2本の細長いハンドルで操作する新しいコンセプトのフロスです。

長いハンドルは口腔外から簡単に操作可能で、最後臼歯遠心も楽に届きます。

また、2本の細長いハンドルは口腔内で自由に動かすことが可能なので歯面の形態に沿わせて（C-シェイプ）効率よく清掃できます。患者さんが指巻フロスを使用して狭い口腔内で器用に歯面に沿わせることは難しく、ホルダー付のフロスも糸の長さが固定されているので歯面に沿わせることができません。これでは隣接面のみにあたり、隅角部等は清掃できません。その点、ガムチャックスの形態は理想的です。

また、使用後はハンドル後方についているボタンを押すことにより、ワンタッチでリフィルを取り外しそのままゴミ箱に捨てることができ、フロスを触る事が無いので衛生的です。

チップを外す時、面白いように遠くに飛んでいくので（飛びすぎ注意）お子さんでも楽しくフロッシングできます。



若林歯科
（東京都渋谷区）
院長 若林 健史



当院ではフロスの指導を行うときに指巻のフロスを指導した後に、ガムチャックスのオートクレーブ可能なプロ仕様のハンドルを用いて患者さんにフロッシング指導をしています。

指巻のフロスの指導時と比べてガムチャックスが容易に使用できるので、患者さんのモチベーションが上がるのが明らかに分ります。

当院ではガムチャックスの使用を積極的に勧めることにより、患者さんのフロスの習慣化につながりました。

今後も、簡単に・早く・確実にフロスができるガムチャックスを使用し患者さんのフロスに対するモチベーションを上げていきたいと思っています。



最後臼歯までしっかり届きます。




ガムチャックスのオリジナルキャラクター

Products Information



フロスをより楽しく！

パッケージを簡素化し、お求めやすい価格になりました！

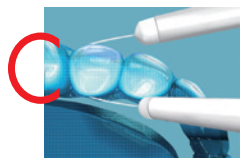

C-シェイプ

米国で多くの歯科医師、歯科衛生士が推奨する理想的な形です。

C-シェイプとは

歯間隣接面のカーブにフィットし歯間乳頭まで挿入、歯肉縁下までしっかりと効果的にプラークを除去します。



■ ガムチャックス スターターパック 10セット
ハンドル1セット、リフィル12個

■ ガムチャックス お試し パック
ハンドル1セット、リフィル3個 ×10セット



■ ガムチャックス 矯正用 スターターパック 10セット
ハンドル1セット、リフィル12個


■ ガムチャックス 矯正用 お試し パック
ハンドル1セット、リフィル3個 ×10セット

フックがワイヤーの後方に入り舌側から操作できます




■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

(@ 00円/00) はそれぞれの商品単価を表しますが、単品販売は行っておりません。

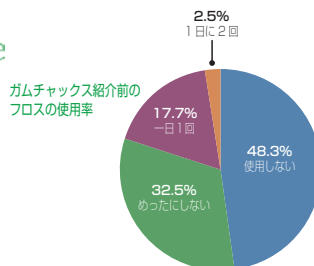

4ヶ月後
フロスを使用しない 48.3%
フロスを1日1回使用する 17.7%

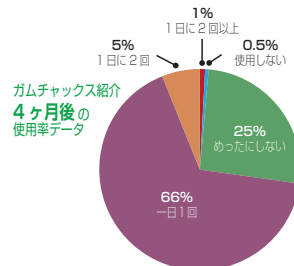

* 243名を対象に行った研究

引用文献：Research undergoing by M. R. Araujo, M.- J. Alvarez, & C. A. Godinho

イーザーピックは患者様に 「歯と歯の間ってこんなに汚かったのか！」 と気づきをもたらします



たきの歯科
(埼玉県ふじみ野市)
院長 山本 達也




歯間ブラシを使って頂くと、歯肉を刺してしまうことで、痛い思いをしてしまったり、出血をしてしまったりして、なかなか使ってもらえない患者様がどうしても一定数いらっしゃいます。また、そういう患者様に限って、プラークコントロールがとても難しくなります。そのような患者様にオススメなのが、このイーザーピックです。

ブラシ部分が柔らかいので、患者様の心理的にも使いやすいのか、ご紹介すると、こちらが入れ方を指導する前に、患者様自らご自身の歯と歯の間に持って行かれることが多いです。そして、歯間ブラシに比べてブラシ部分の色が派手なので、プラークの付着が目に見えやすく、「こんなに汚かったのか！」と、患者様に気付いて頂くことができます。

歯間清掃の習慣は、面倒臭いという理由でなかなか定着しにくいのですが、実際の汚れを見ることで、毎日の習慣につながっていくのではないかと期待しています。

薬局などでもやわらかい歯間ブラシは市販されていますが、それに比べて、ブラシ部分のポツポツが平べったくできているため、プラークの掻き出しも多く、ちぎれにくくなっているようで、市販のものよりも持ちが良いと患者様から喜ばれています。

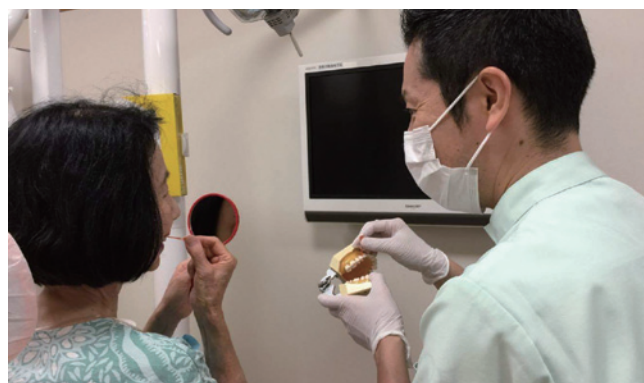

患者様に好評のイーザーピック

TePe イーザーピック ホームケアを楽しく続けて欲しいから



若葉駅前歯科
(埼玉県鶴ヶ島市)
受付 木村 麻衣子



今年に入り、様々なセミナーに参加し、これからの歯科治療に一番必要なのは予防歯科だと感じ、とにかく当院の治療内容に予防歯科を導入したいと思っていました。

しかし、それは思った以上に大変なことでした。虫歯の治療を希望される患者さまに、ホームケアの大切さを伝えるのは難しく、TBI やメンテナンスをしても、患者さまはなかなか取り組めないケースが多いのが現状です。

私は受付の立場から、「何かできないだろうか？」と悩んでいました。そんな時、あるセミナーでホームケアグッズを売り上げることが、院内の利益に大きなプラスになるという講演を聴くことができました。



患者さまを魅了するテペコーナー

「これなら、受付の私でもホームケアの大切さを伝えられるかも！」と思いました。早速院内に置いてあるグッズを見直しました。ちょうど TePe イーザーピックのサンプルが送られてきた時で、患者さまとの会話を思い出しました。「ワイヤーが痛くて」「歯間ブラシがうまく入らない」「ゴムの歯間ブラシがいい、市販のもいいでしょ？」と歯間ブラシに抵抗を感じる患者さまがいました。プロフェッショナルケアはケアのほんの一部で、毎日のホームケアのほうが重要です。

同じ頑張るなら、楽しみながら頑張ってもらいたいとの思いから、使いやすいイーザーピックとカラフルでかわいい TePe の歯ブラシなどを揃えました。

イーザーピックの使い方はしっかりと説明する必要がありますが歯間ブラシより歯間に入りやすく、シリコンだから痛くない、何より TePe は価格が嬉しい（笑）。

患者さまが「何色にしようかなあ」と楽しそうに TePe の歯ブラシを選んでくださっているのを見ると私も楽しくなります。

TePe グッズで毎日のホームケアを楽しく続けていただけるよう受付でこれからもオススメしていきたいです。

新企画 TePe ポップデザインコンテスト開催！



医院でどんなふうに
TePe を紹介
していますか？

CrossField ポップコン

TePe POP Design Contest

TePe のいいところ
好きなところを
お写真で教えてください。

ご応募いただきましたすべての医院様に

TePe の日本未発売イラストシリーズ歯ブラシ等 TePe グッズをプレゼント！！



イメージ




まつした歯科様 (長野県)



どう歯科医院様 (北海道)

永山歯科医院様 (北海道)

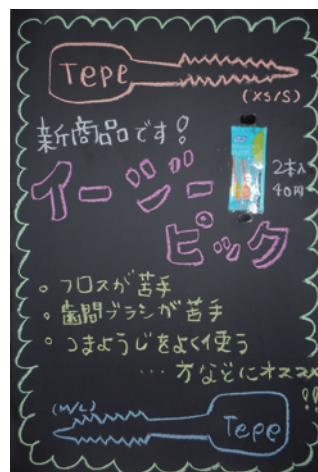

締切

2017年5月31日

● お申し込み方法 tepe-pop@yoshida-net.co.jp



上記のアドレス (または QR コード) より、医院様名、ご住所、ご担当者名をご記入の上、お写真とコメントを添えてお送りください。

後日、プレゼントを発送させていただきます。

● 発表


編集部が選んだすてきなポップの医院様は、本誌 29 号以降でご紹介させていただきます。

● 注意事項

- ・必ず、必要事項をすべてご入力の上、お申込みください。住所などの誤記入や長期不在などの理由から、お届けできず弊社に戻ってくるケースが発生しております。ご注意ください。
- ・お届けは、お申込みより 1 ヶ月以内を予定しています。お申込み多数の場合は、一部発送が遅れる場合があります。
- ・やむを得ない事情により、プレゼント内容が変更になる場合があります。ご了承ください。
- ・プレゼントの種類は選べません、予めご了承ください。
- ・ご入力いただきました個人情報につきましては、社内で適切な安全対策のもとに管理し、漏洩などの防止に努めます。お客様の同意なく第三者への開示・提供はいたしません。



Products Information

イーザーピック EasyPick™

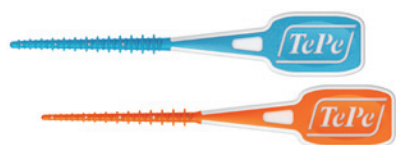

M/L

XS/S

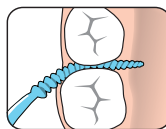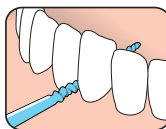

シリコンタイプのしなやかなピックが歯間に挿入しやすく、歯肉にもやさしい使い心地
* 使用時は適切なサイズを選び、無理に歯間に挿入しないでください

ブリスターパック

トラベルケース



M/L
(ブルー)

XS/S
(オレンジ)



① 36本入りブリスターパック
携帯に便利なトラベルケース付き

XS/S (オレンジ)
M/L (ブルー)
10パック/箱
1パック単サイズ 36本 + トラベルケース 1個

ディスペンサー



② 2本入りパック ディスペンサータイプ
H 19.5×W 12.5×D 10.8cm

XS/S (オレンジ)
M/L (ブルー)
100パック/箱
1パック単サイズ 2本

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで



『ドライデントの様々な場面においての有効性』

歯科治療において、重要だが厄介な処置の一つとして挙げられるのが「唾液の排除」ではないだろうか。これは、接着障害、または細菌のコンタミネーションの原因となるからである。一般的な解決策として、ラバーダム防湿があるが、咬合面のみからのアプローチが可能な治療かつ、歯冠形態がしっかり保たれている状態でなければ完全なラバーダム防湿は難しいと考える。逆に複雑窩洞のインレーセット、フルクラウンのセット、5級のCR充填など、ラバーダム防湿をしたくても物理的に不可能な状況にも多々遭遇する。そのような場合には、ロールワッテなどで簡易防湿をせざるをえないが、ロールワッテは「舌で動かされてしまう」「歯冠側に上がってきてしまう」など、固定がしっかりできず、ストレスを感じる事が多々ある。

そこで使用するのが、このドライデントである。頬側用、舌側用は共にサイズが2種あり、患者の口腔内、用途に応じてさまざまに使い分け事ができる。ここではその頬側用の有効性を紹介していきたいと思う。

まず、ドライデント頬側用は耳下腺乳頭付近を覆う事により、唾液をほぼ排除することができるようになるだけでなく、頬粘膜とのフィットも良いため、ロールワッテのように歯冠側に上がってきて操作がしにくくなるという事が無く、治療に集中することができ、術者・患者共に快適であると言える。




さらに、根管治療前の隔壁作成時に威力を発揮すると感じている。しっかりした隔壁作成は確実なラバーダム防湿が行えるようになり、根管治療時

の誤飲防止、感染予防になるだけでなく、根管充填後、速やかに支台築造に移行する事が出来るため、結果的に時間の短縮に繋がると考える。



また、間接法によるセラミックスインレー、クラウンはメタルと違い、接着操作の差が予後に大きな影響を与えることは周知のとおりである。接着障害の要因はいろいろと考えることができるが、最も重要なのは「しっかり乾燥させること」と「コンタミネーションを減らすこと」である。そこでドライデントの使用により、効率的にこの二つの問題を解決することができる。

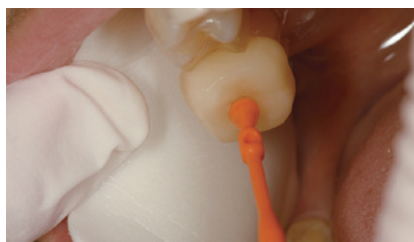


ネクスト・デンタル
(東京都文京区)
院長 櫻井 善明



このようにドライデントは、さまざまな場面で診療に大きく貢献する物と考える。

その他に、フッ酸処理やプライマー処理、セメント処理においても、接着面をグローブで触るのはコンタミネーションの原因となりうるので、筆者は同社のスティックプレイス (p22) を併用することをお勧めする。セラミックスインレー、クラウンの咬合面をしっかり乾燥させ、スティックプレイスを圧接することで把持しにくい形態のインレー、クラウンでもしっかり把持することができる。

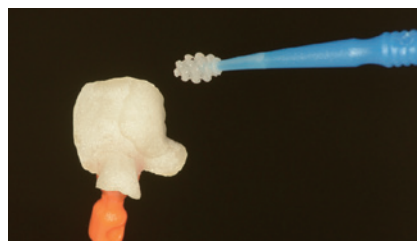

アプリケーター・ネオ (p22) を使用しプライマーを塗布



今後もコンタミネーションの観点から、ドライデントやスティックプレイス、アプリケーター・ネオのようなディスプレイ商品が歯科医療のさまざまな場面において必要となってくるだろう。

当院では開業当時よりラバーダム下での診療が基本になっております

医療法人社団 翔西会
とおる歯科
(東京都町田市)
院長 今西 徹



開業して14年、今まで既存のメタルフレームを使用してまいりましたが、この度、「小児用ラバーダムフレーム」の導入により、更に質の高い治療、時間の短縮、スムーズな診療が可能となりました。




・フレーム機能の有用性

顔貌曲面に合わせたフレームカーブ：呼吸を邪魔しない。

スムーズな開閉：正中部より開くことにより、パキュームを容易に入れられる。

以前までは、小児が嘔吐した際にはフレームを外し治療が中断する事もありましたが、フレームの開閉により嘔吐物を迅速に処理し、治療を継続することができるようになりました。

突起部の形状：ラバーダムの引っ掛かり具合がとても良い。外れにくくしっかりとラバーを張ってくれる形状となっている。

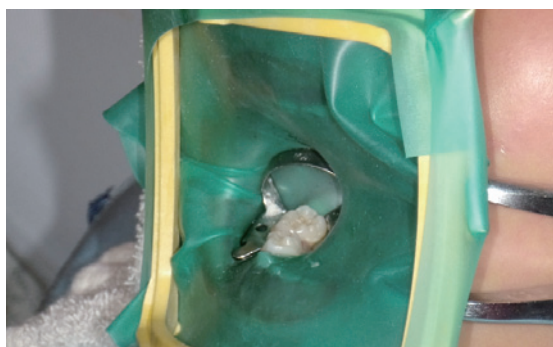

・黄色のプラスチック製ということで子供受けが良い点

治療台の周りを見渡すと、とにかく滅菌が必要なものが多くせいかステンレス製のメタルカラーが目立ちます。メタルカラーは小児治療においては、暗い色で怖く感じやすいので、極力避けたいものです。

当院では、ビヘイビアコントロール（Behavior Control）を実践しているのですが、怖いものをできるだけ怖くないように見せる為の工夫を実現させる為、明るい色のものをできるだけ使っていきたいと考えております。この明るい黄色のラバーダムフレームはこれまでのメタルフレームよりもお子様、親御様に非常に好評頂いております。

・1年目のスタッフの声（＾＾）

以前まで使用していたものは、ラバーがピンと張っている隙間から唾液を吸う際、クランプが外れてしまうこともありましたが、小児用ラバーダムフレームは開閉も楽に出来るので、そのようなことがなく唾液の管理がとても楽になりました。

1年目の私でも無理なく使用でき、お子様にも安心して治療に臨んでもらっています。



ぜひ使ってほしい小児歯科専門医考案の ラバーダムフレーム

さすが、小児歯科専門医が考案した
ラバーダムフレームだと思いました。

このフレームは、所々に低年齢児に対する配慮が感じられます。
例えば、今までの金属製のフレームと比較して、サイズも小さく、
黄色というかわいい色で子供たちに恐怖心を与えません。

私の診療室では、予めある程度ラバーをフレームに張ってから
歯牙にクランプを装着します。その手順で行なうと大体 30 秒
から 1 分の間でラバーダム装着ができます。

また、フレームの形状やツメの位置、サイズなどが工夫してある
ため、しっかりラバーを保持でき、水分が外に滴り落ちにくいです。
さらに、フレームが半分に折れ曲がるため口腔内の唾液の吸引
がとてもしやすく、患者さんもラバーを引っ張られる不快感が
なく快適だと言っています。

以前はサクション時に、クランプまで外れてやり直しを強いら
れることがありましたが、このフレームではありません。

ぜひ、診療の質の向上のためにも一度小児の処置に使ってみて
欲しいと思います。



処置時



ラバー装着時



吸引時は開いて使用

とのぎ小児歯科
(千葉県千葉市)
院長 外木 徳子



Products Information

小児歯科専門医、牧口哲英先生考案

小児歯科の安全、治療時間短縮を実現できる開閉式

小児用ラバーダムフレーム

唾液の吸引が容易な開閉式

フレームを外さず簡単にレントゲン撮影
急な嘔吐反射にも対応できる

- 容易にラバーを装着できる突起部
- こどもに人気の黄色いフレーム (ポリセタール樹脂)
- タッピングねじ (ステンレス鋼)



商品名

小児用 ラバーダムフレーム

医療機器届出番号 09B2X00010000349

標準価格 4,500 円 / 個 (税別)

製造販売元: 株式会社シオダ

DIRECTA



ドライデント



唾液などを吸収して
治療の効率化と患者さんの
心地よさを提供する
ドライデント

■ 頬粘膜用

#1

顎下腺に直接触れる
ことで多くの
唾液を吸収

#2

湿気や唾液を吸収し
理想的な乾燥状態を保てる

#3

エッジ部分は
患者さんが心地よい
柔らか素材

#4

吸収した湿気や唾液を
保持して変形しない



■ 舌下用

#1

舌下の湿気や唾液を
しっかり吸収

#2

短時間で湿気や唾液を
吸収し治療しやすい
乾燥状態となる

#3

嘔吐反射が出にくく
患者さんに
やさしいデザイン

#4

排唾管が必要な時に
クッションとなり
患者さんが心地よい



商品名 ドライデント

医療機器届出番号 13B1X00133000064

頬粘膜用 L

標準価格 1,450 円(税別)/50 枚入 (@29 円 / 枚)

頬粘膜用 S

標準価格 1,450 円(税別)/50 枚入 (@29 円 / 枚)

舌下用 L

標準価格 2,500 円(税別)/40 枚入 (@62.5 円 / 枚)

舌下用 S

標準価格 2,500 円(税別)/50 枚入 (@50 円 / 枚)

フェンダーメイト



小児用に早く簡単に安全な
隣接歯保護と修復をサポート

ロング

ネオングリーン

厚さ=0.10mm


ショート

ネオンイエロー

厚さ=0.08mm



舌側から差し込む
頬側からも可能

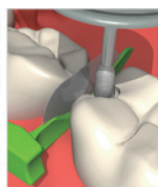

プレパレーション時に
隣接歯と歯肉の保護が可能



曲げられるマトリックス

商品名 フェンダーメイト

医療機器届出番号 13B1X00133000028

プライム アソート

標準価格 6,480 円(税別) @180 円

(プライムロング、プライムショート各 18 個) 計 36 個入

プライム 単品各 1 箱

標準価格 3,600 円(税別) @200 円

プライムロング(ネオングリーン) 18 個入り

プライムショート(ネオンイエロー) 18 個入り

インプラント周囲炎を予防するために TePe シリーズで取り組んでいること

—導入編—

私の勤務する有心会クリア歯科グループは全国に 10 医院と 2 つの技工所を構える歯科グループです。

う蝕、歯周病の保険診療はもちろん、インプラント・矯正・審美歯科と全てに包括した治療を行っています。



歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士の三者で、
歯間ブラシで清掃可能かどうかカンファレンスを行う



Dentist



Dental Hygienist



Dental Technician



TePe スプリーム

歯科医療従事者の私たちはどちらかというとプロフェッショナルケアに目を向けがちですが、**治療の成否の鍵となるのは患者さんが毎日行うセルフケアである**と言っても過言ではありません。

今回は当院で行っているインプラント患者さんのセルフケアに TePe シリーズを活用し、インプラント周囲粘膜炎及びインプラント周囲炎を予防するための口腔衛生指導について紹介します。

インプラント治療では歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士の緊密な連携が不可欠となります。

当グループでは三者で定期的な勉強会やディスカッションを行って、各セクションが多くの知識を共有し合えることを大切にしています。

インプラント周囲炎の予防は特にチームアプローチが重要とされています。

インプラント周囲炎発症にはいくつかの要因がありますが、歯肉炎が歯周病の前病変であるようにインプラント周囲粘膜炎がインプラント周囲炎の前病変であることは一般的にも知られています。しかし、必ずしもインプラント周囲粘膜炎がインプラント周囲炎に進行はしません。インプラント周囲粘膜炎が歯肉炎と同様に可逆性であると示す証拠もあります。ですから、私たちはインプラント表面のバイオフィルムを除去することがインプラント周囲粘膜炎の改善において優先すべき治療法と考えます。

インプラント周囲粘膜炎を予防できるように、セルフケアの重要性はもちろんインプラントの利点・欠点を再度患者教育させていただき、良好な状態で長期にわたり維持させていく為のモチベーションを図るようにケアグッズを紹介しセルフケアプランの立案をしています。


プロビジョナルレストレーション装着時は担当 DH による清掃性のチェックと清掃指導を行います。

インプラント埋入ポジションによってサブジンジバルカントゥアや補綴デザインは複雑な形態となります。全ての患者さんが解剖学的・構造的に理想的なセルフケアが行える環境下ではありません。

(図①)

インプラント埋入深度と近遠心的な埋入位置

図① 埋入位置によるサブジンジバルカントゥアの違い

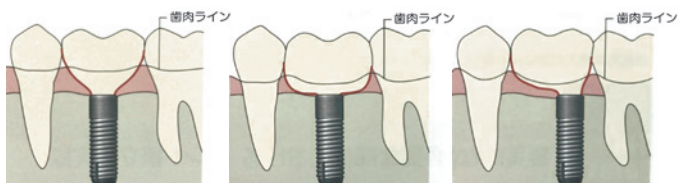

① 埋入深度も歯肉の厚みも十分な場合
(理想的な埋入位置)

② 埋入深度が浅く歯肉の厚みが十分でない場合

③ 埋入位置が近心または遠心寄りで歯肉の厚みが十分でない場合

参考文献 月刊デンタルハイジーン別冊

歯科衛生士のための臨床インプラント講座 天然歯との違いを理解する・考える・伝える

山口 幸子著

医療法人社団 有心会
クリア歯科 大阪院
(大阪府大阪市)
歯科衛生士 馬渡 恭子



歯周病患者におけるインプラント上部構造は歯冠長が長くなり、またオーバーカントゥアになることが多いためインプラント周囲溝までしっかり届きブラークを除去しやすいテーパー毛を選択しています。

また角化粘膜が少ないため天然歯と比較してインプラント周囲粘膜は歯肉の損傷を起こしやすいため軟毛の歯ブラシを選択しています。(写真②)

TePe スブリームは長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造になっており、長い毛先がインプラント歯肉溝まで到達しやすく短い毛先は歯肉に優しく当たるように加工が施されていますのでソフトにフィットしてくれます。優しいだけでなく毛密度の高さがしっかりとした磨き心地を与えてくれるため、歯ブラシ圧やストローク圧のコントロールも指導しやすいように思います。(写真③)

プロビジョナルレストレーションから最終上部構造の作製に入るまでに、適切なブラークコントロールができているか、患者さん自身のブラッシングスキルや補綴デザインの修正が必要ないかを、三者のチームワークを活かして、私たち歯科衛生士が情報収集した内容を歯科医師と歯科技工士に報告するようにしています。


歯間部の鼓形空隙は食渣やブラークの停滞を助長せず且つ患者さん自身が清掃可能な形態や大きさであるか、TePe エクストラソフト歯間ブラシを用いて確認するようにしています。エクストラソフト歯間ブラシは通常の歯間ブラシよりもブラシが柔らかく歯肉の損傷や退縮、疼痛を防いでくれます。またプラスチックコーティングされたワイヤーはインプラント補綴物やアバットメントを傷つけないため、インプラント患者さんへも推奨しています。(写真④)

インプラントもメンテナンス時代到来の現在、長期的に良好な予後をもたらすためにはセルフケアの状態が大きく関与しています。私たち歯科衛生士がメンテナンスにおいて果たすべき役割を考えると、患者さんがご自身でブラークコントロールを行い易い清掃器具を提案し、またその使用方法を身に付けて頂くよう指導することが大きな役割のひとつであるといえます。



TePe エクストラソフト歯間ブラシ

写真②

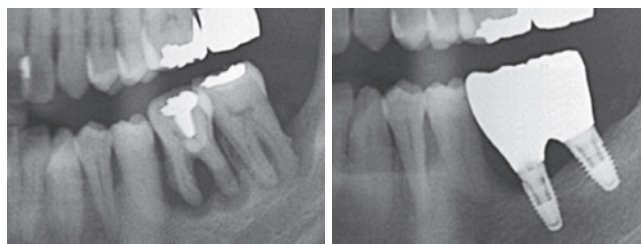

歯周病患者におけるインプラント上部構造は骨欠損が多いため歯冠長が長く、角化粘膜が少ないため清掃が困難である。

写真③



プロビジョナルレストレーションが装着されてから、適切なブラークコントロールが行えているかはもちろん、咬合・咀嚼・発音・審美面・頬粘膜や舌などを咬まないか情報収集を行う。



テペスブリームはテーパー毛とラウンド毛の2段階毛になっておりインプラント歯肉溝に届きやすく角化歯肉が少ない薄い歯肉にも優しくフィットする。

写真④



プロビジョナルレストレーション装着時の清掃性のチェックと清掃指導



アバットメントが露出している複雑な上部構造形態において歯間ブラシを指導する際は、プラスチックコーティングされたテペエクストラソフト歯間ブラシを使用しワイヤーによるアバットメントへの損傷を防ぐ。

ボンテック基底部へも歯肉損傷や歯肉退縮を生じさせないように清掃ができる毛先の軟らかさ。

インプラントのプラークコントロール

東京医科歯科大学インプラント外来
(東京都文京区)
歯科医師 藤井 政樹



1. インプラント周囲炎の増加

インプラント治療の普及とともに、当外来においてもインプラント周囲の炎症症状を主訴とする初診患者は増加しております。一般に歯周病の既往とインプラント周囲炎の発症には関連がありますが、天然歯には炎症が認められないにも関わらず、インプラント部位だけ炎症を発症している例も認められます。そのため、インプラントに対するプラークコントロールは天然歯と同等以上に注目する必要があると考えられます。

2. 歯ブラシに興味を持ったきっかけ

インプラント周囲炎の患者を多く担当し、ブラッシング指導を行うようになり、歯ブラシについて考えるようになりました。インプラントのプラットフォームは本来存在する天然歯より直径が小さいことに加え、その位置も既存骨量、歯肉形態、歯列弓形状、そして対合歯との対向関係等に制約を受けます。そのため上部構造はクラウンカントゥアが強くなる傾向があり、清掃しにくい部位が生じやすいです。できるだけ清掃しやすい補綴物の設計を心がけていますが、そのためには歯ブラシの特性や患者視点での使い勝手などを理解する必要性を感じました。

3. TePe インプラント・矯正用ブラシとインプラントケア

毛束の多いブラシはインプラント上部構造の豊隆部にブラシの毛先が干渉し、プラットフォーム部にブラシが当たりにくい傾向を感じます。毛束が少ない方が到達性が良好なため、インプラント・矯正ブラシ（2列ブラシ）を推奨する例が多いです。



インプラント・矯正ブラシを使用

そしてその補助としてインプラントケアの併用を推奨しております。当初は上下顎前歯部の舌側、口蓋側も2列ブラシを用いて指導していましたが、同部位は上部構造の豊隆部や切縁に歯ブラシの柄や毛束が干渉する傾向があり、清掃困難でした。インプラントケアは歯ブラシの柄が湾曲しており上部構造の豊隆や切縁に干渉されにくい傾向があります。一見すると複雑に見えますが、軸に対するブラシの毛先の位置が工夫されているため、歯面に押し付けるだけで毛先が垂直に当たる構造となっており、手や腕が楽で高齢者にとっても使いやすいようです。



インプラントケアを使用

頬側はインプラント・矯正ブラシ（2列ブラシ）（写真1）、前歯部領域の舌側口蓋側・最後方のインプラントの遠心はインプラントケア（写真2）、近遠心は歯間ブラシ（写真3）を用いると、非常に効率的な清掃が行えると思います。

歯間ブラシはワイヤーがプラスチックコーティングされているインプラント用のものを推奨しております。テペの歯間ブラシはストレート形状のものをカーブをつけて使うように設計されており、ブラシ先端の位置をイメージしやすく、口腔内の立体空間の把握が苦手な患者さんには特によい効果を得ています。

（写真1）



（写真2）



（写真3）



インプラント周囲炎対策は治療から予防へとシフトすべきと考えております。

当外来における経験が、患者にとって使いやすく効率的な清掃器具を選択する一助となりますと幸いです。

脳科学マーケティングの手法を用いた TePe ブランド物販促進術

細田歯科医院
(東京都葛飾区)
副院長 中原 維浩



TePe と私の出会い

卒後約5年勤務した医院ではTePeしか歯ブラシの取り扱いがなく、最初はこんなにヘッドの大きな歯ブラシが日本人の口にあうのかと思っていましたが、自分で実際にTePe歯ブラシで歯を磨いた時の磨き心地が初体験の感覚で、歯面のツルツル感が爽快で気持ち良いと思いました。また、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシの種類の豊富さ、デザインなどに惹かれ、その後アングルタイプの歯間ブラシが出て多くの患者さんにも受け入れられるようになりました。

また特徴的なデザインのタフトブラシ（コンパクトタフト）もTBIにすごく役立ちました。スウェーデン歯科衛生士会会長イボヌ・ニプロム氏、TePe社の担当者からの講義を直接受けられたのも、長くTePeを使い続けている要因の一つです。

脳科学マーケティングとの出会いと活用方法

さて、「ニューロマーケティング」という言葉は聞いたことがありますか？

脳科学（ニューロ）マーケティングとは、fMRIを利用し脳の活動の働きを神経科学的に分析して、その知識を活用してマーケティングと商品の両方を改善し、消費者に購買行動を起こさせるポイントを学

ぶことです。現在の日本は巨大オーラルケア市場を抱え、伸び盛りの分野の一つとして注目されています。

2015年度のとある調査では、歯ブラシ販売金額はドラッグストアなどの一般市場が約510億円に対し、歯科医院では135億円と、一般市場の26%しか売れていません。

本来ならば、「予防歯科」が少しずつ根付いてきたので、もっとセルフケアを推進し、各患者さんに合わせたオーダーメイドの口腔ケアグッズを処方できる強みを生かし歯科医院で口腔ケアグッズを買ってほしいものです。

当院では、このニューロマーケティングを様々なところに活用し、物販に活かしています。

例えば、値段の表記はあえて「キリのいい数字」を避けて、見やすく「324円」のように表記します。「¥324」ではないのがポイントです。

また、物販棚も買いたくなるディスプレイになるよう、様々な工夫をしています。


まずは商品はどんどん手に取らせるようにします。洗口コーナーにはサンプルを置いて気軽に使えるようにしています。また、様々なセット販売などを用意したり、実際に使用してもらった患者さんのコメントをいただいて、紹介するようにしています。

さらに、チェアサイドでも、実際にTBIの時にオススメ商品を使い、まずはサンプルを差し上げています。気に入っていただいた場合は、院内にある口腔ケア商品用処方せんを書いてあるので、患者さんが「前のアレ」とか、「この前もらった（買った）アレがほしい」などを言ってきた場合も、受付ですぐに対応できるので、常連の方々は毎月診察がなくても買っていくことができます。

特にクロスフィールド(株)で取り扱いの「テペ歯間ブラシ・チェックシート」は私が勤務医時代に原案を出して製作に携った非常に優れたものです。

ここに書いたのは、ごく一部ですが、このニューロマーケティングの手法を使って物販売上げが上がると、スタッフに還元します。そして業者さんも売上高アップで喜びます。そして何より自分にあった口腔ケアグッズを使ったださる患者さんが幸せになります。win-win-winの関係が生まれます。

今後も、さらにこの分野の研究は進んでいくと思います。私も全国各地のセミナーなどでこのような講演をしています。ご興味のある方は是非お問い合わせください。

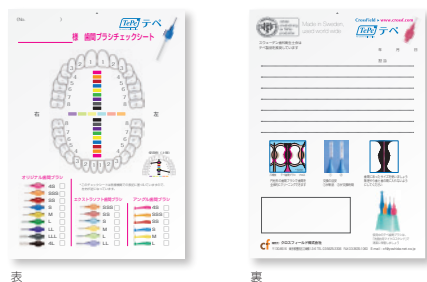

テペ歯間ブラシ・チェックシート

TePe IDB Check Sheet

オリジナル歯間ブラシ・エクストラソフト歯間ブラシ・アングル歯間ブラシに共通で使えます。

■ テペ歯間ブラシ・チェックシート
200枚/包

A5サイズ (H 21 × W 14.8cm)



当医院のカラフルで目をひくディスプレイ



予防歯科の先進国スウェーデンから

テペの歯ブラシは、独特の台形状ブラシヘッドと、自然に最良のグリップを得られるハンドルによって効果的なブラッシングができます。

また、毛先にはラウンド加工が施されており、快適なブラッシングを可能にします。




スウェーデンの薬局で購入されている歯ブラシの **77.1%** はテペ製品です
Nielsen, pharmacy total, MAT TY(toothbrushes), 2015

テペ・歯ブラシの特徴



■ テペのブラシヘッドは白歯部に届きやすいように先端が細くなった台形状にデザインされています


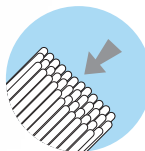


■ テペ独自の特殊製法により、歯と歯肉に優しいラウンド加工が施されています

スプリーム歯ブラシの特徴



■ 2層構造のブラシ先端部

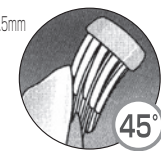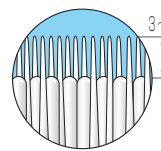

■ 45°の角度で歯頸部に160-200gの圧であてるのが効果的です

プリスターパックが仲間入り！



セレクト Select

お手頃な価格で高品質なテペのスタンダード。密でコシのあるフィラメントが効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。



色はアソートになります

■ セレクト ミディアム	25本/箱
■ セレクト ソフト	25本/箱
■ セレクト エクストラソフト	25本/箱
■ セレクト ソフト プリスターパック	12本/箱
■ セレクト エクストラソフト プリスターパック	12本/箱
■ セレクト ミディアム 100本入り	100本/箱
■ セレクト ソフト 100本入り	100本/箱
■ セレクト エクストラソフト 100本入り	100本/箱

セレクトコンパクト Select Compact

ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。お子さんや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。



色はアソートになります

■ セレクト コンパクト ミディアム	25本/箱
■ セレクト コンパクト ソフト	25本/箱
■ セレクト コンパクト エクストラソフト	25本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト プリスターパック	2本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト プリスターパック	12本/箱
■ セレクトコンパクト ミディアム 100本入り	100本/箱
■ セレクトコンパクト ソフト 100本入り	100本/箱
■ セレクトコンパクト エクストラソフト 100本入り	100本/箱

セレクトミニ Select Mini

セレクトコンパクトよりさらに小さいミニサイズで、乳歯のお子さんに最適です。お子さんはもちろん、仕上げ磨きをする大人の方にも持ちやすいハンドルになっています。



色はアソートになります

■ セレクトミニ ソフト	25本/箱
■ セレクトミニ エクストラソフト	25本/箱

コンパクトタフト Compact Tuft

コンパクトなドーム状のブラシ。フィラメントが短く非常にソフトなので、柔軟性と安定性に優れています。また、先がとがっていないので、萌出歯の裂溝やインプラントのヒーリングキャップ、また義歯のアタッチメントの周りなどの繊細な部分を優しく磨くことができます。



色はアソートになります

■ コンパクトタフト	25本/箱
------------	-------

スプリーム Supreme

長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造。長い毛先が歯間部や歯周ポケット、補綴物や矯正器具の隙間などの細かな部分に到達し、同時に短い毛は歯面をすっきりと磨き上げます。また、ソフトな磨き心地がお好みの方にも最適です。



プリスターパックが仲間入り！



矯正患者さんにも



色はアソートになります

■ スプリーム	20本/箱
■ スプリーム プリスターパック	12本/箱
■ スプリーム 80本入り	80本/箱

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

ノバ Nova

角度がついた先端のフィラメントが特徴的なノバ歯ブラシは、最後臼歯遠心や小窩裂溝、または養生部などへのアクセスに優れています。スプリームと同じ、滑りにくいハンドルが特徴です。



先端のチップで
最後臼歯遠心に当てやすい



色はアソートになります

■ ノバ ミディアム	20本/箱
■ ノバ ソフト	20本/箱
■ ノバ エクストラソフト	20本/箱


i スウェーデンの薬局で購入されている歯間ブラシの **82.3%** はテペ製品です
Nielsen, pharmacy total, MAT TY(interdental brushes), 2015

オリジナル歯間ブラシ、エクストラソフト歯間ブラシ、アングル歯間ブラシ の特徴


■ 円柱形のブラシは歯間を広げにくく、口蓋側・舌側もクリーニングできます。

■ メタルワイヤーはプラスチックコーティングされているので歯や歯肉にやさしいです。

マルメ大学との提携で人間工学に基づいて作られた持ちやすいハンドル。
全部で3種類、幅広いサイズからお選びいただけます。

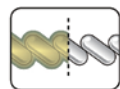

■ 歯間ブラシで、歯間を全体的にクリーニングできます

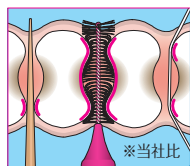

爪楊枝 テペ歯間ブラシ フロス



① ②

交換の目安

- ① が新品
- ② が交換時期

オリジナル歯間ブラシ

Interdental Brush Original

メタルワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスチックでコーティングされ、サイズは9種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。



キャップはハンドルとして使用可能

- 8本入りパック 10パック/箱
1パック単サイズ8本+キャップ1本入り(グレー、ブラックはキャップなし)
- アソートパック 10パック/箱
1パック各サイズ8本(ブラックを除く)+キャップ1本入り
- 25本入りパック
1パック単サイズキャップ付25本入り(グレー、ブラックはキャップなし)
- 単品パック(キャップ付き)150本入り 150本/箱

エクストラソフト歯間ブラシ

Interdental Brush Extra Soft

通常の歯間ブラシよりもブラシがやわらかく、歯肉炎、知覚過敏、インプラントなどの外科処置後の患者さんに適しています。



- 8本入りパック 10パック/箱
1パック単サイズ8本+キャップ1本入り
- アソートパック 10パック/箱
1パック8本入り構成内容
バステルオレンジ1本、バステルレッド1本、バステルブルー2本、バステルイエロー2本、バステルグリーン1本、バステルパープル1本+キャップ1本入り
- 25本入りパック 1パック単サイズキャップ付25本入り

スペシャルケア Special Care

とても柔らかいブラシで、口腔外科手術後や知覚過敏、シェーグレン症候群など歯肉が非常に敏感な段階、また粘膜ケアなどに適しています。スペシャルケアは約12,000本のフィラメント、スペシャルケアコンパクトは約7,000本のフィラメントを使用しています。



■ スペシャルケア(レッド) 25本/箱



■ スペシャルケアコンパクト(ブルー) 25本/箱

ISO ブラシサイズ	0	1	2	3	4	5	6	7	7
日本サイズ	4S	SSS	SS	S	M	L	LL	LLL	4L
ワイヤーサイズ	0.4mm	0.45mm	0.5mm	0.6mm	0.7mm	0.8mm	1.1mm	1.3mm	1.5mm
オリジナル 歯間ブラシ									
	ピンク	オレンジ	レッド	ブルー	イエロー	グリーン	パープル	グレー	ブラック
	バステル オレンジ	バステル レッド	バステル ブルー	バステル イエロー	バステル グリーン	バステル パープル			
エクストラ ソフト 歯間ブラシ									
	ピンク	オレンジ	レッド	ブルー	イエロー	グリーン	パープル	グレー	ブラック
	バステル オレンジ	バステル レッド	バステル ブルー	バステル イエロー	バステル グリーン	バステル パープル			
アングル 歯間ブラシ									
	ピンク	オレンジ	レッド	ブルー	イエロー	グリーン	パープル	グレー	ブラック
	バステル オレンジ	バステル レッド	バステル ブルー	バステル イエロー	バステル グリーン	バステル パープル			

*オリジナル歯間ブラシ ピンク、オレンジ、レッド、ブルーはネック部分がよりフレキシブルになったG2タイプ。

インプラント・矯正ブラシ

Implant/Orthodontic Brush


長く、細いネックと2列のブラシで、インプラントの頬側・舌側からの歯頸部へのアクセス、また矯正装置の周りのクリーニングに適しています。



インプラントの頬側・舌側のクリーニングに



細いヘッドと長いブラシが、矯正装置周辺を清潔に保ちます

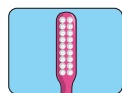

2列のブラシ

色はアソートになります

- インプラント・矯正ブラシ 25本/箱

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

インプラントケア Implant Care

独特な角度のネック部により、インプラントまたはブリッジなど大きな補綴物への口蓋側・舌側からのアクセスに優れています。また、舌側矯正装置周辺のクリーニングにも適しています。



通常のブラシでは届きにくい、インプラントの口蓋側・舌側へのアクセスが容易です



舌側矯正装置の周りに



色はアソートになります

- インプラントケア 12本/箱

スウェーデンで使用されているトレーシステム

スウェーデン研修で学んだ、院内のシステム作り。

池袋同仁歯科クリニック
(東京都豊島区)
院長 河合 良治



日本で【スウェーデン】と聞くと予防歯科を始め医療が進んでいるイメージがあるのではないのでしょうか。私もその一人でした。私のクリニックでは予防歯科のシステムを導入していますので、スウェーデンの歯科事情はとても興味深かったです。

ただ、どうでしょう。歯科医師がクリニックを1週間クローズして、予防歯科を勉強しに行くというのは。インプラント研修なら行く先生も多いでしょうが、予防歯科で1週間クローズ。正直なかなか費用対効果が見えずに迷いました。しかし、うちのクリニックにさらに磨きをかけ、バージョンアップする、必要な投資ではないかとスタッフに相談したところ、みんなが賛成してくれたので、思いきって行くことにしました。根本的にスウェーデンと日本では歯科治療に対する考えが国の保険制度からみてもかなり違うわけですが、そういう大概的なことはさておき、病院・クリニックレベルの運営、仕組みに学びがありました。日本人とスウェーデン人の技術や能力の差があるというわけではなく、**仕組みが整っている**ということです。環境を整え、仕事に集中できるよう細部にわたってシステム化されています。力を注ぐべきところに力を注げるように、要らないところにはとにかく労力をかけない、という思想があるように感じました。

休憩時間はしっかりみんなでティー・ブレイクを楽しみ、仕事はまた気持ちを切り替え集中。なぜこうできるのか色々見ると環境要因も大きいと感じました。物の場所は決まっており、ゴチャゴチャしていないで整然としています。スタッフの動きもシンプル。患者の来院誘導に合わせて、無駄なく診療が進みます。よく見てみると器具の片付け・準備がかなり無駄なく行われていました。最近日本で

も診療器具洗浄用にウォッシャー・ディスインフェクターの導入をチラホラ見かけようになりましたが、スウェーデンでは、どのクリニックにも当たり前に常備されていました。ウォッシャー・ディスインフェクターが無いクリニックは無いということです。そしてウォッシャーで洗うもの全てが、カセット式で治療セットが組んでありました。当クリニックにもウォッシャーは導入済みですが、このようなカセットをいろいろ探したのですが、見つからず諦めていました。今回このツールを見た瞬間に同行されたクロスフィールド(株)の方にその場で手に入れたいをお願いをしました(笑)。

通常診療で使用した器具は、

洗浄滅菌 → セットを組む

という工程があるわけですが、このうちの洗浄後にセットを組む分別作業は何も産み出さない作業です。

アルバイトの方々にお願いすることも多いと思いますが、するとかえって間違っ

て治療内容ごとに診療器具一式をカセットで組めば、

使用する → その場でカセットに戻す → 洗浄滅菌 → 保管する

となつて、先程のバラバラから探して組むという工程が無くなるわけです。よくよく考えてみると1日のうちのその作業時間は最低1時間はあるでしょう。この時間を削るためにカセットを帰国後即導入してみました。ただし、スタッフはいきなりシステムが変わるのを嫌うので、テスト的に少量からです。

当初は、一度にたくさんウォッシャーで洗浄できない等、予想どおり反対意見も出ましたが、しばらく使うと残りの基本セット用にも買ってほしいと要望が入りました。

今後は他の治療にもカセット式を導入していき、より診療という力を注ぐべき所に集中できる環境作りに取り組んでいきたいと思います。



スウェーデンの歯科医院のチェアサイドテーブル



トレーを重ねて置ける



滅菌

DIRECTA

プラクティパル トレー

PRACTIPAL® TRAYS

”より確実な感染予防と、効率のよい診療のために・・・”

プラクティパル トレー ラインナップ



商品名

プラクティパル トレー

W181 × L140 × H36mm
9本のインスツルメントが収納可能


- プラクティパルトレーセット ピンク
- プラクティパルトレーセット ブルー
- プラクティパルトレーセット グレー

標準価格 6,800 円 (税別)


プラクティパルトレー 1 個入
トレーカバー 1 個入 / 連結クリップ 2 個入

**準備・片付け**

トレーカバーがあるため、
インスツルメントを落とす事無く、
廃棄物を処理できる

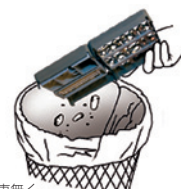**洗浄・消毒**

トレーの編み目が大きいので
ウォッシャーディスインフェ
クター使用時に十分な洗浄効
果が見込める

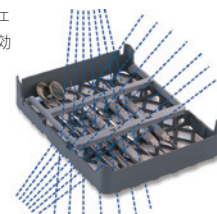

商品名

プラクティパルトレーミニ

W181 × L79 × H36mm
5本のインスツルメントが収納可能

- プラクティパルトレーミニセット イエロー

標準価格 5,500 円 (税別)

プラクティパルトレーミニ 1 個入
トレーカバー 1 個入

保管・管理

トレーカバーを色分けする
事により、用途別に識別可能

**滅菌**

Training tour Information



Hej (こんにちは) !

2016年11月、第9回スウェーデン歯科研修を開催し、スウェーデンの大学やクリニック、TePe社、そしてデンタルショー等を見学してまいりました。色々と新たな気づきがありましたが、個人的に印象に残ったことは、スウェーデンの歯科従事者がいかに患者さんとの信頼関係構築に重きを置いているのか・自身の医療人としての資格に誇りを持っているのか・そしてクリニック内でのチームの連携を大事にしているのか(この3点が治療成功の秘訣だそうです!)…ということです。

そして! 休憩で立ち寄った某・有名ファーストフード店のハッピーセット(子ども用メニュー)のサイドメニューが、小さく切ったニンジンかリンゴ…ドリンクは牛乳か100%のリンゴジュースかオレンジジュースしか選択肢がなく、ソーダ類がない…。そんなふうに、国の中に、国民の歯を守るための仕組みがちりばめられているように思います。

「予防歯科先進国スウェーデンを体感 スウェーデン研修」、本年も開催いたします。ご興味をお持ちの方は、クロスフィールド株式会社までご連絡をお待ちしております。


クロスフィールド(株) 歯科衛生士 小林 亜子



2016年ご参加の皆さまと TePe 社の大白歯オブジェと記念撮影



北欧最大のデンタルショー Swedental 参加も楽しみの一つ!

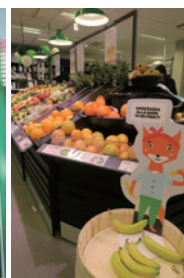

スウェーデンの多くのスーパーで子どもは無料でフルーツがもらえます



Välkomna!
ようこそ





ProphyCare®

By DIRECTA

DIRECTA 商品は、日々の臨床において歯科医師の専門性を上げ、快適な生活を実現することを目的に、スウェーデンや国際的に著名な品質にこだわった、選りすぐりの歯科医師チームによって評価研究され開発されています。


プロフィーペースト Pro

- 1,000ppmフッ素含有
- 飛散しにくく、のびやすい
 - ・ 中性の pH 値（5～6 pH）
 - ・ 爽やかなミント味


- 便利なラミネートチューブ
 - ・ 絞りやすく、無駄にならない
 - ・ 立てた状態での収納が可能
- 院内感染対策、訪問診療向けに
単回使用のカップタイプ(2g)が新たに追加

“Clean and polish”

スケーリング後の一次、二次研磨
汚れ除去・つや出し

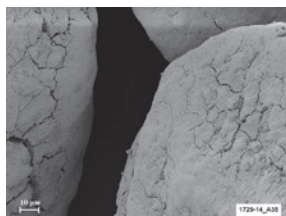

大きい粒子（ブルー）
SEM画像（観察倍率:1000倍/ブルー）

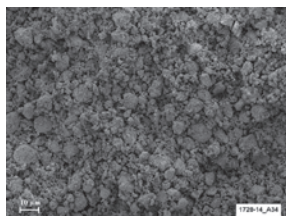

小さい粒子（パープル）
SEM画像（観察倍率:1000倍/パープル）

シリカ製の粒子は尖ってなく丸いので歯面を傷つけにくい。
また、大（ブルー）、小（パープル）2種類の粒子が短時間で効率良く研磨

記事提供: スウェーデン デンタルセンター（東京都千代田区） 歯科衛生士 加藤 典

チューブタイプ

カップタイプ



パープル（84g/60ml）
RDA 197-50 / 粒度：100-7μm

“The perfect starter,
effective removal of
stubborn stains”



ブルー（97g/60ml）
RDA:250 / 粒度:125μm
着色除去

“Less abrasive,
but
still effective”



グリーン（97g/60ml）
RDA:170 / 粒度:70μm
スケーリング後の一次研磨や汚れ除去

“Gentle cleaning,
tissue friendly
stain remover”



レッド（84g/60ml）
RDA:120 / 粒度:20μm
スケーリング後の二次研磨

“Ideal
for
final polishing”



イエロー（84g/60ml）
RDA:40 / 粒度:2μm
つや出し

商品名 プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

チューブタイプ 60ml

各1本

パープル

ブルー、グリーン、レッド、イエロー

アソート4本

ブルー、グリーン、レッド、イエロー

標準価格 4,600円（税別）

標準価格 3,600円（税別）

標準価格 14,000円（税別）

単回使用 2g カップタイプ 144個/箱

各1箱

パープル

ブルー、グリーン、レッド、イエロー

*アソート4色の販売はありません

標準価格 18,000円（税別）

標準価格 14,000円（税別）

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

適用例	ブルー (RDA 250)	グリーン (RDA 170)	レッド (RDA 120)	イエロー (RDA 40)	パープル (RDA 197-50)
強固な着色除去	●				
しつこいステイン除去 (例: コーヒー、お茶、タバコのヤニ)	●	●			●
スケーリング後の一次研磨や汚れ除去		●			●
着色除去		●			●
スケーリング後の二次研磨			●		●
軽度の着色除去			●		●
充填物の研磨			●		●
最終研磨 / つや出し				●	●
小児				●	●
インプラント				●	●

* 上記はご使用の目安であり、状況により使い分けてください

プロフィーカップPro



商品名 プロフィーカップ Pro (ラバーカップ)

医療機器届出番号 13B1X00133000053


スクリュタイプ 標準価格 9,800円 (税別)
144個/箱 @68円

ラッチタイプ 標準価格 9,800円 (税別)
144個/箱 @68円

@00円はそれぞれの商品単価を表しますが、単品販売は行っておりません



凹凸があるため2面研磨時に隣接の面も研磨されている

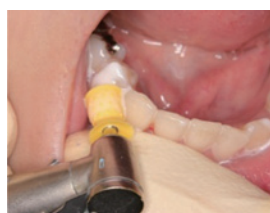

凹凸がペーストと絡んで効率よく頬側歯面を研磨している



凹凸部分を舌側歯面に押しあてて使用
写真提供: 中村歯科 (東京都品川区) 院長 中村 豪介

プロフィーコントラハンドピース クロスプロ CrossPro



ギア比 5:1 (1/5 減速)

商品名

プロフィーコントラハンドピース クロスプロ

標準価格 51,000円 (税別)

入力側最高回転速度: 40,000min⁻¹(rpm)
PMTc 用 スクリュー式

クロスプロ 40HZ ヘッド単体 (ラッチ式)

標準価格 27,000円 (税別)

ラッチタイプのブラシやカップを使用する時に簡単に交換できます

医療機器認証番号 20900BZZ00015A01

DIRECTA

『MI パンチ』の開発経緯、製品コンセプト、使用方法に関して

セレクトブルな歯科用パンチ

加来デンタルオフィス
(大分県大分市)
院長 加来 慶久

1. 開発に至った経緯、背景

現在でも、インプラント治療、特にインプラント埋入のための骨外科処置においては切開、フラップの挙上、縫合が基本である。“大きく開けて明視野”にすることによりインプラントサイトの骨増生および骨整形、そして隣在歯など周囲の硬・軟組織を外科的に改善することができる。しかしながらインプラント治療は多様化しており、周囲の骨膜を剥離しないフラップレスサージャリーの適応症も存在する。例えば十分な骨量、問題のない骨質、豊富な角化歯肉と適切な口腔前庭の深さなどインプラントサイトおよび周囲に問題がない際がそうである。このようなケースでは従来はメスを用いたH型の小さな切開を行ったり、元々は皮膚の生検に用いた医用用軟組織パンチを口腔内に用いたりしていた。ところがパンチのφが大きすぎたり小さすぎたり、また持ち手が長かったり持ちづらかったりなど操作性に大きな問題があった。そこでこのたび、口腔内全部位で、現在のインプラント治療を快適に行うための歯科専用のパンチを開発するにいたった。

2. 製品コンセプト

前述のように医用用のパンチを代用するのではなく、歯科領域で要求される条件を満たす使いやすいもの、そして前歯用としてφ 2.5mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、臼歯用としてφ 3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.5mmとラインナップをそろえることで最適

なパンチを選択できる、つまりセレクトブルであることをコンセプトとしている。

3. 使用方法

パンチ使用の一例を症例写真で説明したい。症例は当院で10年前に咬合再構成を行ったが、右下7失活歯が歯根破折にて抜歯となり、抜歯時にリッジプリザーベーションを行っている。その効果もあり、写真1のようにインプラントサイトの硬・軟組織の状態は良好に仕上がっている。十分な角化歯肉量で、口腔前庭の深さも問題はない。さらに右下6にはPFMが装着されており、不要な外科的侵襲に伴う歯肉退縮を生じない配慮が必要であった。そのため、MIパンチを用いたインプラント埋入を行った。φ 4.8mmのフィクスチャーに対して臼歯用φ 4.0mmパンチを選択した。ラインナップが豊富なため最適なパンチを選択することができる。また、MIパンチのノブ上面には小孔が設けられており、例えば練性充填器の球部、歯科用鑷子の先端など我々が日常歯科臨床で用いている多くのインスツルメントが適合するため写真2のようにそれを利用した安定したパンチの回転が可能である。また、ノブも前歯と臼歯とで使いやすい長さとし直径にしており確実なパンチングの助けとなっている。そのため計画通りの理想的な位置にインプラント埋入を行うことができた(写真3)。

このMIパンチはインプラント埋入時のみでなく、アバットメント連結時、またソ

ケットシールのドナー採取やGBR用コラーゲンメンブレンのパンチングにも利用でき、われわれの歯科臨床をより素晴らしいものにしてくれるものであると信じている。多くのシチュエーションで使えるMIパンチ、是非、皆様の臨床に活かしていただければと思います。



写真1



写真2



写真3

Products Information



MI パンチ

《特長》・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
・広範囲のサイズを取り揃えています



《材質》・ブレード：ステンレス鋼

《定価》・1箱 5,000円(税別)

10本入 5,000円(税別)

1本あたり 500円(税別)

販売名：MI パンチ
医療機器認証番号：226ABBZX00075000
製造販売元：カイインダストリーズ株式会社

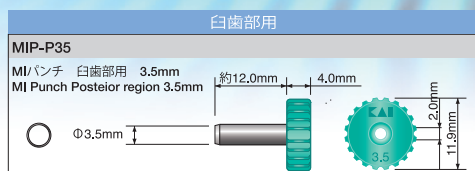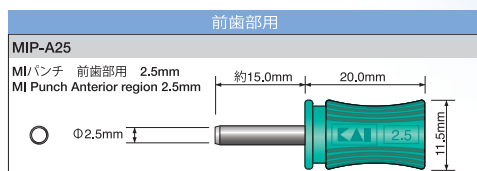

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

『Simple is the best !』 口腔外科手術を伴う歯科治療における トルクコントロールの活用



手動式トルクドライバー、トルクコントロール

日本大学松戸歯学部
顎顔面外科学講座
専任講師 伊藤 耕



近年、歯科矯正治療において、骨に直接的な固定源を用いる方法が一般的に用いられるようになりました。それらは Temporary Anchorage Devices ; TADs と呼ばれ、ピンタイプのもは顎変形症治療の術前矯正にも保険適応となっています。口蓋にピンタイプのTADs を埋入する際には、通常のドライバーを用いると、骨にTADs を斜めに埋入することになり好ましくありません(写真1)。よって、専用の電動器械や、歯科インプラント用の電動器械を用いて埋入しますが、手術器械のセットアップが必要になります。

私は口腔外科医として、骨折や顎変形症の手術に携わる機会が比較的多いのです

が、様々な手術器械を使用した経験から、**手術器械は Simple is the best ! と考えています。**トルクコントロールは、ISOチャックにドライバーアタッチメントをつけるだけという**シンプルな設計に加えて、手用であるため、面倒な電源確保の必要がありません。**電子制御ゆえに起こりうる故障等の心配も少ないと思われます。また、トルクコントロールは、オートクレープ滅菌が可能ですので、**清潔域の手術でも安心して使用できます。**私は、デンタルインプラント(写真2)と、TADs の両者にトルクコントロールを使用した経験があります。トルクコントロールを手にする前には、電動のインプランターを使用していましたが、埋入時の微妙な深さ調節の際には、手用のドライバー

に替えて調節をしていました。いつも考えていたことは、「もっと単純に、簡単確実にできないか?」ということでした。トルクコントロールを用いた埋入時の感覚は、通常のドライバーに近く、**ネジが骨に進入する時のトルクをダイレクトに感じるができるため、安心感があります。**埋入トルクの調整もドライバーのダイヤルを設定するのみと単純です。トルク調整ダイヤルは 10N ~ 35N と幅広く、ほとんどのインプラントに対応できます。メンテナンスは通常のタービンオイルを注入するのみと簡単です。

トルクコントロールは Simple is the best ! を実感できる器械です。



写真1 通常のドライバーを用いて口蓋にアプローチした場合骨に対してTADs (スクリュー) が斜めに埋入される。

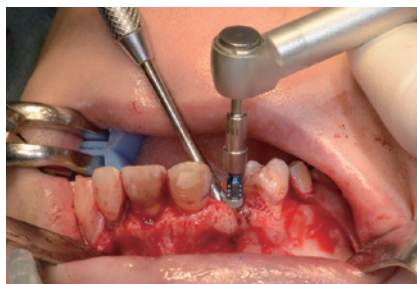


写真2 12部にデンタルインプラントの埋入時



写真3 口蓋にTADs 埋入 術前写真



写真4 局所麻酔後 ユニット付属のコントラングルにてブレドリル



写真5 トルクコントロールを用いてTADs 埋入 骨に対して垂直に埋入でき、アクセスも容易である。

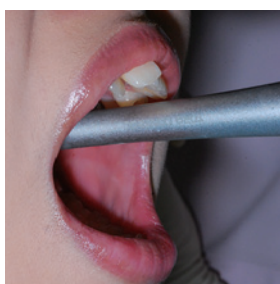


写真6 TADs 埋入後

患者様と 医院様のための 便利アイテム



プレデターターボ

PRIMA DENTAL **Prima Dental** 社の高品質バーシリーズ
商品名 プレデターターボ
Special PR-3T, PR-DX
 標準価格 各8,000円(税別) / 10本入
 PR-1T, PR-2T, PR-557T, PR-1557T
 PR-330T, PR-245T
 標準価格 各4,300円(税別) / 10本入

医療機器届出番号 13B1X00133000005

斬新な幾何学的形状を使用し
スピーディーでスムーズな金
属カットが可能

タングステン
カーバイド
一体型なので
折れにくい

高密度に切削製造
されたバーは回転
軸、刃部の正確さ
で振動を減少



プレデターターボ PR-2T

プレデターターボ
PR-3T
Special

品番	PR-3T
作業部幅 (1/10 mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

金属除去用カーバイドバー
(切れ味 UP)

プレデターターボ
PR-DX
Special

品番	PR-DX
作業部幅 (1/10 mm)	012
作業部長 (mm)	4.0

ポーセレンやメタルボンド除去用
カーバイドバー

プレデターターボ

品番	PR-2T	PR-1557T	PR-1T	PR-330T	PR-245T	PR-557T
作業部幅 (1/10 mm)	012	010	010	008	009	010
作業部長 (mm)	4.0	3.9	1.9	2.0	2.7	3.7

金属除去用カーバイドバー

PREDATOR® CARBIDE BURS

GP トリマー

医療機器届出番号 13B1X00133000008

歯科用練成形成器
ガッタパーチャカッター

GP Trimmer

ガッタパーチャ余剰分を切断
パイプレーター機構により
電熱時の通電を確認

商品名 GP トリマー

標準価格 32,000 円(税別)

セット内容

本体 1 本 / ハンドピースホルダー 1 個 /
ヒートカッティングチップ 4 種 (各形状 1 個入り)



ラクスエーター・プラス

医療機器届出番号 13B1X00133000007

DIRECTA
Luxator
Design By Dentist

力に頼らない、無理のない抜歯ができる

商品名 ラクスエーター・プラス

標準価格 (税別)

K4 (スタンダード 4 本)	41,000 円
4 本セット (3C 3S 5C 5S) + シャープニングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
SK4 (ショートモデル 4 本)	41,000 円
4 本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャープニングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
K7 (スタンダード 7 本)	68,000 円
7 本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャープニングツール 1 本 / 解説 CD-ROM 付き	
単品 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, S2S, S3C, S3S, S3CA	12,000 円 / 本
単品 1S, DE3, DE5	13,000 円 / 本
単品 3S チタン, 2S チタン, DE3 チタン	15,000 円 / 本
単品 DE3 チタン, 3A チタン	16,000 円 / 本
シャープニングツール	2,700 円 / 個



ボンスクレイパー

医療機器届出番号 13B1X00133000056

KOHLER
MEDIZINTECHNIK

ボンスクレイパー



先端拡大図



商品名 ボンスクレイパー


標準価格 23,000 円 / 本 (税別)

フレキシブル ペリオトーム

医療機器届出番号 13B1X00133000054

DoWell
Dental Products, Inc.

曲がる、しなる、だから折れにくい、そして永く使える

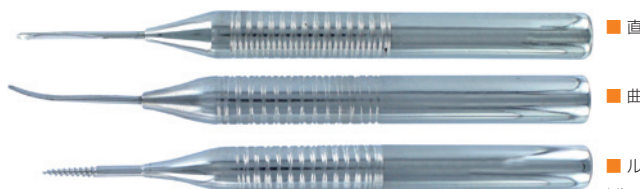

直

曲

ルーツ エキストラクター

*ルーツ エキストラクターはしりません

商品名 フレキシブル ペリオトーム

単品 直、曲、ルーツエキストラクター

標準価格 各 16,500 円 / 本 (税別)

トロール咬合紙

医療機器届出番号 13B1X00133000048

TrollDental

湿潤下やジルコニアでも
より精度の高い咬合診断が可能



極薄 8 μm
破れにくい PP 素材

商品名 トロール咬合紙

単品 レッド、ブルー

標準価格 各 3,600 円 100 枚 / 箱 @ 36 円 (税別)

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

マルチクリーナー

Proxident
care



商品名 マルチクリーナー

アスピジェクト / シス

RONVIG
Dental Mfg. A/S

Instruments for
Injection

医療機器届出番号 13B1X00133000038

ASPIJECT® SIS

バレルが滅菌できるので、
滅菌下での注射筒の使用が可能

用途
浸潤麻酔 / 伝達麻酔
*オートクレーブ対応 (135℃)



*商品に薬液カートリッジ、
ニードルは含まれません

商品名
アスピジェクト / シス

バレル 1 個付属 標準価格 18,000 円 (税別)

別売: アスピジェクトバレル
3 個入り

標準価格 2,500 円 (税別)

プレデタージルコニア

PRIMA DENTAL
PREDATOR®
DIAMONDS

プレデタージルコニア Z856-018F

商品名 プレデタージルコニア

Z801-018F, Z856-018F, Z862-014F, Z368-023F

(F ファイン) ●

Z801-018M, Z856-018M, Z862-014M, Z368-023M

(M ミディアム) ●

標準価格 各 7,500 円 (税別) /5 本入

Z856-018F, Z856-018M 標準価格 各 1,600 円 (税別) /1 本入

均等なダイヤモンドを
均一に塗布することで
高い切削率と発熱を
軽減

特殊接着によりダイ
ヤモンドの粒子の付
着が長期持続される
ので消耗率が低い

ジルコニアに限らず
メタルボンドやメタル
クラウン等の補綴物除去
にも高い切削力を発揮

品番	801	856	862	368
作業部幅 (1/10 mm)	018	018	014	023
作業部長 (mm)	-	9.0	7.0	5.0

トルクコントロール p20

Anthogyr
POWER MASTER (DENTISTRY)

医療機器届出番号 13B1X00133200028

Torq Control

一体型で7種類の締め付けトルク
補綴物の確実な
スクリュー固定が可能です



商品名

Torq Control

トルクコントロール
手動式トルクドライバー

標準価格 120,000 円 (税別)

アプリケーター・ネオ p6

医療機器届出番号: 13B1X00133000041

transcend
APPLICATOR

ボンディング液、エッチング液等の使用量を
必要最小限に抑えるアプリケーター

サイズ (ヘッド径)	柔らかさ
レギュラー (φ2.0mm)	ノーマル
レギュラー (φ2.0mm)	ソフト
ファイン (φ1.8mm)	ノーマル
ファイン (φ1.8mm)	ソフト

カラー
ブルー
グリーン
イエロー
ピンク

商品名 アプリケーター・ネオ (単回使用)

単品 100 本入り

● ブルー (レギュラー/ノーマル) ● グリーン (レギュラー/ソフト)

● イエロー (ファイン/ノーマル) ● ピンク (ファイン/ソフト)

標準価格 1,300 円 (税別)

フォスバイキング・ダイヤモンドバー

医療機器届出番号: 13B1X00133000047

Viking



用 途: ● 歯肉縁下の SRP ● 余剰の充填物、ボンディング材の除去
特 徴: ● 細長いネックで届きにくいところにアクセスが可能 ● 細かい粒子

商品名 フォスバイキング・ダイヤモンドバー

W1 1 本入り 標準価格 3,800 円 (税別)

W2 1 本入り 標準価格 3,800 円 (税別)

ホワイトマジック

医療機器届出番号 13B1X00133200026

abrasive technology
WHITE MAGIC™

ホワイトマジックは
様々な用途に使用できます



- 矯正用ボンディング材の除去
- スタイン除去
- スケーリング後の歯面スムージング
- 余剰セメントの除去

商品名 ホワイトマジック

ホワイトマジック・イントロキット/各モデル 1 本ずつ、合計 6 本
標準価格 5,040 円 (税別)

ワムキークラウンリムーバー

医療機器届出番号 13B1X00133000032

WAM

早くて簡単なクラウンリムーバー、
クラウン除去の強い味方



商品名
ワムキークラウンリムーバー

セット 標準価格 50,000 円 (税別) 各 1 本 標準価格 20,000 円 (税別)

ワムキークラウンリムーバー No.1

ワムキークラウンリムーバー No.2

ワムキークラウンリムーバー No.2

ワムキークラウンリムーバー No.3

ワムキークラウンリムーバー No.3

各 1 本、計 3 本、解説 CD

MD ガイド

WAM

MD ガイド
Mesial Distal Guide

インプラント用イニシャルドリル

商品名 MD ガイド

MD ガイド イントロキット 標準価格 120,000 円 (税別)

キット内容 各 1 個 ドリルガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)

ノンドリリングガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)

サージカルボックス

■ 簡単3ステップ

近遠心の補綴物を想定
しながら簡単に位置を
決められます



医療機器届出番号 13B1X00133000058



<MD ガイド イントロキット>
オートクレーブ対応 (134℃)



FRS 破折ファイル除去インスツルメント

医療機器届出番号 13B1X00133000051

File Removing System
使用時にストレスの少ない
破折ファイル除去



商品名
FRS 破折ファイル除去インスツルメント

マイクロフォーセプス 標準価格 140,000 円 (税別)

フォーセプス 標準価格 35,000 円 (税別)

ピュアリフレクト ミラー

医療機器届出番号 13B1X00133000052

Prodent Holliger
Optical, Dental Mirrors

クリア! 明るい!! 鮮明!!!

商品名 ピュアリフレクト ミラー

単品 サイズ 0、サイズ 2 標準価格 各 16,800 円

12 個/パック @ 1,400 円 (税別) 単品

単品 サイズ 4、サイズ 5 標準価格 各 6,780 円

12 個/パック @ 565 円 (税別)

スティックンプレイス p6

医療機器届出番号 13B1X00133000019

DIRECTA
STIK-N-PLACE®



商品名 スティックンプレイス

50 本入り 標準価格 3,000 円 (税別)

1 プレート 10 本 x 5 プレート

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

(@ 00 円/00)はそれぞれの商品単価を表しますが、単品販売は行っていません。

Coming Soon

R.O.C.S.®

Smart Oral Care

* 寝る前のミネラル歯みがき



ミネラルズ

内容量：35ml / 45g

商品名 ロックス ジェル ミネラルズ

● 写真以外にもバリエーションに富んだ歯磨材をご用意。詳しくはお問い合わせ下さい。

- ロシアでトップクラスのシェアを誇る人気ブランドの健康志向な歯磨材が登場
- 日本では2012年から市場に参入
- う蝕・口臭・歯石の沈着を防ぐ*
- ヤニや歯垢を除去し、歯を白くする*

Made in Russia

* 97% 天然由来成分

PRO デリケートホワイトニング*
フレッシュミントPRO デリケートホワイトニング*
スウィートミント

内容量：100ml / 135g

商品名 ロックス PRO デリケート W FM
ロックス PRO デリケート W SM

* ブラッシングによる効果


NEW products

DIRECTA
ORSING

スウェーデンの歯科医院、大学で広く使用されているハイゴフォーマック
排唾ラインに接続してしっかり吸引します

ハイゴフォーマック

- 患者さんの口腔内状態に合わせて自由な形にアレンジ可能
- コイル部分の5つの穴から効率よく吸引
- コイル部分が舌や頬粘膜を排除
- 軽量で柔らかく患者負担が少ない
- 素材は環境に優しいPP(ポリプロピレン) PE(ポリエチレン)を使用
- 衛生的な単回使用

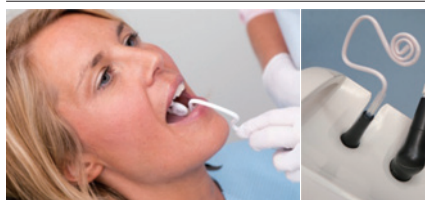患者さんの骨格や施術箇所に合わせて形が調節でき
また顎に固定できるので安定した使用が可能

商品名 ハイゴフォーマック

医療機器届出番号 13B1X00133000065

ハイゴフォーマック 100 個入
(専用アダプター5個付き)

標準価格 1,100 円 (税別) @11 円 / 個



Hypoformic®

専用アダプター
(外径6.5mm、内径4mm、長さ45mm)

NEW products

ディスプレイタイプポリッシングバー

ポリシェット mini shaped polishers

■ 特徴

- ・ コンポジットレジン・ハイブリッドセラミックス (レジン) 用
- ・ 小回りが良く効くミニサイズ
- ・ 3ステップで確かな輝き

商品名 ポリシェット

医療機器届出番号 13B1X00133000063

単品パック

アソート (24本入り)

- ポイント リムーバー 30本入り (@210円/本)
- ポイント スムーサー 30本入り (@210円/本)
- ポイント シャイナー 15本入り (@420円/本)
- カップ リムーバー 30本入り (@210円/本)
- カップ スムーサー 30本入り (@210円/本)
- カップ シャイナー 15本入り (@420円/本)

標準価格 各 6,300 円 / 箱 (税別)

- ポイント リムーバー 5本入り
- ポイント スムーサー 5本入り
- ポイント シャイナー 2本入り
- カップ リムーバー 5本入り
- カップ スムーサー 5本入り
- カップ シャイナー 2本入り

標準価格 5,800 円 / 箱 (税別)

Made in Liechtenstein

ポイント

リムーバー
スムーサー
シャイナー粗い
細かい

カップ

リムーバー
スムーサー
シャイナー粗い
細かい

* 実寸大

* 材質: シリコン、炭化ケイ素 (リムーバー)
ダイヤモンド粒子 (シャイナー)、酸化アルミニウム (スムーサー)

* 最高回転数 5,000 RPM

■ お問い合わせはクロスフィールド(株)まで

本紙に記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元: クロスフィールド 株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

URL: http://www.crossfield.com

E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所