Dental cfcro

Cf CrossField

クロスフィールド商品情報誌 デンタルワールド www.crossf.com 30 2022 秋号

プロフィーペースト Pro HAp

~つややかな歯へ~

のぞみ矯正・歯科クリニック (新潟県新潟市) 川原 のぞみ・・・P.1

Greetings From ProphyCare brand ambassadors!

プロフィーケア ブランドアンバサダーからのごあいさつ スウェーデンデンタルセンター(東京都千代田区) 歯科衛生士 **加藤典・・・R2**

Studio Chick 代表 / プレミアムデンタルケア恵比寿 代官山 歯科衛生士 **片山 章子・・・** *P.2* フリーランス / ミラクル DH 代表 / いとひや歯科クリニック 歯科衛生士 **沢口 由美子・・・** *P.2*

Add Colorer 代表 歯科衛生士 工藤 彩加・・・P.2 株式会社 Tomorrow Link 代表取締役 歯科衛生士 濵田 智恵子・・・P.2

アップルデンタルセンター(東京都西東京市)歯科衛生士 花岡 佑み子・・・22

ラクスエーター・プラス P シリーズ

軟組織、硬組織への損傷を最小限に抑えた低侵襲抜歯のための必須アイテム

歯周病治療専門クリニック SPIDO (大阪府大阪市) 歯周病専門医 辻 翔太・・・P.3

スプリーム歯ブラシが新しくなって

サステナブル素材になりました!

スマイル歯科(福岡県久留米市)歯科衛生士 **水町 幸恵・・・***P.5*

患者さんが効率よくセルフケアできる歯ブラシを処方したい!

~ TBI から OHI へ TePe 歯ブラシの処方、はじめました。

フリーランス歯科衛生士 西尾歯科 (大阪府茨木市) 歯科衛生士 **下川床 里美・・・** P.6

出会って 20 年! **TePe** 愛を語る

歯科衛生士教育会社(株)ラ・プレシャス代表 歯科衛生士 **岡村 乃里恵・・・**P.7,P8

インプラントの自己メンテナンスは適切な歯ブラシの選択が重要! TePe ユニバーサルケアとインプラント矯正ブラシの活用

東京ステーション歯科クリニック(東京都 中央区)歯科衛生士 岩井 理子・・・P.11

世界中で愛されるガムチャックスフロス

〜国際的に活動する歯科衛生士たちが感じる臨床現場でのガムチャックスの可能性〜 国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n 日米歯科衛生士 藤森 直子・・・ P.12

歯科衛生士にも、患者さんにとっても負担が少ない エルゴフィンガー エアーフロー用ノズル

オーラル美容家 予防審美専門歯科衛生士 井上 ゆう・・・ P.13

歯周基本治療を成功させるために耐久性を追求したグレーシーキュレットの選択

〜シャープニングフリーで長い耐用年数、身近にできる SDG sへの取り組み〜 医療法人真摯会 クローバー歯科クリニック(大阪府豊中市)歯科衛生士 成田 千紘・・・P.14

無痛治療を目指す先生へ

パロジェクトシリンジの特徴

くげぬま海岸歯科クリニック(神奈川県藤沢市)歯科医師 三浦 陽平・・・P.15

クリアで明るい視野によってもたらされる鮮明な治療情報と高い診療効果 ピュアリフレクト ミラー

鎌倉デンタルクリニック(神奈川県鎌倉市)院長 **三橋 晃・・・**P.16

小児用ラバーダムフレームについて

医療法人真穂会 ますだ歯科医院(愛媛県宇和島市)歯科医師 **佐伯 真未子・・・***P.17*

新型コロナウイルスの感染予防対策におけるマスクの選択

ー 高機能 アベビータプロテクトマスクの特徴 ー

キャビネ・ラピヌー(千葉県浦安市)歯科衛生士 川島 遥香・・・P.18

クロスフィールド新ホームページのご案内···裏表紙

プロフィーペースト Pro HAp

~つややかな歯へ~

『プロフィーペースト Pro HAp』は 従来の PMTC ペースト複数 + ハイドロキシアパタイト含有ペーストの役割を 1 つで賄える優秀なペースト

のぞみ矯正・歯科クリニック (新潟県新潟市)





当院で見守る猫たち 猫のいる歯医者と覚えてもらえる

当院に新しく『プロフィーペースト Pro HAp』が仲間入りした。ナノ粒子ハイドロキシアパタイト含有・ワンステップ。果たしてどのようなものかと期待する。

当院の所在地は子供のむし歯の少ない新潟県である。当院の特徴としては、矯正歯科の割合が多い。また、患者様だけでなく、ご家族も口腔内への関心が強い。そのためか、定期健診でクリーニングを希望される方が多いように思う。今まで定期健診が長く継続できるよう、患者様の満足度を気にかけてきた。より良いものを取り入れたい気持ちはあったが、開業後何年か経ち、PMTCペーストは効果のわかる同じものを購入していた。そこに紹介いただいたのが『プロフィーペースト Pro HAp』である。

『プロフィーペースト Pro HAp』について、約3か月間、使用感を考え、PMTC 前後の口腔内写真を撮影、施術後の患者様の感想をお聞きした。プロフィーペーストと言えば、大学時代から使い慣れており、その進化形と思うと信頼感が増す。そして結果は良好で、満足のいくものであった。

このペーストは、水色で濃い青の粒が混ざっている。患者様もその形状に興味を示していた。青い粒は触るとざらざらするが、PMTC中着色を落とし、その後、歯につやが出てきているのを感じた。歯みがき剤などの味が苦手な方にも使える。

以下は患者様の感想である。

- ・ざらざらしているけど、クリーニング中、痛みは感じない。
- ・ミント味だが、強い味ではなく普段使っている歯みがき粉より優しい味ですごく良かった。この味なら小さい子供にも大丈夫だと思う。
- ・特に嫌な感じはしない。

PMTC 前後の口腔内写真からは、大体の方で歯の色がワントーン上がった。つやが出るため光の当たり具合も変わる。白くてきれいな歯・歯並びに憧れる人は多い。口腔内写真で効果を患者様に説明しやすかった。もともと歯が白い方は見た目の変化は感じにくいが、歯がつるつるになりとてもきれいになったと喜んでいる方が多かった。

『プロフィーペースト Pro HAp』の使用で喜びの声を聞くと、継続使用したくなる。実際、当院の数あるペーストの中で使用頻度は高くなった。また、このペーストを取り入れることで、マンネリ化していたPMTCを脱し、患者様とのコミュニケーションを図ることとその効果から定期健診継続を期待できる。

さらに『プロフィーペースト Pro HAp』は従来の PMTC ペースト複数 + ハイドロキシアパタイト含有ペーストの役割を 1 つで賄える優秀なペーストだと思う。診療を時間短縮でき、経済的ともいえる。



『プロフィーペースト Pro HAp』使用後。つるつるになったと喜んでいただけた。

Products Information



予防歯科 診療補助 インスツルメント デンタルミラー 切削研磨バー

Greetings From··· ProphyCare brand ambassadors!

プロフィーケア ブランドアンバサダーからのごあいさつ

歯肉退縮のある患者さんには迷わずプロフィーペーストPro HAp を選びます。根面に付着したプラークをやさしく除去でき、 ツヤのある歯がワンステップで効率よく得られます。

スウェーデンデンタルセンター (東京都千代田区) 日本歯周病学会認定歯科衛生士 日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士 歯科衛生士 加藤 典



歯科衛生士になり初めて出会ったペースト材がプロフィーペー スト Pro でした。

研磨剤の粗さによる違いや使い分けも分からなかった新人時代。

今では6種類ものバリエーションがある ことが臨床で大いに役立っています。口腔 内の状況に合わせてペースト材を組み合 わせられることが魅力ですね。



Add Colorer 代表 歯科衛生士 工藤 彩加

最新のプロフィーペースト Pro HAp を臨床活用しています。 微粒なハイドロキシアパタイト成分で整えながら研磨する能率 の良さで得られるハイクオリティな仕上がりを実感しています。

Studio Chick 代表 / プレミアムデンタルケア恵比寿 代官山 歯科衛生士 片山 章子

私が学生時代の授業でも使われていたプロフィーペースト。歯 面への伸びが良く、患者さんのプラークの付着や歯面の状況に より選択ができることが魅力です。常に変化し続けるのも魅 力、だからこそ今でもずっと身近にある、 PMTC 材料の一つです。

株式会社 Tomorrow Link 代表取締役 歯科衛生士 濵田 智恵子

既存の、汚れの程度に適して4種から選べるペースト、そして 新しくラインナップしたワンステップタイプの2種のペースト (パープルと HAp)。プロフェッショナルとしてこれらの特徴を 理解し、臨床にて使い分けています。

> フリーランス / ミラクル DH 代表 / いとひや歯科クリニック 歯科衛生士 沢口 由美子

メインテナンスに入る前のセルフケアの強化や治療によってプラークリテンション ファクターを減少させている事が大前提です。患者さんのプラークコントロールが 苦手な部位にはどうしてもプラークの付着があります。その厚みに合わせてペース

トを選択しています。パープルの出番が一番多いです が、厚くぬめりが強い時はグリーンを使用しています。 プロフィーペーストを使用することでより患者さんに 合わせたペーストを選択することができるようになり アップルデンタルセンター

(東京都 西東京市)

歯科衛生士 花岡 佑み子



Products Information **DIRECTA**

ProphyCare プロフィーペースト Pro

■ 1,000ppmフッ素含有 ■ 飛散しにくく、のびやすい・中性のpH値(5~6pH)

■ 便利なラミネートチューブ 絞りやすく、無駄にならない 立てた状態での収納が可能

■ 院内感染対策、訪問診療向けに単回使用のカップタイプ(2g)あり



商品名 プロフィーペースト Pro 販売名: プロフィーペースト Pro 医療機器届出番号 13B1X00133000027

チューブタイプ 60ml

各1本 標準価格 4,600円(税込5,060円) パープル ブルー、グリーン、レッド、イエロー 3,900円(税込4,290円) アソート4本

ブルー、グリーン、レッド、イエロー 15,200円 (税込 16,720円) 単回使用 2g カップタイプ 144個/箱

各1箱

21,000円(税込23,100円) パープル ブルー、グリーン、レッド、イエロー 16,000円 (税込 17,600円)

ラクスエーター・プラス P シリーズ

軟組織、硬組織への損傷を最小限に抑えた

診療補助

低侵襲抜歯のための必須アイテム

歯周病治療専門クリニック SPIDO (大阪府大阪市)





近年、患者のニーズの多様化により、インプラント治療を希望する患 者は増加し続けています。そのため、抜歯時にリッジプリザベーショ ン(歯槽堤温存術)や即時埋入を行う機会が増えてきています。抜歯 時に、こういった歯周組織を損傷してしまうと、抜歯後に更なる侵襲 が生じ、これによりさらなる組織破壊が生じてしまうため、抜歯窩周 囲の軟組織、および硬組織を可能な限り温存することが非常に重要と なります。

フラップ形成を行い抜歯した後の歯槽堤の頬舌的変化量

Author	頬舌変化量 [mm]
· Lekovic et al. (1997)	4.40mm
· Lekovic et al. (1998)	4.56mm
· lasella et al. (2003)	2.60mm
· Barone et al. (2008)	4.50mm

フラップ形成をせずに抜歯した後の歯槽堤の頬舌的変化量

Author	頬舌変化量 [mm]
· Oghli et al. (2010)	0.3mm
· Vera et al. (2012)	0.6mm
· Brownfield et al. (2012)	1.3mm
· Degili et al. (2012)	0.8mm

左記の表は、フラップを開いて抜歯した後の抜歯部位の頬舌幅の変化 量と、フラップレスでの抜歯時の抜歯部位の頬舌幅の変化量の比較に なります。フラップを開くということは、抜歯窩に外科的侵襲がある ため、抜歯部位の頬舌幅が優位に減少してしまいます。ラクスエーター を使用し、抜歯窩周囲の組織の損傷を最小限に抑えることは、抜歯窩 の治癒に大きな影響を及ぼすことがわかります。

ラクスエーターは、通常のヘーベルよりも厚みが薄いため、歯根膜腔 に的確に挿入できるだけでなく、歯肉、歯槽骨を必要以上に圧迫する **ことなく、歯根を脱臼することができます。**例えば、上顎前歯の頬側 の骨の厚みは平均 0.5mm 程度です。この薄い頬側骨を骨折させてし まうと、即時埋入を中止しなければいけなくなり、トータルの手術回 数が増えてしまいます。また、抜歯により喪失してしまいやすい、歯 間乳頭についても、このラクスエーターを使用することで、軟組織損 傷を最小限に抑えることができ、組織の温存につながります。

主として使用するラクスエーターのストレートとカーブは、根の形態 を考慮して使い分けするのが良いでしょう。根面に沿って押して使用 するため、大臼歯のように、アクセスが難しい場合や歯根が開いてい る歯の場合はカーブを、前歯のような、歯根面に平行に挿入できる場 合は、ストレートを使用するのが良いでしょう。(図 1)



歯肉縁下のため保存不可と判断した



ラクスエーターを使用し抜歯することで、 軟組織にほとんど損傷なく抜歯できた





ストレートタイプの P1 を使用し、 頬側から歯根膜腔を拡大する



舌側からコントラアングルタイプの P3 を挿入し、 歯根膜腔を拡大する



全体的に拡大することで、周囲の組織に損傷を加えるこ となく、抜歯することができた

DIRECTA シリーズ

DIRECTA 商品は、日々の臨床において歯科医師の専門性を上げ、快適な生活を実現することを目的に、 スウェーデンや国際的に著名で品質にこだわった、選りすぐりの歯科医師チームによって評価研究し開発されています。



Luxator Periotome

ラクスエーター・プラス

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた 高品質なスウェーデン鋼使用

【ラクスエーター・プラスの使用方法】



対して真直ぐに挿 槽骨を圧迫しなが 程度切断していく ら歯周靱帯を切り 進めていきます を脱臼できます

ラクスエーター プラスによる 抜歯の使用感*

- ・無理のない抜歯ができる
- ・骨損傷が最小限の歯周靱帯切断 ができる
- * 当計実施アンケート結果より

商品名 ラクスエーター・プラス

K4 (スタンダード4本) 52,000円(税込57,200円)

4本セット (3C 3S 5C 5S) + シャープニングツール 1 本/解説 CD-ROM 付き

SK4 (ショートモデル 4 本) 52,000円 (税込57,200円)

4本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャープニングツール 1 本/解説 CD-ROM 付き

90,000円 (税込99,000円) K7 (スタンダード7本)

7本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) +シャープニングツール 1 本/解説 CD-ROM 付き

単品 2S,3C,3S,3CA,3IC,5C,5S,S2S,S3C,S3S,S5S,S3CA,P1,P2,P3,P4 15,000 円 (税込16,500円)/本

単品 1S. DE3. DE5 17.000円(税込18.700円)/本

単品 3Sチタン、2Sチタン 19,000円(税込20,900円)/本 単品 DE3 チタン、3A チタン 21,000円(税込23,100円)/本

3,500円 (税込3,850円)/本

販売名: ラクスエーター・プラス 医療機器届出番号 13B1X00133000007

Luxator P-series

ラクスエーター・プラス P シリーズ

ラクスエーターシリーズに操作性を極めた ペンタイプ (P シリーズ) が新登場

ラクスエーター・プラス P シリーズ

標準価格 15,000円(税込16,500円) 標準価格 52,000 円(税込57,200円) PK44本セット



■ P1 ブレード幅:3mm 形状:ストレート 色:ダークグリーン 全部位(残根/根尖/口蓋側/臼歯遠心)

P2 ブレード幅:3mm 形状:カーブ 色:ライトブルー 全部位 (残根/根尖/口蓋側/臼歯遠心)

■ P3 ブレード幅:3mm 形状:コントラアングル 色:ダークブルー 舌側/口蓋側/臼歯遠心

■ P4 ブレード幅: 4mm/1.5mm 形状: デュアルエッジ 色: パーブル

マレットが使用できます

CR 修復用マトリックス

販売名:ラクスエーター・プラス 医療機器届出番号 13B1X00133000007

Luxator Root Picker

押持が可能な先端部

ラクスエーター・ルートピッカー

抜歯中に使える新感覚のインスツルメント 滑りにくいホール加工

小さくてつかみにくい歯根の一部は通常のツイーザーやプライヤーで把持するのは困難だ が、先端に特徴のあるラクスエーター・ルートピッカーはより簡便な把持及び除去が可能。 手になじんで滑りにくいホール加工をハンドルに採用。

商品名 ラクスエーター・ルートピッカー 販売8:ラクスエーター・ルートピッカー 医療機器品出番目 1381 (20133000033

標準価格 12,000円/本(税込13,200円) (単品)

直 # (出組) 標準価格 12,000円/本 (税込13,200円) 2本セット (直、曲) 標準価格 21,000円 (税込23,100円)



シャープニングツール

FenderMate

フェンダーメイト

手軽にコンタクトポイントを形成できるマトリックス



商品名 フェンダーメイト

標準価格 26,000円 (税込28,600円)

(レフトN, レフトR, ライトN, ライトR 各18個)/計72個@310円

単品各1箱 8,000円 (税込8,800円)

(レフトN, レフトR, ライトN, ライトR) /18 個 @ 340 円

単品バリューパック 各 1 箱 標準価格 33,000 円 (税込36,300円)

(レフトN, レフトR, ライトN, ライトR) /100 個 @ 260 円

販売名:フェンダーメイト 医療機器届出番号 13B1X00133000028



Hygoformic Bio ハイゴフォーミック Bio 抜歯中に使える新感覚のインスツルメント



環境にやさしい サトウキビ由来のバイオベース ポリエチレン製

スウェーデンの歯科医院・大学で 広く使用されているハイゴフォーミック 排唾ラインに接続してしっかり吸引します

商品名 ハイゴフォーミック Bio

販売名:ハイゴフォーミック 医療機器届出番号 13B1X00133000065

100個入 (アダプター5個付き) 標準価格 2,200円 (税込2,420円)@22円/個 詳しくは動画をで覧ください



PlacTectPellet プラークテクト・ペレット

充実したスウェーデン式 TBI に欠かせない歯垢染色シリーズ

- ・液の飛散がないペレットタイプ
- ミントフレーバー



100ペレット

プラークテクト・ペレット ブルーを使用

4日以上付着しているプラークが青紫色に 反応して常に磨き残している部分を確認できる

3日以内に付着したプラークが赤紫色に 反応して直近の磨き残しを確認できる

● 商品名

プラークテクト・ペレット レッド プラークテクト・ペレット ブルー 3日以内に付着したブラークを判別 3日以内に付着したブラ

商品名

100ペレット

4日以上付着しているプラークを判別

プラークテクト・ペレット イエロー ※青色 LED を当てた時だけプラ

クが黄色に反応するので、通常 時は目立たない

※青色 LED ライトをご使用下さい。

標準価格 3,000円(税込3,300円)/ 標準価格 3,000円(税込3,300円)/ 標準価格 7,000 円 (税込 7,700 円) / 200 ペレット

商品名

スプリーム歯ブラシが新しくなって

サステナブル素材になりました!

お勧めの使用方法はズバリ2本使い。忙しい朝などはラウンド毛のセレクトや GOOD で手早く歯面を磨き、比較的ゆっくりしている夜にスプリームを使用しています。一度に2本使いではないので患者さんからも好評です。


スマイル歯科 (福岡県久留米市) TePe Extended Clinical Team 歯科衛生士 **水町 幸恵**




SDGs (Sustainable Development Goals =持続可能な開発目標) という言葉も身近に感じるようになった昨今。サステナブルとは人間の活動が自然環境に悪影響を与えず、長期間に渡って実施し続けられることと言われています。歯科からの SDGs への取り組みはまだまだ少ないですが、予防先進国スウェーデン発 TePe の口腔ケアグッズのほとんどはサステナブル商品となります!(ちなみに、TePe の商品は再生可能エネルギーを 100% 使用して作られています♡)

TePeの中でも人気のスプリーム歯ブラシ、新しくなってどこが変わったのでしょうか?

- ① 大きく変化したのはハンドルの材質になります。バイオベース高密度ポリエチレンとグリップ部にはバイオベース TPE を使用しており、従来と比べると CO2 が 50% 削減されています。触れた感覚はわずかな凹凸があるため指先が滑りにくく、安定した持ち手になります。
- ② ハンドルの色が変わりました。淡く優しいパステルカラーの6色 展開です。
- ③ スプリームコンパクトのネック部分が 5mm 長くなりました。スプリームと同じ長さです。肩の位置が下がったことで前歯部に当たることなく最後臼歯部までしっかりと届きやすくなっています。

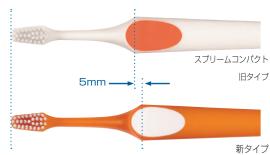

スプリームコンパクトの新タイプはネックが 5mm 長くなった

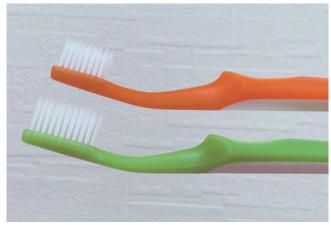

手で圧を加えてネックを曲げることができる

スプリーム最大の特徴、長くしなやかなテーパー毛と短めラウンド毛の二段構造のヘッド部は変化なし。テーパー部の長さが3~3.3mmと長いため歯間部に届きやすくラウンド毛部が潰れる事なく歯面にあたります。

使用方法は45度の角度で歯周ポケットを狙い振動を与えるように小刻みに動かすと歯頸部のプラークが落としやすくなります。またネックを曲げて使用できるため手首が曲がらない方などにも人気で、歯列に合わせたオリジナルの歯ブラシをカスタマイズすることができます。

私自身スプリームの愛好者で、歯肉の痛気持ちいい感覚を感じながら 毎日磨いています。

お勧めの使用方法はズバリ2本使い。私は嘔吐反射が激しく、時間をかけての歯磨きができません。忙しい朝などはラウンド毛のセレクトや GOOD で手早く歯面を磨き、比較的ゆっくりしている夜にスプリームを使用しています。一度に2本使いではないので患者さんからも好評です。ぜひ皆さんも取り入れてみてください。

地球に優しい TePe 商品で、SDGs に参加してみませんか?



淡く優しいパステルカラーの6色展開



スマイル歯科集合写真

患者さんが効率よくセルフケアできる歯ブラシを処方したい!

~ TBI から OHI へ TePe 歯ブラシの処方、はじめました ~

歯科衛生士にとって患者さんのプラークコントロールで 行き詰まりを感じている人は、多いのではないでしょうか。 もちろん、私も日々悪戦苦闘しています。 フリーランス歯科衛生士 西尾歯科 (大阪府茨木市) TePe Extended Clinical Team 歯科衛生士 **下川床 里美**



ある時、後輩歯科衛生士に『患者さんのプラークコントロールのレベルが上がらないんです』と悩みを打ち明けられました。同じ頃、別の後輩が患者さんに TBIをしている姿を見かけました。まさに TBI(Tooth Brushing Instruction) =歯磨き指導を、真面目に、一生懸命に行っていました。その様子を見て、"ここに問題あり?!"…。

歯(Tooth)磨きの正しい方法を教えるだけではなく、もっと OHI(Oral Hygiene Instruction)=口腔衛生指導、口腔(Oral)を意識した患者指導の必要性を感じました。

私も数々の失敗を繰り返してきました。どうしても、口の中のプラークばかり目が行きがちですが、OHIを通して感染のコントロールをしていくことが全身健康の改善につながり、病気の再発も防ぐことができると言えます。そのためには、『私に何ができるだろう…』そんな時、『ラウンド毛で平切りタイプの歯ブラシを導入したい』という話を持ちかけられました。TePeファンの私は、すぐに、『TePeのセレクト歯ブラシを導入しよう!』と提案しました。

その理由の1つに、セレクトの毛先は丸く綺麗にカッティングされていることです。このラウンドカットの顕微鏡写真を見た時、だから歯肉に心地よく、効率良くプラークが除去できるのだと確信しました。

そして、ただ単に TePe の歯ブラシを導入 するだけでなく、導入をきっかけに医療面接 を今まで以上に行い、歯科衛生士一人一人が、 TBI から OHI へ意識を統一し、『どうすれば、 効率よく磨けるようになるのか』『この患者 さんの口腔内なら、どの歯ブラシが良いのか』 を選べる、つまり"歯ブラシを処方する"と いう考え方にシフトすることで、クリニック に新風が吹くのではないかと考えました。 まずは、メーカーからの説明会を通して、処 方する側の歯科衛生士が歯ブラシの特徴を理 解し体感できる場を設けました。事前にカラ フルでかわいい TePe 歯ブラシのサンプル が届いた時は、皆のテンションが上がりまし た!その後、現状の歯ブラシの販売数を確認 し、新規導入の歯ブラシの販売目標本数を決 めていきました。スタッフの意見を中心にコ ミュケーションをとりながら、販売促進チー ム・ディスプレイチーム・在庫処分チームに 役割分担し、院長の西尾先生に相談しつつ何 度も相談を重ねながら進めました。

その結果、まずは下記の TePe 歯ブラシ基本の 4 種類を導入することになりました。

- ① セレクト (ソフト)
- ② セレクトコンパクト (ソフト)
- ③ スプリーム
- ④ スプリームコンパクト です。

この基本の4種類は新人歯科衛生士でも迷うことがないように、処方ガイドなど患者説明ツールも準備し、スタートしました。半年が経った今、TePeの導入によって、歯ブラシの物販は導入前と比べると2倍の販売数になっています!

このような結果につながったのは、TePe 歯ブラシの質の良さ、ユニバーサルデザインであることや、簡単にプラークを落とせるように設計されている等の特徴をスタッフが理解できたこと、またハンドルカラーのバリエーションが豊富なところも患者さん受けが良かったポイントだと思います。

ただ…色に関してはどうしても寒色系が残り やすい傾向がありました。

今ではセレクトコンパクト ソフトのカラーハンドルであれば人気カラー6色から単色で購入できるようになったので、より色選びを楽しんでもらえるようになって嬉しいです。

今回の変化で、スタッフが一丸となって取り扱う歯ブラシを詳しく知り、そして"歯ブラシを処方する"という考え方に近づけたので、自信を持ってお勧めできるようになったことも大きかったと感じています。

これからも、患者さんに喜ばれる高品質なセルフケア製品の処方を、皆で目指していきたいと思います。



西尾院長と歯科衛牛十メンバー



単色指定購入ができるようになった人気の6色

出会って 20 年! **TePe** 愛を語る

私は、考えて、工夫して、そして患者さんと喜び合うことのできる 歯科衛生士の仕事が好きです。

好きが高じて、歯科衛生士育成に携わっています。 私が TePe 製品に出会って、気づけば 20 年近く経ちました。 今では欠かすことのできない、大切なパートナーの歯ブラシについて 語らせていただきます。



TePe 製品を長く愛田してきてお伝えしたいこ とはたくさんあります。その中から悩みながら 3つピックアップいたしました。

- TePe 製品への愛と推し2つ
- TePe のポスター作っちゃった! に至るお話
- ●手に取って学べるラプトレ OSAKA

現在は株式会社ラ・プレシャスの代表として、 15年ほど歯科衛生士の育成を行っています。 医院へ出向いての研修、弊社の研修施設・大 阪にあるラプトレ OSAKA での個人レッスン、 SRP コース、動画サービス「ラプレッスン」 の配信、教育教材の制作、デザイン事業と好き なことを1つずつ形にしながら、歯科衛生士を 長く続けています。





「岡村さんいつも楽しそうですね!」と言われ ます。一はい、その通りです!オンもオフもな いくらい忙しいですが、ニヤつきながら過ごせ ているのは、たくさん学び、工夫してチャレン ジして、うまくいくこと・うまくいかないこと を経験し、現在もチャレンジをしているからだ と思っています。

今では、好きが溢れ、皆さんに歯科衛生士の仕事の 楽しさに気づいてほしくて研修を行なっています。

研修の中でも、早くから満席になるセミナーの一 つに "TBI が苦手な衛生士集まれ! 伝わる TBI" というセミナーがあります。1日かけてTBIを 学んでいただくのですが、セミナーの冒頭で必 ず「私、TBI が好きです!」とお伝えします。

私が嬉しそうに「TBI が好きです!」と言える ようになったのは、実は TePe との出会いが あったからなんです。

■ TePe との出会いは、20 年ほど前!

2人目出産後に復帰した歯科医院で、TePe セ レクトとワンタフトブラシ「コンパクトタフト」 に出会いました。20年前の歯ブラシは小さめ ヘッドが中心でした。ペングリップだと持ちや すい細めのハンドルが多かった中、TePe セレ クトを初めて見た時には正直「こんな大きい歯 ブラシ磨きづらいやん!」と思ったことを今で もしっかり覚えています。

その頃、何度ブラッシング指導をしても PCR が改善しない男性の患者さんがいました。 どうしていいのかわからないまま「一度歯ブラ シを変えてみましょう」と TePe セレクトを 処方し、次回来院時に確認してみると、驚くほ ど磨き残しが減っているのです。私が喜ぶ姿を 見て、患者さんが教えてくれたことがあります。 「今までの歯ブラシと同じように5回動かして も、新しい歯ブラシはしっかり当たっていると 感じる」

「何度練習してもうまくできなかったけど、歯 ブラシを変えると磨けるんだね」と言われた時 に、多くのことに気づきました。

- ・自分が使いやすい歯ブラシを処方していたこと
- ・自分のやり方を押し付けていたこと
- ・患者さんのバックグラウンドや口腔内を見て 歯ブラシを処方する大切さ、、

歯ブラシをキチンと勉強しようと決めたのは、 TePe セレクトに出会ったおかげです。

これを機に歯ブラシについて学ぶと、改めて歯 ブラシの持つチカラに気づき、それを伝えたい 気持ちが生まれました。

相手に理解してもらえるための伝え方は?と考 えながら説明すると、少しずつ目の前の患者さ んの歯肉が変化し始めたのです。

昔も今も変わらず患者さんには「岡村さん、ほ んとうに歯ブラシが好きなのね~| と笑ってい ただけます。

処方した歯ブラシを渡して終わりではなく、使 いこなせるようになるまで患者さんをサポート したいと思っています。



チャレンジ話の一つですが、歯ブラシのチカラをもっと 伝えたいと、17年ほど前にブラッシングショップを開い ていたことがあります

■ 岡村の"今"推し商品

全てのラインナップが好きなんです。

一人一人違う口腔内に対して、適した歯ブラ シを選ぶとなると、スタンダードな歯ブラシ だけではなく、スプリームのような歯間部に 挿入しやすい歯ブラシや、知覚過敏・強い炎症 時に処方するジェントルケアのように柔らかい 歯ブラシ、、と種類は必要だと思っています。 TePe 製品には"こんな時どうしよう?"を解 決するラインナップが揃っています。

TePe 製品を使用して20年、全ての商品を 知ってる!と思っていたのですが、最近驚く発 見がありました。存在は知っていましたが、手 にする機会がなかった商品「ミニフロッサー」



診療補助

いただいたのを機に使用してみたところ、対合 歯でゆっくり噛みながら通す、その感覚が面白 い!何度もカチッカチッと噛む感覚が楽しく て、フロスを入れることを楽しんでしまう商品 でした。

叢生部などの狭いコンタクトにはもちろん、フ ロスの習慣付けが課題の患者さんにもおすすめ しています。

「面白くてまたやりたくなっちゃうフロスがあ るんですよ~」と言いながら噛んでもらってい ます。



勝手にこんな POP も作って、密かに普及活動を行なって います

■ 岡村の"ずっと"推し商品



推し商品2つ目、それは「コンパクトタフト」

コンパクトタフトも歯ブラシ同様、毛の長さ、 毛束の量で使用目的が変わります。

タフトブラシは、小さいがためにどこを磨いて いるのかわからなくなることがあるのですが、 少し不器用さんにもお勧めすることができるの が TePe の「コンパクトタフト」です。

安定感が出るように考えられた、フィラメント の長さと量。

700 本のフィラメントがしっかりとプラーク を除去してくれます。

形状もドーム状になっていて、最後臼歯部や、 下顎舌側、叢生部位など、スタンダードでは 届きづらい部位を磨くために作られた歯ブラ シです。

私は20年愛用し続けています。

子供の仕上げ磨き、わんこの歯磨き、知り合い にプレゼントした数は数え切れない、、、それほ どの推し商品です。

■ そして、TePe のポスター作っちゃいました!

テペ好きの私が、昨年 TePe のポスター制作 をさせていただきました。弊社は教育会社です が、人に伝えるためにはデザインのチカラが必 要と考え、4年ほど前からデザイン事業を行 なっています。



小林さんと TePe を語った日の写真

ご縁がつながり、クロスフィールド社の歯 科衛生士 小林さんと出会いました。2人で TePe について語り合い、ポスター制作の依 頼を受けた時の私の嬉しさは言葉にできない ほどでした。

多くの歯科衛生士さんに TePe 製品に興味を 持っていただき、そこから患者さんに広がって いくことを想像しながら制作したポスター。

研修で医院にお伺いした時にポスターを目にす るとニンマリしています。

たくさんの医院にこのポスターが飾られ、患者 さんがオーラルケア製品に興味を持っていただ けたらと思います。



■ 手にとって学べるラプトレ OSAKA

私たちは歯ブラシを処方するプロとして、各 メーカーから出ている歯ブラシの特徴などを 知ってほしいと思い、弊社の研修施設「ラプト レ OSAKA」には手に取りやすい場所に 歯ブラシをたくさん並べています。





少しクスッとする POP をつけての展示です。 写真オッケー! そのまま真似てもらってもオッ ケー!とお伝えしています。

研修に来られる歯科衛生士さんは、TePe 製 品を手に取られ、自分に合う歯ブラシ選びを されています。

患者さんにも同じように、

- 自分の手で隅々まで清潔にすることで、お口 の健康だけではなく身体の健康につながること
- 歯ブラシには多くの種類があり、その中から 自分に合ったセルフケアグッズを選ぶことが 大切

ということを知ってほしいと思います。

歯周病予防、治療、管理には歯ブラシや、歯間 ブラシは必要不可欠です。

そのためには、患者さんにどのように伝えるか が大事です。

今後も、わかりやすいセミナーを行い、歯ブラ シについて楽しそうに語ることができる歯科衛 生士さんを育てていきたいと思っています。

←こちらのポスターをご希望の方は、 取引先歯科商店様へご請求下さい。 (A3 サイズ:無料)



オリジナル歯間ブラシ

Interdental Brush Original



ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスティックでコーティングされ、 サイズは 9 種類でそれぞれ色により識別しやすくなっています。

......



キャップはハンドルとして使用可能

- 8本入パック 1パック単サイズ8本+キャップ1本入(グレー、ブラックはキャップなし)
- 6本入ブリスターパック
- アソートパック 1パック ピンク~グレー 各1本 計8本(ブラックを除く)+キャップ1本入
- 25本入パック 1パック単サイズキャップ付 25本入(グレー、ブラックはキャップなし)
- 個別包装(キャップ付) 150本入 (グレー、ブラックはキャップなし)

アングル歯間ブラシ

Interdental Brush Angle



臼歯部や、舌側、口蓋側からのアクセスが容易なアングルヘッド。 ワイヤーは歯面を傷つけないようにプラスティックでコーティングしてあります。



- 6本入ブリスターパック 1パック単サイズ6本+キャップ1本入
- アソートブリスターパック 1パックピンク~グリーン各1本計6本+キャップ1本入
- 25本入パック 1パック単サイズキャップ付 25本入
- 個別包装(キャップ付) 80本入

セレクト Select

お手頃な価格で高品質なテベのスタンダード。密でコシのあるフィラメントが効率よくプラークを除去し、爽快なブラッシングを提供します。



ハンドルの色はアソートになります

- セレクト ミディアム
- セレクト ソフト
- セレクト エクストラソフト
- セレクト ソフト ブリスターパック
- セレクト エクストラソフト ブリスターパック
- セレクト ミディアム 100本入
- セレクト ソフト 100本入
- セレクト エクストラソフト 100本入

セレクトコンパクト Select Compact

ヘッドのサイズがコンパクトなセレクト歯ブラシです。 お子さんや小さめのブラシヘッドをお好みの大人の方に最適です。



ハンドルの色はアソートになります

- セレクトコンパクト ミディアム
- セレクトコンパクト ソフト
- セレクトコンパクト エクストラソフト
- セレクトコンパクト ソフト ブリスターパック
- セレクトコンパクト エクストラソフト ブリスターパック
- セレクトコンパクト ミディアム 100本入
- セレクトコンパクト ソフト 100本入
- セレクトコンパクト エクストラソフト 100本入

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

これからの地球にやさしい歯ブラシ

グッド G〇〇〇



これまでのテペ歯ブラシのクオリティとデザインはそのままに、環境に配慮したシリーズです。 再生可能なバイオベース材料を使用し、CO。の排出を95%リサイクルさせることが可能なので、地球温暖化 に深刻な影響を及ぼしている温室効果ガス排出への影響がほとんどない、環境にやさしいサステナブルな歯ブ ラシです。



ハンドルの色はアソートになります

- GOOD(グッド) ソフト
- GOOD(グッド) コンパクト ソフト
- GOOD(グッド) ミニ エクストラソフト
- イラスト入り 🔳 GOOD(グッド) ソフト ブリスターパック
 - GOOD(グッド) コンパクト ソフト ブリスターパック

■ GOOD(グッド) ミニエクストラソフト ブリスターパック イラスト入り





人気のスプリーム歯ブラシシリーズが環境に優しいサステナブル素材になりました

スプリーム Supreme



長くしなやかなテーパー毛と短めのラウンド毛の2層構造。長い毛先が歯間部や歯周ポケット、補綴物や矯正器具の隙間などの細かな部分に到達し、同時に短い毛は歯面をすっ きりと磨き上げます。また、ソフトな磨き心地がお好みの方にも最適です。サムパッド(親指当て)と背面に滑りにくい素材(TPE)が使われており、手にしっくりなじみます。



- スプリーム
- スプリーム ブリスターパック
- スプリーム 80本入



ハンドルの色はアソートになります

- スプリームコンパクト
- スプリームコンパクト ブリスターパック
- スプリームコンパクト 80本入

Q. どんな素材なの?

・フィラメントの材質: ポリブチレンテレフタレート

・ハンドルの材質: バイオベース高密度ポリエ チレン

・グリップ部: バイオベース TPE

フィラメントは従来のスプ リームと変わらない優しい磨 き心地、ハンドルだけサステ ナブルな素材になりました。

Q. ハンドルカラーは?

A. スプリームもスプリーム コンパクトも共通の明るく ポップな6色展開です。



Q. デザインは変わったの?

A. スプリームコンパクトは、 ネック部分が従来より 5mm ほど長くなり、さらにアクセ スしやすくなりました。スプ リームは従来通りです。



ネックが約 5mm 長くなっ たことで、ハンドルの肩の位 置が下がりました。





TePe 社が取り組むサステナビリティ

- ・製造工程全体で 100%、風力や太陽エネルギーといった再生可能なエネルギーを使用しています
- ・製品や包装を可能な限り再生可能なバイオベース材料にすること、そして廃棄物を最小限に抑えるよ うに取り組んでいます

SUSTAINABLE G

TePe Oral Hygiene Products / クロスフィールド株式会社は 持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています

インプラントの自己メンテナンスは

適切な歯ブラシの選択が重要!

TePe ユニバーサルケアと インプラント矯正ブラシの活用

東京ステーション歯科クリニック (東京都 中央区)

歯科衛生士 岩井 理子



この約20年で開業医の臨床現場でインプラント 治療が急速に普及しました。近年の調査では、歯 科医院数 68 千件のうち約 35%の歯科医院でイ ンプラント治療が行われ、年間約45万本のイン プラントが埋入されていると推測されています。 (2016年度版、歯科器械・用品年間より¹⁾) インプラン ト治療を行っていない歯科医院でも、口腔内に インプラントが装着されている X 線写真を見る ことは、決して珍しくないでしょう。2015年 の Derks J らの報告 2 によると荷重後インプラ ント周囲疾患の罹患率は、インプラント周囲粘膜 縁が 43%、インプラント周囲炎が 22%となり、 決して希な疾患ではないことを示しています。更 に2017年のワールドワークショップで、歯周 病とインプラント周囲疾患の分類のコンセンサス レポート 3) からインプラント周囲粘膜炎の治癒期 間は3週間以上かかると報告されています。天 然歯よりも治癒期間がかかるのです。

このことから我々歯科衛生士は専門家としていかにイ ンプラント周囲疾患を発症させないように、また発症 している場合の自己メンテナンスについて、患者へ原 因やどのようにコントロールすれば良いかの具体的な 指導をし、天然歯よりも治癒期間がかかることを伝え 根気強くサポートすることが必要となります。

患者に伝える2つの事項

- 1. インプラントは人工物であるため虫歯にはなら ないが歯周病と同じ嫌気性菌に感染すること。
- 2. インプラントは周囲疾患を発症した場合、天 然歯よりも治るのに時間がかかること。

上記の事を理解してもらい、インプラントの自己 メンテナンスはインプラント周囲粘膜溝のプラー クコントロールが必須であることを伝えるのです。 具体的には歯ブラシの毛先をインプラント周囲粘 膜溝へ挿入し酸素を入れることにより嫌気性菌の 増殖を防ぎ、さらに歯ブラシの毛細管現象により 嫌気性菌を吸い上げる効果により減少させる。 この事を実践できる歯ブラシの選択が必須となり

今回は臨床でインプラント周囲疾患を発症してい る症例において、インプラントのケアを目的とし て開発された TePe 社のユニバーサルケアとイ ンプラント矯正ブラシを用いて自己メンテナンス の指導する際の要点について報告致します。

本症例は他院でインプラントの治療後に知人の紹 介で来院されました。就寝中、口腔内に血液が溜 まり不快感で目が覚めるとのことでした。患者に は、上部構造の形態が自己メンテナンスを困難に していることを説明しました。

- 1. インプラントの上部構造の歯冠長が長く歯ブ ラシが届きにくいこと。
- 2. 審美性を確保するためにインプラントの上部 構造の形態が頬舌的にも近遠心的にも突出し

ているため、一般的な形態の歯ブラシではイ ンプラント周囲粘膜溝に適切に歯ブラシが届 かないこと。

このことを歯科衛生士が理解した上で、患者に 伝える2つの事項を説明します。その後、頬側 はインプラント矯正ブラシを、口蓋側はユニバー サルケアを用いてインプラント周囲粘膜溝とポン ティックの基底部への歯ブラシが適切に届くこと を患者と共に確認しました。

指導を始めてから4ヶ月間、初めは1週間、後 に2週間の間隔でOHIとインプラント周囲粘膜 溝内の洗浄を繰り返し行いました。

約2ヶ月後にはインプラント周囲粘膜の炎症の改 善が診られ、患者も安眠できるようになりました。

インプラント周囲疾患は歯周疾患の原因とされ ている嫌気性菌が検出されていると 1991年 Rosenberg ES らが報告⁴⁾ しています。いかに インプラント周囲粘膜内の嫌気性菌を少なくする かということに焦点を当てて自己メンテナンスを 行うことで、良好な結果を維持できるのだと思い ます。

1) 歯科機器・用品年鑑 2016 年版 (26 版) アールアンドディ編

2) Derks J, Tomasi C.

Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:S158-171.

3) Berglundh T, Armitage G, Araujo MG, Avila-Ortiz G, Blanco J, Camargo PM, Chen S, Cochran D, Derks J, Figuero E, Hämmerle CHF, Heitz-Mayfield LJA, Huynh-Ba G, Iacono V, Koo KT, Lambert F, McCauley L, Quirynen M, Renvert S, Salvi GE, Schwarz F, Tarnow D.

Tomasi C, Wang HL, Zitzmann N. Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions.J Clin Periodontol. 2018 Jun;45 Suppl 20:S286-S291

4) Rosenberg ES, Torosian JP, Slots J.

Microbial differences in 2 clinically distinct types of failures of osseointegrated implants. Clin Oral Implants Res. 1991 Jul-Sen:2(3):135-44



インプラント・矯正ブラシにてインブ ラント周囲粘膜溝へ歯ブラシを当て る。歯ブラシの幅が細く歯冠長が長く ても適切に歯ブラシの毛先が届く。





ユニバーサルケアは口蓋側のインプ ラント上部構造の歯冠長が長く、更 に形態が不自然に突出している部位 も歯ブラシの毛先が届きやすい。



柄が屈曲していることにより、 視野が確保されやすい形態と なっている。



来院時のインプラント周囲疾 患を発症している状態。



メンテナンス後、インプラン ト周囲粘膜の炎症の改善が診 られる。

Products Information



ユニバーサルケア Universal Care

独特な角度のネック部により、インプラントまたはブリッジなど大き目の補綴物への口蓋側・舌側からのアクセス に優れています。また、舌側矯正装置周辺のクリーニングにも適しています。

ハンドルの色はアソートになります ブリスターパックのみ

ユニバーサルケア



インプラント・矯正ブラシ Implant Orthodontic Brush

長く、細いネックと2列のブラシで、インプラントの頬側・唇側からの歯頸部へのアクセス、また矯正装置の周り のクリーニングに適しています。

ハンドルの色はアソートになります

■ インプラント・矯正ブラシ

世界

世界中で愛されるガムチャックスフロス

国際的に活動する歯科衛生士たちが感じる 臨床現場でのガムチャックスの可能性~

> 国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n 日米歯科衛生士 藤森 直子



国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n ~ since 2021 ~

国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n のメンバーの中から、学びを止めない国際的な歯科衛生士12人でディスカッションを実施いたしました。症例検討だけではなく、このように1つの商品についても歯科衛生士が集まり、様々な意見を交換しています。

世界中の歯科衛生士との交流を繰り返す Team Grin'n では、これまでに様々な国で活躍する歯科衛生士に出会ってきました。今回のテーマであるガムチャックスについては、これまでアメリカやヨーロッパなどで多くの歯科衛生士が臨床の場で患者様に処方しながら口腔ケアを提供していることを知る機会がありました。

この度、チップが一般・矯正どちらでも使用できるユニバーサルタイプへとリニューアルしたガムチャックスを、まずそれぞれが実際に臨床にて使用し、定例勉強会で意見や経験のシェアをさせていただきました。

【ユニバーサルになった新タイプについて】

川崎: 矯正治療中の患者さんに対して、今までは ワイヤーに向けて挿入するチップを選んで使うこ とへの患者教育が必要でしたが、患者様がチップ の形態や利き手などを考えることなく、より簡単 に口腔内で使うことができました。



幸町歯科口腔外科医院 川崎佳代子歯科衛生士 提供

木村: ガムチャックスは力加減のコントロールがしやすく、力強く押し入れても歯肉を傷つける等の不快感が少ないと喜ぶ人が増えました。歯科衛生士目線でも、メンテナンス時に歯肉に外傷を与えることなく管理してもらえている様子が見られました。

中丸:指の太さや、器用さなど気にせずに処方ができ、どんな患者様でも奥まで使いやすいことが助かっています。

妹尾: 両手で持てることが安定感を高め、細かい 動きが簡単にできます!特に手が汚れにくいところが私の患者様はみな喜ばれていました。

宮坂: ガムチャックスはフロス部分を歯間に入れた後にたわませることができるので、縁下までの清掃性が高いです。ガムチャックスはハンドルで操作するので指導時も患者様がホームケアをされる際も鏡で確認しやすく、適切に歯間のクリーニングができます。



なかい歯科クリニック 福島朋美 歯科衛生士 提供(写真はガムチャックス旧モデル)

後藤: ガムチャックスは引っかかりにくく、引っかかっても外れやすいので対処がしやすく、これまでの経験で補綴物が外れてしまった等、フロスの使用が怖かった方でも安心して使っていただいています。石垣: ガムチャックスは持つだけで簡単に"C シェイブ"ができるので、意識しなくても歯面にしっかりと沿わせて縁下まで入れることができました。



C シェイプで歯肉縁下まで挿入しやすい 写真:幸町歯科口腔外科医院 川崎佳代子歯科衛生士 提供 (写真はガムチャックス旧モデル)

吉田: プッシュボタンでフロス部分を外すなど遊び心もあって、小児への人気も高いです。 導入し やすく定着もしやすいから助かっています。

福島:小児本人の興味を引くだけでなく、保護者 からも**仕上げ磨きの際に使いやすい**と好評です。

藤森: 矯正装置の間に完全にチップ部分の突起が 入らなくてもある程度は奥までフロスを動かすこ



写真: なかい歯科クリニック 福島朋美 歯科衛牛十 提供

とができるので、全くフロスが習慣化されていない状況で開始された**矯正患者にとっても良いスタートになり**ます。

宮: 見た目でモチベーションが上がり、特に**小児** 患者への定着度が高いので助かっています。



座談会の様子

以上が、今回の国際歯科衛生士交流会 Team Grin'n の定例会でガムチャックスの有効性についてディスカッションした内容でした。知識や経験・考えをシェアすることで臨床での対応策や応用策が増え、明日からの臨床に早速効果が出ることを再認識しました。

この経験によりガムチャックスへの理解と臨床内での応用の仕方の引き出しが増えて、ますますパワーアップして患者様へのフロス指導に日々奮闘しています。 学びを止めない Team Grin'n からのメッセージが一人でも多くの歯科衛生士仲間へ届き、臨床にてこのエッセンスを活かしていただけますと幸いに思います。



歯科衛生士にも、患者さんにとっても負担が少ない

エルゴフィンガー エアーフロー用ノズル

歯科衛生士は肩こり、腰痛に悩まされるお仕事だと思います。 エルゴフィンガーを使用すると、そういったことが軽減できて 患者さんにも優しく、パウダーの飛散を最小限に抑えられます。

オーラル美容家 予防審美専門歯科衛生士





私は歯科衛生士になってから約18年目となり、現在はフリーランスの 予防審美専門歯科衛生士として、予防セミナーやホワイトニングのセミ ナーをさせていただきながら、予防をメインとした臨床を東京都でさせ ていただいております。

予防が大切であることに関して、歯科衛生士として熟知しているという よりは、自分自身に治療の経験があるのでよく実感しているという感じ になります。

お恥ずかしい話ですが、以前失活した歯があり、再治療を繰り返し、し まいには歯根が破折し、最終的に抜歯をすることになりました。「なるほ どしと、身をもって歯の予防の大切さを体感しているのです。自分自身 で体感しているからこそ、治療の大変さ、怖さ、根尖病巣の痛み、歯の 管理の大変さ、歯のお悩み、予防の大切さ、定期検診の重要性などがよ くわかります。

だからこそ、患者さんには「私のような思いをしてほしくない!歯を削 らなくてもいいようにしてほしい!」と強く思うようになりました。

そこで、予防を極めようと、とにかくがむしゃらに勉強しました。私の メインテナンスの基礎となっているのがパウダークリーニングです。パ ウダーを使う時は、バキュームテクニックがとても大切です。

ご存知の方も多いかと思いますが、パウダーは広範囲に飛散してしまいま す。お口の中は粉まみれ、お口の外も、粉まみれ。しまいには、自分自身 の制服、そして顔までも粉まみれになります。私も初めて使った時はそん な状態でした!

しかし、バキュームテクニックを見直したところ、そのように飛散することが 随分軽減されました。それでも、ノズルから出てくるパウダーは円錐状に放出 されるので、通常のバキュームチップでは拾いきれないことが難点でした。

そこで出会ったのが、このエルゴフィンガー エアーフロー用ノズルです! 発売当初は通常のノズルだけだったのですが、2年後くらいに発売され てとても驚きました!「これだ!」と思い、使ってみるとかなりいい! エアーフローから出てくる粉をキャッチできます!



エルゴフィンガー エア

エルゴフィンガー 通常のノズルと エアーフロー用ノズルの先端の広がりの違い

.....

ノズルを使用

エルゴフィンガーの好きなところは、まず何といっても指で操作できる ところです!指でダイレクトに頬粘膜を引っ張ることができるので、私 たち歯科衛生士だけでなく、患者さんにとっても負担が少ないです。 歯科衛生士としては、正しい姿勢を保ちながらバキュームを把持できま す。そして、ノズルの先を中指で操作することでミラーを把持できるので、 一石二鳥のスムーズな操作が可能です!

また、患者さんにとっては、頬粘膜などを引っ張られる力が優しく感じ ます!これは、私自身が患者さんとして体感済みなので、是非皆さんも お試しください♡歯科衛生士が指で引っ張るという感覚なので、通常の バキュームを使う時より少し優しくなります。

歯科衛生士は肩こり、腰痛に悩まされるお仕事だと思います。エルゴフィ ンガーを使用すると、そういったことが軽減できて患者さんにも優しく、 パウダーの飛散を最小限に抑えられます。良いことばかりのエルゴフィ ンガー エアーフロー用ノズルです! 是非、皆さんもお試しくださいね」

Products Information





商品名 エルゴフィンガー 販売名: エルゴフィンガー 医療機器届出番号 13B1X00133000067

S-M サイズ 標準価格 9,900円(税込10,890円)/50個入@198/個 🔳 L-XL サイズ 標準価格 9,900円 (税込 10,890円) /50個入 @198/個 動画はこちらでご確認ください

商品名 エルゴフィンガー エアーフロー用ノズル 標準価格 2.400 円 (税込2,640円) /50個入 @48/個

*S-M / L-XL サイズ共通 (ノズルの挿入径は同じ大きさです)

エアーフロー用ノズルの使用方法動画は **
こちらをご覧ください **ロ**



歯周基本治療を成功させるために耐久性を追求した グレーシーキュレットの選択

~シャープニングフリーで長い耐用年数、 身近にできる SDG sへの取り組み~

医療法人真摯会 クローバー歯科クリニック (大阪府豊中市)

歯科衛生士 成田 千紘



今回 DH HIYOKOCLUB 代表の堤内久枝先生とご縁があり、院内セ ミナー SRP ベーシック 5 日間コースに参加させていただきました。 DH HIYOKOCLUBの堤内先生は、医院プライベートセミナーのほか、 診療中に訪問して実際に一緒に患者さんを診る OJT も行っています。 こちらのセミナーに参加する以前、当院では他社のシャープニングが 不要なグレーシーキュレットを使用しており、日々追われる歯科衛生 士業務の中で、シャープニングフリーであることにメリットを感じて おりました。

使用するインスツルメントやインスツルメントのメインテナンスを しっかりと行うことが歯周基本治療を成功させるために大切というこ とで、これを機に KOHLER 社のグレーシーデュラビリティーに変更 しました。特徴としては、ハンドルが軽く耐久性・耐熱性に優れており、 シャープニング回数を抑えられるという点があります。

切れ味の悪くなったスケーラーを使用していると術者側の指、手、腕 に必要以上に負担をかけてしまい、患者さんへも不快感を与えること があります。ですが実際にグレーシーデュラビリティーを使用してみ ると、ハンドル部分は軽く切れ味が抜群でカッティングエッジの幅が 細いので痛みを与えることなくポケット内への挿入ができ、垂直・水 平ストロークの操作もとてもしやすかったです。また、シャープニン グせずに数十回使用しても切れ味にそれ程差はありませんでした。(切 れ味が悪くなった場合はシャープニング可能です) 歯面に当てると程 よくしなり、小臼歯の近遠心に見られる根面溝や大臼歯の根分岐部に も当てやすいです。硬い歯石を除去する際は少し力をかける必要があ りますが、ハンドル部分がしなることで、患者さんへの負担は少ない ように感じます。

こちらのミニタイプも取り入れており、アクセスしにくい部位のSR Pやデブライドメントにもとても便利です。第1シャンクが長いため、 大臼歯の隅角部分の丸みに沿って回転させやすく、根分岐部ではエッ ジを根面に沿わせやすいので歯石の触知もしやすいです。



ハンドルには凹凸があり指がフィットしや すい形状



ミニタイプはカラーコードを付けてレギュラ-との違いが一目でわかるようにしています

グレーシーデュラビリティーを使用するようになり、切れ味が格段に 変わったので SRP の成功率はもちろんですが術者側の疲労も軽減さ れました。シャープニングフリーなのでインスツルメントのメインテ ナンス回数も減り、業務時間の短縮にもつながります。切れ味が長期 間持続しシャープニングの回数も少ないと耐用年数が長くなるので、 器材のコストダウンができ患者さんや術者、医院の運営側3面から見 てもメリットは大きいと感じます。スケーラーを大事に使うことで私 たちが取り組める SDG s にも当てはまるのではないでしょうか。



ファントムを使用した SRP セミナー実習 デモの様子



セミナー参加者、堤内先生と記念撮影

Products Information

Made in Germany



ドイツ 歯科用器具トップメーカー 世界80カ国以上で使用されています

切れ味が長期間持続! シャープニング回数の削減! シャープニングも可能!

- ・アクリル $^{*\,1}$ に 9,600 回ストローク、ブラスメタル $^{*\,2}$ に 4,800 回ストロークを行っても切れ味が 持続するので、シャープニング回数を抑えられます。*3
- ・高品質なドイツ製のステンレス鋼製で、シャープニングも可能です。
- ・人間工学に基づいた凹凸のあるデザインのため、滑りにくく、緻密で繊細な作業を正確に行うのに 適しています。

* 1:テストスティック * 2:テスト用真鍮金属 硬度 90HB Brinell * 3:KOHLER 社試験による







無痛治療を目指す先生へ パロジェクトシリンジの特徴

くげぬま海岸歯科クリニック (神奈川県藤沢市)

院長 三浦 陽平



パロジェクトシリンジを使うようになったきっかけは、明海大学のオーラルリハビリテーションセミナーに参加したことです。 講師の南清和先生から、「痛くない麻酔」を 患者様が実感する注射器ということで、紹介 して頂きました。

パロジェクトシリンジの特徴として、以下が 挙げられます。

- とてもコンパクトなので、非常に使いやすい。
- ・手の小さい方や女性の方でも、 持ちやすい。
- ・クリックするだけで、簡単に注入が可能。
- ・クリック時の抵抗感で、麻酔液の 注入スピードを変えることができる。
- ・耐酸性のステンレス製なので、とても丈夫。
- ・オートクレーブでの滅菌も可能。
- ・歯根膜腔隙麻酔専用として 設計されている。
- ・テコの原理により、強い圧力で 麻酔薬を入れることができる。
- ・ワンクリックで 0.06ml の麻酔薬が注 入されるので、クリック回数で麻酔量 を把握しやすい。

パロジェクトシリンジは繊細な操作ができます。 手のひらで押すのでなく、**人差し指でクリックする操作は、とても楽**です。(写真 1)



(写真 1) 人差し指で簡単にクリック

歯科医師にとって、**局所麻酔は常に必要な処** 置ですから、その時間のストレスを減らせる のは助かります。

パロジェクトシリンジの使用時に人差し指で 抵抗感を感じたら、無理に麻酔薬を注入しな いことを心がけておくことで、**無痛麻酔が容 易に行えます**。

全体を滅菌できますから、外科処置の麻酔の際にも当院では重宝しています。

歯根膜に麻酔薬を注入するには強い力が必要 となりますから、人差し指ではなく親指でク リックしても構いません。(写真2)

.....



(写真2) 親指でクリックして歯根膜に麻酔可能

抵抗感を感じない場合は、歯根膜以外の箇所 に麻酔薬が漏れていますので、その点は注意 してください。

パロジェクトシリンジを3ないし4クリックして、歯根膜に約0.2mlの麻酔薬を注入するだけで、十分な鎮痛効果が期待できます。

当院では、パリジェクトシリンジを7本導入 し、全ての診療台に完備しています。

先生方がパロジェクトシリンジを使用することで簡単に無痛治療を患者様に提供できるはずです。

また、少ない麻酔量で鎮痛効果が得られます ので、コスト削減にも役立つと思います。

Products Information



- パロジェクトシリンジの特長
- 麻酔薬の注入には強い力が必要ですが、クリックするだけで容易に注入できます。
- 頑丈なバレルにより安全性が保たれます。
- 操作が簡単で、コンパクト、機能性に優れています。
- 耐酸性のステンレス鋼を使用。オートクレーブによる滅菌が可能です。
- 歯根膜腔隙麻酔専用
- ワン・クリック 0.06mL 注入。 押す速度により注入の遅延が計れます。

緑予防 予防歯科 診療補助 インスツルメント 抜歯外科器具 デンタルミラー 切削研磨バー

クリアで明るい視野によってもたらされる 鮮明な治療情報と高い診療効果 ピュアリフレクト ミラー

鎌倉デンタルクリニック (神奈川県鎌倉市)

院長 三橋晃




根管治療において、根管内の深く暗い世界を できるだけ明るく照らすことは診断だけでな く治療の精度をも向上することには疑う余地 がない。明視野を手に入れることができる歯 科用マイクロスコープの購入にあたり、その 光源をハロゲンにするか LED にするか、キ セノンランプにするかを相談されることがあ る。もちろん術者自身の診療スタイルや予 算によって選択をすれば良いのだが、実は今 使っているデンタルミラーを替えるだけで驚 くほどの明視野を簡単に得ることができるの である。「ピュアリフレクト ミラーは特殊な タンタルコーティングが施され、約95%の 高い反射率を・・・」とカタログ上ではいか ようにも情報を得ることができるが、このミ ラーが究極に明るいことは実際に実物を手に 取って、マイクロスコープを通して覗いたと きにはじめて「あっ!」と気づいてもらえる のかもしれない。「全然違う。明るい。」この 世界を知らない先生と知った先生では臨床中 のストレスの度合い、診療結果にも差が出る のではないかと思っている。


表面反射タイプと言われるこの種類のミラーは反射像が二重にならないので、マイクロスコープを使用した治療終了後に患者へ「今日の治療のダイジェスト」を説明する場面でもビデオ動画や静止画がとてもクリアに再現され最高の威力を発揮する。汚れた暗いミラーから記録された画像を見せられた患者は非常に退屈で興味を引き出せず、術者本意の自己満足な説明になりがちであるが、クリアで鮮明な画像を治療情報として提供することは患者の施術されている治療への関心と理解度を深め、信頼感を獲得することに貢献できる。

また、ピュアリフレクト ミラーで明るくクリアに撮影された記録資料は DR 間、また

は DH を含むコ・デンタルスタッフ間で行 われる院内研修や勉強会でのスキルアップ の糧に、そして学会やセミナーでのプレゼ ンテーションに使用した場合には高い評価 が得られることに違いない。弱点は表面反 射ミラーの宿命である傷付き易さと比較的 高価であることであるが、私のクリニック では新しい「ピュアリフレクト ミラー」を 画像撮影用として卸し、傷がつかない使い 方と管理を徹底している。特にオートクレー ブ時はガーゼなどでミラー表面を覆ったり、 シリコン製力バーを使用したりしてほかの 器具との接触を避けるよう心がけているが、 それでも傷付いたミラーは普段使い用とし て頻用するようリーズナブルに回転させて いる。費用対効果以上が得られるピュアリ フレクト ミラーをぜひマイクロスコープ診 療に活用させていただきたい。

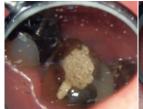



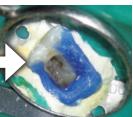

傷付いて汚れた ACTEON 社の内面反射ミラー(左)よりも 傷のないピュアリフレクト ミラー(右)の方が見やすい。*

製造メーカーにて取り扱いのミラーによる比較 波長 (nm)

(左) チタンコーティング表面反射ミラー (矢印:MB 根管) と比べ、(右) ピュアリフレクト ミラーではより明視される。*

MB 1 & 2 根管拡大形成終了。 クリアで鮮明な治療情報の画 像は患者も納得。

* ACTEON 社比

Products Information

- 約 95% 以上の高い反射率
- 広い波長範囲でほぼ一定の反射率
- 診療ストレスの緩和

商品名 ピュアリフレクト ミラー

販売名: ピュアリフレクト ミラー 医療機器届出番号 13B1X00133000052 12本入り サイズ 0 サイズ 2

標準価格 各 1 6,800 円 (税218,480円) 12本/パック@1,400円 (税別) 12本入り サイズ4 サイズ5

標準価格 各 6,780円(税込7,458円) 12本/パック @565円(税別) 1本入り サイズ4

標準価格 850円(税込935円)/パック

小児用ラバーダムフレームについて

小児の治療でラバーダムを使用することは、処理時間の短縮、誤飲、誤嚥の防止、 マイクロスコープの使用等々、メリットは多くあります。

医療法人真穂会 ますだ歯科医院 (愛媛県宇和島市)

歯科医師 佐伯 真未子



当院では5年程前から根管治療や、露髄しそう なカリエスの処置には必ずラバーダムを使用し て処置を行っておりました。

しかしながら、小児の診療では、度々休憩が必 要ではないか、口を覆われることに不安を感じ るのではないか、という心配もあり使用に踏み 切れずにおりました。

この度、小児でもより安心な診療を行うため、 小児用ラバーダムフレームを導入しました。 まず、マネジメントしやすい10歳 男児の感染 根管治療に使用しました。本人も全く苦ではな かったようです。その後、生切(生活歯髄切断) を行う6歳児、抜髄が必要な6歳児と、次々と使 用するようになりました。*対象は主に麻酔がで きる、治療の必要性を理解できる子供たちです。

小児の治療でラバーダムを使用することのメ リットは多く、

①処置時間の短縮

適宜、顎の休憩を挟みはしますが、うがいと 口を完全に開け閉めする時間の短縮になり ました。防湿にかけていた時間も不要です。

②誤飲、誤嚥の防止

子供特有の状態として、泣きながらも本 人が決心して治療に臨む、という状況が 時々あります。しゃくりあげたり、涙が 出てしまいながらも「頑張る」と言うので、 横で親御さんに応援してもらいつつ処置 をします。このような場合、注水すると 誤嚥を惹起しそうですが、ラバーダムを 使用することで子供の頑張りを尊重しつ つ、且つ安全に処置することができます。

③マイクロスコープの使用

ラバーダムを使用し始めたことでマイクロ スコープが使用できるようになりました。 処置時間の短縮に加えて、横に付き添う親 御さんにも現状を説明しやすくなりました。

特にこのフレームの特徴として、

①中央で折れ曲がるため、横からの唾液 の吸引が可能

子供は口腔底が浅いために排唾菅を嫌がる 傾向があります。でも、このフレームであ ればタービンが止まったタイミングなどで 横から吸引することが可能です。

また、万が一嘔吐した場合にも、直ちにフ

- レームを曲げれば嘔吐物を口腔外へ出すこ とが可能です。
- ②ピンの部分が尖っており、上下に付い ているので、ラバーを掛けやすい
- ③湾曲したフレームが子供の小さな顔に フィットする

ー 小児のラバーダム使用の注意点 ー

平成29年にあった事故の影響で、世間の小児 歯科治療におけるラバーダムの使用に否定的なイ メージを持つ方もおられます。そこで、以下のこ とに注意しながら当院では治療を進めております。

- ①穴を開ける位置、フレームの位置に注 意し、鼻を塞がないように装着する
- ②処置中は常に声かけを行い、反応を確認する
- ③ラバーダムを装着する時は基本的に浸 潤麻酔を行い、クランプの締め付けによ る痛みは感じさせないように配慮する
- ④ 「歯のマント」 「虫バイ菌がお口の中に落ち ないようにしてくれるよ」と子供に説明

最近始めたInstagram で小児用ラバーダムフ レームのショート動画を アップしたところ、3週 間で49.7万回再生され、 関心の高さに驚きました。







小児の浸潤麻酔の前には味を選べる表面麻酔を使用して



装着したところ。鼻で呼 吸できるか必ず確認し、 声かけをしています。



フレームを曲げて横から 唾液を吸引することがで きます。

Products Information



クロスフィールドホームページにて位置付け用紙を配信中

小児用 ラバーダムフレーム 商品名 標準価格 4,500円/個(税込4,950円)

製造販売元:株式会社シオダ

感染予防 診療補助 インスツルメント デンタルミラー 切削研磨バー

新型コロナウイルスの感染予防対策におけるマスクの選択

一 高機能 アベビータプロテクトマスクの特徴 一

100%天然コットンでできているのでサラサラとしていて肌にも優しく、 肌トラブルで悩むことがなくなりました。

キャビネ・ラピヌー (千葉県浦安市)

歯科衛生士 川島 遥香



新型コロナウイルスの感染予防対策として、当院でもマスク、グロー ブ、フェイスシールド、ガウン等の個人防護具の着用をしています。 なかでもマスクは一日の多くの時間を着用するので高機能かつ快適に 着用できるものは必須です。

さまざまなマスクを試しましたが、耳にかける形のマスクは顔に フィット感が少なく、隙間ができてしまうものが多く、頭の後ろまで 回る紐のついたマスクの方がフィットする感じはありました。しかし そのタイプのマスクは長時間使用すると耳や鼻の頭・目の下を強く圧 迫し、真っ赤に跡がついて痛みを伴っていました。特に夏の時期はマ スクの中が熱気で呼吸がしにくく、毎日長時間使用するには辛いと感 じていた時に、アベビータプロテクトマスク 2.0 に出会いました。

こちらのマスクは耳にかけるタイプですが、イヤーループにより各自 調整ができ、顔にフィットしながら口元には空間ができる立体的な形 で会話がしやすく、ノーズワイヤーも入っていて鼻にもフィットする のでマスクの隙間から息が漏れることもなく呼吸がしやすいです。ま た、紐も太めで耳が痛くなることもありません。どんな方でも顔に快 適にフィットした形で使用することが可能です。

今まで使用してきたマスクは摩擦による痒みや肌荒れを起こすことが 多かったですが、こちらは 100%天然コットンでできているのでサ ラサラとしていて肌にも優しく、肌トラブルで悩むことがなくなりま Lite

ピンク/ライトブルー/ホワイト/グレー/ブラック

更に、これまで使用してきたマスクとの最大の違いは洗って繰り返し 使用することができるところです。洗濯しても布地が毛羽立たず、ほ とんど色あせることがなく快適に使用することができています。抗菌 性があるので使用毎に洗う必要がない点やネットに入れて洗濯できる 点も便利だと思います。

こんなに快適に使用することができるのに、4層の高機能フィルター により、0.1 ミクロン粒子を 99% 防ぐ性能という安心感もあります。

コロナ禍においてまだまだ予断を許さない状況が続いているので、高 機能なマスクを着用することは私たちも安心して診療を行い、患者様 にも安心して歯科を受診してもらえることに繋がると思います。



ノーズワイヤーによりフィット した形で固定できる



イヤーループで各自調整で 診療中はサージカルマスク き、耳が痛くなることがない と二重にして使用



..... Products Information



PREDATOR DIAMONDS

ジルコニアに限らず メタルボンドやメタル クラウン等の補綴物除去に も高い切削力を発揮

特殊接着によりダイヤモ ンドの粒子の付着が 長期間持続されるので消 耗率が低い

均等なダイヤモンドを均一に塗布することで 高い切削率と発熱を軽減



プレデタージルコニア Z856-018F

商品名 プレデタージルコニア

販売名: プレデタージルコニア 医療機器届出番号 13B1X00133000031

Z801-018F、Z856-018F、Z862-014F、Z368-023F、Z807-018F Z801-018M、Z856-018M、Z862-014M、Z368-023M、Z807-018M

標準価格 各8,000円(税込8,800円)/5本入 @1,600円/本

Z856-018F、Z856-018M

標準価格 各1,800円 (税込1,980円) /1本入



PREDATOR CARBIDE BURS

プレデターターボに新形態が登場!

斬新な幾何学的形状を使用し ーディーでスムーズな 金属カットが可能

高精度に切削製造された作業

部は迅速かつスムーズなカッ

タングステンカーバイド (PR-6R, PR-8Rは除く) 高精度に切削製造されたバーは回転軸、 刃部の正確さで振動を減少

プレデターターボ PR-2T



4.0 **3L**(サージカルレングス)



プレデター PR-DX Special ンやメタルボンド除去用



PR-2T SL PR-1T SL PR-557T SI 4.0 1.9 3.7

金属除去用カーバイドバー

商品名 プレデターターボ

販売名: プレデターターボ Special PR-3T、PR-DX

標準価格 各8,200円(税込9,020円)/10本入(@820円/本)

PR-2T、PR-1557T、PR-1T、PR-330T、PR-245T、PR-557T PR 558T、PR-35T、PR-701T、PR-702T、PR-2R、PR-4R、PR-6R、PR-8R

標準価格 各 5,200 円 (税込 5,720 円) /10 本入 (@520 円 / 本)

医療機器届出番号 13B1X00133000005 SL(サージカルレングス)

> 標準価格 各 12,000 円(税込 13,200 円)/ 10本入(@1,200円/本)

PR-2T SL、PR-1T SL、PR-557T SL

PRIMA CLASSIC

CARBIDE OPERATIVE BURS



ティングが可能

タングステンカーバイド鋼一体型が 可能にした破損しにくいネック部の 強度

タングステンカーバイド一体型の

プリマカーバイドバー FG330





ラウンドFG4

FG ½ FG 2 FG 3 FG 4











商品名 プリマカーバイドバー FG1/2、FG2、FG3、FG4、FG330、FG331、FG332、FG1156、FG1157、FG1158、

販売名: プリマカーバイドバー 医療機器届出番号 13B1X00133000014

size 4 22mm

FG556、FG557、FG558、FG1556、FG1557、FG1558、FG245

標準価格 各4,000円(税込4,400円)/10本入(@400/本)

PRIMA CLASSIC MOUTH MIRRORS

商品特徴

· 可視光 (455-492nm) の範囲で高い反射率

・診療中のストレス軽減

・患者さんに早く確実な診断を提供

・表面反射ミラーの低価格化を実現

商品名 プリマミラー 販売名: プリマミラー 医療機器届出番号 13B1X00133000042 サイズ 2、サイズ 3、サイズ 4、サイズ 5、サイズ 6


標準価格 各 3,000 円 12個/箱(税込3,300円)(250円)

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。 で使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

自然光下で反射率の高い 表面反射高品質ミラー

size 3 20mm

* 実寸大

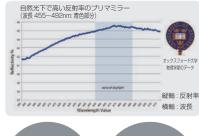





■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

製造販売元: カイインダストリーズ株式会社

NO.11

※通常替刃メス(販売名:KAI替刃メス)の取り扱いもございます。通常替刃メスとコーティング替刃メスは同価格になります。

NO.10 1,000円(税込 1,100円)

NO.12 1,000円(税込 1,100円)

NO.12B 1,000円(税込1,100円)

NO.15 1,000円(税込 1,100円)

NO.15C 1,000円(税込1,100円)

1,000円(税込1,100円)

KAI コーティング替刃メス

コーティングメス (当社比)

早くて簡単なクラウンリムーバー、

除去の強い味方

MEDICAL DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

低摩擦コーティングにより切れ味が向上し 脂肪の付着が低減されることで、

優れた切れ味が持続します。

ナイロン糸を切断するのに要する荷重 約60%低減

《材質》 ・ 刃物用ステンレス鋼

《仕様》・ディスポーザブル(再使用禁止)

- γ線滅菌済み
- ·20枚入
- ・10番台替刃の適合ハンドル:M3

商品名 KAI コーティング替刃メス

販売名: KAI 替刃メス

医療機器認証番号: 219ABBZX00078000

20枚入 1.000円(税別)

1枚あたり 50円(税別)

MD ガイド

Mesial Distal Guide

WAM インプラント用イニシャルドリル

商品名 MD ガイド

MD ガイド イントロキット 標準価格 120,000 円 (税込 132,000 円) キット内容 各1個 ドリルガイド φ6, φ7.5, φ9, φ10.5, φ12 (mm)

サージカルボックス

販売名:MDガイド 医療機器届出番号 13B1X00133000058

近遠心の補綴物を想定

しながら簡単に位置を 決められます





<MD ガイド イントロキット>

WAM

商品名

ワムキークラウンリムーバー 販売名: ワムキークラウンリムーバー

セット 標準価格 50,000 円 (税込 55.000円)

ワムキークラウンリムーバー No.1 ワムキークラウンリムーバー No.2 ワムキークラウンリムーバー No.3 各1本、計3本

各1本 標準価格 20,000 円 (税込 22.000円)

ワムキークラウンリムーバー No.1 ワムキークラウンリムーバー No.2 ワムキークラウンリムーバー No.3

医療機器届出番号 13B1X00133000032

ワムX 金属コア除去イントロキット WAM'X

ユニバーサル法対応基本キット

商品名

ワムX 金属コア除去イントロキット

セット内容

フォーセップス (衝撃吸収ネジ付)

プロング (プロングS×2/プロングM×2/プロングL×2) 計 6 個

シリコンリング 3 サイズ (S×2 / M×2 / L×2) 計 6 個

標準価格 129,000 円 (税込 141,900 円)

販売名: ワムX 金属コア除去イントロキット 医療機器届出番号 13B1X00133000069







プロングを挿入できるように金属コアを切削します





金属コアにプロングを挿入しフォーセップスを開いて除去します

動画はこちらでご確認ください



ファイバーポスト、ファイルを簡単把持












■ 商品名 2WAYツイーザー 販売名: 2WAY ツイーザー 医療機器届出番号: 13B1X00133000082 14,800円 (税込16,280円) 材質: ステンレススチール *オートクレーブ対応

2WAY ツイーザー



- 一本で2通りの使い方が可能
- 安心なセルフロックシステム
- 操作による手指の負担を軽減

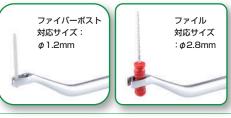

ホワイトマジック 販売名: ホワイトマシック 医療機器扁出番号1381 X00133200026 WHITE MAGIC





A abrasive technology

- 矯正用ボンディング材の除去
- スケーリング後の歯面スムージング


■ ステイン除去

■ 余剰セメントの除去

ホワイトマジックはジルコン強化ファイバーをレジンバインダーで 固定してあり、常にレジンバインダーが先に摩耗し、シャープなファイバー面が露出しますので研磨効率が落ちる事はありません。 ファイバーは硬い面では細かく破片し、エナメル質やセラミックを 傷つける事がほとんどありません。 * 個人差があります

商品名 ホワイトマジック・イントロキット

各モデル 1 本ずつ、合計 6 本 標準価格 5,040円 (税込 5,544円)

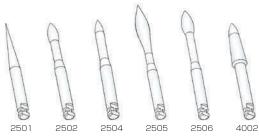


商品名 ホワイトマジック・単品

※2503、4001は単品のみの販売

標準価格 5,040 円 (税込5,544円) 各モデル6本入り






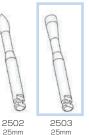





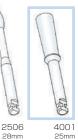




25mm

Dr Mark's HyGenie 5

デンタルクリーナ

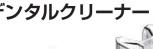



商品名

デンタルクリーナー

標準価格 3,900 円 (税込 4,290 円) 患者価格 4,900 円 (税込 5,390 円) 本体サイズ: Φ90mm×85mm

商品名

デンタル携帯用ケース

標準価格 1,350円 (税込 1,485円) 患者価格 1,950円 (税込2,145円) 本体サイズ:83mm×88mm×33mm





ピースなどさまざまな ヒースなここ なこ ない 歯科関連のアイテムを クリーニング可能。(対 応幅<65mm)

持ち運び便利なデンタル携 帯用ケース

DIRECTA

STIK-N-PLACE スティックンプレイス

ディスポーザブルの保持器具として



■ 特徴

小さくて壊れやすいもの(インレー ハー、クラウン、ラミネートベニ バンド、ブラケット、クラスプ、 ポストなど)を確実に保持できます。



商品名

スティックンプレイス

3,500円(税込3,850円)/50本 標準価格

1 プレート 10 本入り×5 プレート

DIRECTA

DryDent ドライデント

唾液などを吸収して治療の効率化と患者さんの心地よさを提供



頰粘膜用

ポリエチレン





Ⅰ頬粘膜用



吸収した湿気や唾液を 保持して変形しない

嘔吐反射が出にくく 患者さんに やさしいデザイン

■ 舌下用

しっかり吸収

舌下の湿気や唾液を

短時間で湿気や唾液を 吸収し治療しやすい 乾燥状態となる 吸収剤部 ポリアクリレート、 セルロース カバー部

排唾管が必要な時に クッションとなり 患者さんが心地よい

販売名: ドライデント 医療機器届出番号 13B1X00133000064

商品名 ドライデント

動 頻粘膜用 L 標準価格 1,800 円 (税込 1,980円) /50枚 36×40 [mm]

● 頰粘膜用 S 標準価格 1,800円 (税込1,980円) /50枚 43×50 [mm]

標準価格 3,200円 ● 舌下用 L (税込3,520円) /40枚

30×50 [mm] 標準価格 3,200円 ● 舌下用 S

(税込3,520円) /50枚 60×38 [mm]

■ お問い合せはクロスフィールド㈱まで

:らか素材エッジ部

感染予防商品シリーズ

⑫ 術者保護エプロン

スウェーデンでは多くの歯科医院が導入 患者にも使用可能な感染予防強化アイテム * 2 点シール留タイプは肩シールのみ

商品名

術者保護エプロン 2点シール留タイプ ライトブルー 標準価格 1,500円(税込1,650円)/100枚入 @15円/枚 *ディスポーザブル 術者保護エプロン 3点シール留タイプ ブルー

標準価格 1,900円 (税込2,090円) /100枚入 @19円/枚 *ディスポーザブル

立体ポケット<mark>付</mark> 患者エプロン

患者さんの 感染予防に役立つ 立体ポケット付エプロン * 使用直前に裏返すことで 立体感がでます

商品名

標準価格 1,900円 (税込2,090円) /100枚入 @19円/枚 *ディスポーザブル



Bio エプロン

Bio エプロンは家庭ごみ、堆肥化のどちらでも 捨てられる環境に優しいエプロンです。

商品名 Bioエプロン

標準価格 3,000円(税込3,300円)/50枚入@60円/枚

ックで壁にかけられる (耐荷重2 k g以上のフックを使用) 取出しやすい様に、1 枚目の一部が 最初からパッケージの外に出ています

体全体を包む大きめサイズで安心

*180日で推肥化します

ロール式で 1 枚ずつ取出せる清潔なパッケージ





Oro

ORO サージカルガウン(シート付)

- 厚手の不織布でしっかり感染予防 * ORO アイソレーションガウンよりさらに厚手になっています
- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首と腰で結べる紐付き
- ●高い撥水加工
- ●EO 滅菌済(シート白、シート青を含む)
- ディスポーザブル
- ●材質:smms 不織布



滅菌バッグ入り

ユニットテーブルの上に シートを広げたイメージ ニットカフ

シート白 25cm×25cm ×2 枚 シート青 50cm×50cm ×1 枚



モデル: 身長 154cm 着丈: 115cm ORO アイソレーションガウン、ORO サージカルガウン(シート付)共通の外観

商品名 OROサージカルガウン(シート付)

標準価格 500円 (税込550円)

OROサージカルガウン1枚、シート白2枚、 シート青1枚(OROサージカルガウンを包んでいるシート) *ベルトカード無し、首部分のマジックテープ無し

ORO アイソレーションガウン

- 厚手の不織布でしっかり感染予防
- ニットカフ使用で手首にフィット
- 首と腰で結べる紐付き
- 高い撥水加工
- 未滅菌
- ディスポーザブル
- 材質:smms 不織布

商品名 OROアイソレーションガウン

標準価格 2,500円(税込2,750円)/10枚入/袋 @250円/枚

ORO ヘッド&ヘッドレストカバー

- コンパクトサイズ
- 髪のボリュームがある方でもお使いいただけます
- ヘッドレストにも使用可能
- 帯電防止加工
- ディスポーザブル
- 材質:不織布
- *インド製 * ISO9001 / 13485 認証





幅 13.5cm 伸張性の高い不織布 清潔でコンパクトなパッケージ

商品名 OROヘッド&ヘッドレストカバー

標準価格 800円 (税込880円) /100枚入/袋 @8円/枚

ORSING ケアシールド CareShield

手軽にエアロゾル軽減

商品名 ケアシールド スターターキット

シールドリフィル×100枚 コネクター×5個 H6.5-11アダプター×10個 標準価格 28,000円 (税込30,800円)

商品名 ケアシールド シールドリフィル

標準価格 23,000円 (税込25,300円) 100枚入 単回使用

商品名 ケアシールド コネクター

標準価格 10,000円 (税込11,000円) 5個入

商品名 H6.5-11アダプター

標準価格 5,000円 (税込5,500円) 10個入

オートクレーブ可能(134℃)乾燥工程不可

商品名 U16-11アダプタ・

標準価格 5,000円 (税込5,500円) 10個入

オートクレーブ可能(134℃)乾燥工程不可 * ケアシールド スターターキットには含まれません





せかいと、 あなたを、

つなぐ。



アクセスできます。 https://www.crossf.com/



○ クロスフィールド 歯科

フロスフィールドのホームページが

リニューアルしました!

商品ラインナップが更に見やすくなりました。

海外製品が豊富なクロスフィールドを通じて、世界とつながってみませんか?



HP 掲載内容をご紹介!

「商品情報」をクリックして、 カテゴリを一覧表示



\フォローをお待ちしています!

SNS 公式アカウントでは新着情報やキャ ンペーン情報を配信しています。

「クロスフィールド株式会社」を検索、また は右の QR コードにかざすと検索できます。









Crossfield_dental

LINE クロスフィールド株式会社

■を引く販促ツール! ポップや動画、ポスタ·





TOP ページを下の方にスクロールして「ダウンロード」をクリッ クすると、院内でお使いいただけるポップや動画、ポスターがダ ウンロードできます。

メルマガ登録で気軽に お役立ち情報を GET!

PC やタブレット、スマート わるコラムを連載中です。





メルマガ登録はこちらの QR コード、 または URL よりアクセスしてください。 https://ux.nu/nxz8R

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元: クロスフィールド株式会社