

**DIRECTA**

ラクスエーター ユーザー様 限定キャンペーン

2026年 1/21 (水) から 3/20 (金) まで

ペンタイプも通常タイプも対象！

Luxator®

スウェーデンの歯科医師によってデザインされたラクスエーターシリーズに耐久性を追求したチタンコーティング

ラクスエーター・Pシリーズ

ラクスエーターシリーズにペンタイプが登場！！

- 歯根膜への挿入が容易
- 生体親和性が高いチタンコーティング
- シャーピング不要

！ 不適切な使用法によるブレードの破損や折れ及び、
シャーピングによるコーティングの剥がれは保証の対象になりません。

商品名

ラクスエーター・プラス
Pシリーズ

医療機器届出番号 13B1X00133000007



■ 品番 P1

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 3mm

形状: ストレート

色: ダークグリーン 全部位 (残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心)

■ 品番 P2

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 3mm

形状: カーブ

色: ライトブルー 全部位 (残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心)

■ 品番 P3

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 3mm

形状: コントラアングル

色: ダークブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心

■ 品番 P4

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 4mm/1.5mm

形状: デュアルエッジ

色: パープル 残根

■ ■ ■ 品番 PK4 標準価格 ~~90,000~~ 円 (税別) 4本セット (P1、P2、P3、P4)

マレットが使用できます

Luxator®

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた高品質なスウェーデン鋼使用

ラクスエーター・プラス

ラクスエーター・プラスによる抜歯の使用感*

- ・無理のない抜歯ができる
- ・骨損傷が最小限の歯周靱帯切断ができる
- ・インプラントのための良好な骨組織の保全が可能になる
- ・抜歯窩の損傷が最小限である
- ・術後の痛みと腫れの経過が良好である
- ・力に頼らずに抜歯が可能である

* 当社実施アンケート結果より

商品名

ラクスエーター・プラス

医療機器届出番号 13B1X00133000007


■ K4 (スタンダード4本) 標準価格 ~~82,000~~ 円 (税別)
4本セット (3C 3S 5C 5S) + シャーピングツール 1本 / 解説 CD-ROM 付き■ SK4 (ショートモデル4本) 標準価格 ~~75,000~~ 円 (税別)
4本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャーピングツール 1本 / 解説 CD-ROM 付き■ K7 (スタンダード7本) 標準価格 ~~142,000~~ 円 (税別)
7本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャーピングツール 1本 / 解説 CD-ROM 付きシャーピングツール
(ラクスエーター・プラス専用)単品 標準価格 ~~23,000~~ 円 / 本 (税別)
2S、3C、3S、3CA、3IC、5C、5S、S2S、S3C、S3S、S3CA単品 1S、DE3、DE5 標準価格 ~~25,000~~ 円 / 本 (税別)3S チタン 標準価格 ~~25,000~~ 円 / 本 (税別)2S チタン 標準価格 ~~26,000~~ 円 / 本 (税別)DE3 チタン 標準価格 ~~28,000~~ 円 / 本 (税別)3A チタン 標準価格 ~~28,000~~ 円 / 本 (税別)シャーピングツール 標準価格 ~~4,500~~ 円 / 本 (税別)

ラクスエーターシリーズに 耐久性を追求したチタンコーティング

■ 特徴

- ・ 歯根膜への挿入が容易
- ・ 生体親和性が高いチタンコーティング
- ・ シャーピング不要

【ラクスエーター・プラスの使用方法】

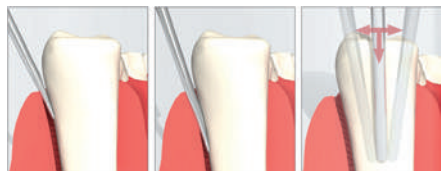

1. 歯の長軸方向に
対して真直ぐに
挿入します
2. 歯に沿わせて
歯槽骨を圧迫
しながら歯周
靱帯を切り進
めていきます
3. 根長の3分の
2程度切断し
ていくと楔効
果により歯を
脱臼できます



3A チタンの使用例

品番
ブレード幅
形状
シャンク部
色
推奨使用部位

3S チタン
3mm
ストレート
約 74mm
グレー
全部位 (残根/根尖/舌側/口蓋側/臼歯遠心)



26,000円/本(税別)

2S チタン
2mm
ストレート
約 74mm
グリーン
残根/根尖




26,000円/本(税別)

DE3 チタン
3/1.5mm
ストレート
約 74mm
グレー
残根



28,000円/本(税別)

3A チタン
3mm
アングル
約 74mm
パープル
舌側/口蓋側/臼歯遠心

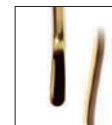

28,000円/本(税別)

3A チタンの
先端部

約 1.5mm

！ 注意事項
















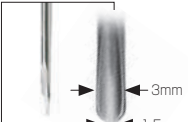
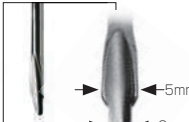
エレベーターのように使用できません
不適切な使用法によるブレードの破損や折れ、
及びシャープニングによるコーティングの剥がれは
保証の対象になりません。

本製品は鋭い刃先を持っています。
取扱にはご注意ください

* オートクレーブ対応 (135℃)

* DE3, DE5 は段差をつけた特徴的な形状で、より安定した挿入を実現させるとともにスリップのリスクも減少させます。

品番 ブレード幅 形状 シャンク部 色 推奨使用部位	1S 1mm ストレート 約 74mm ライトグリーン 残根 / 根尖	2S 2mm ストレート 約 74mm グリーン 残根 / 根尖	S2S 2mm ストレート/ショート 約 64mm グリーン 残根 / 根尖	3C 3mm カーブ 約 74mm ブラック 全部位 (残根/根尖/舌側/口蓋側/臼歯遠心)	S3C 3mm カーブ/ショート 約 63mm ブラック 全部位 (残根/根尖/舌側/口蓋側/臼歯遠心)	3S 3mm ストレート 約 74mm グレー 全部位 (残根/根尖/舌側/口蓋側/臼歯遠心)	S3S 3mm ストレート/ショート 約 64mm グレー 全部位 (残根/根尖/舌側/口蓋側/臼歯遠心)
							
	25,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)

品番 ブレード幅 形状 シャンク部 色 推奨使用部位	3CA 3mm コントラアングル 約 73mm ブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心	S3CA 3mm コントラアングル/ショート 約 62mm ブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心	3 IC 3mm インバーテッドカーブ 約 74mm ライトブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心	5C 5mm カーブ 約 72mm ブラウン 大臼歯	5S 5mm ストレート 約 74mm ライトブラウン 大臼歯	S5S 5mm ストレート/ショート 約 64mm ライトブラウン 大臼歯	DE3 3/1.5mm デュアルエッジ 約 74mm グレー 残根	DE5 5/3mm デュアルエッジ 約 74mm ライトブラウン 残根
								
	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	23,000円/本 (税別)	25,000円/本 (税別)	25,000円/本 (税別)

■ ご注文シート ご注文は FAX でお申し込みください FAX 03-3635-1060

歯科医院名		お電話番号		ご住所	
		メールアドレス			
メルマガ配信希望 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>					
お取引様名		支店名		ご担当者様名	
ご注文の商品名、品番 (ご記入ください)					

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元: クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: <https://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所